
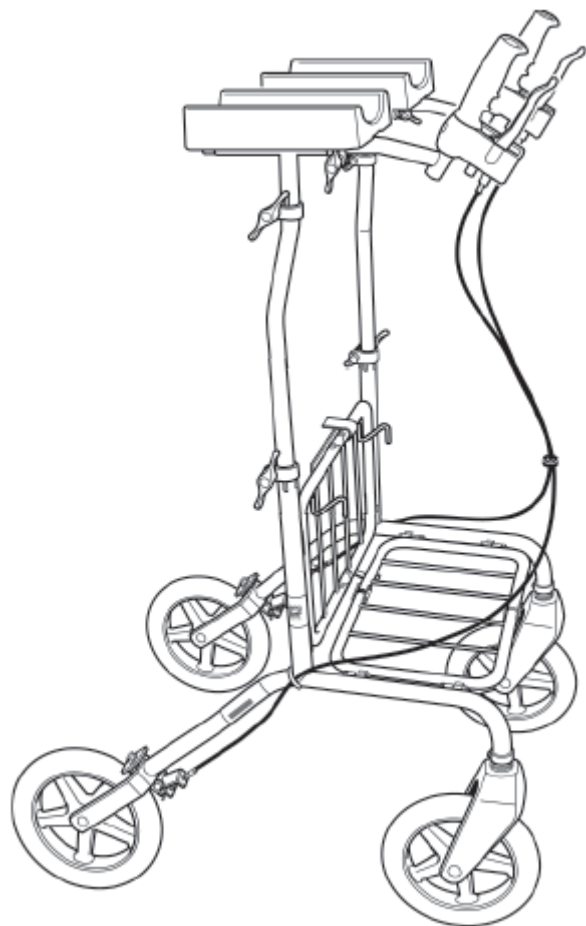


Carl-Oskar – Rebel **Kõrge tugiraam ja RA-käimisraam**

Carl-Oskar
Kõrge tugiraam ja RA-käimisraam

Rebel
Kõrge tugiraam ja RA-käimisraam

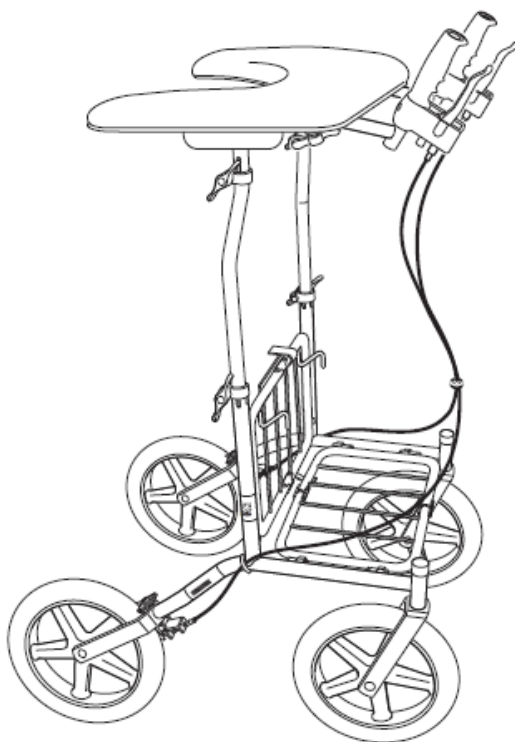


Kasutusjuhend
Eesti keel

Kasutusotstarve

Carl-Oskar ja Rebel

Carl-Oskar

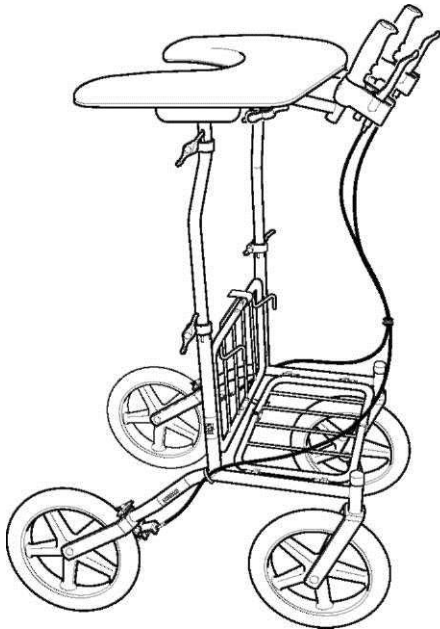

Rebel

Carl-Oskar ja **Rebel** on saadaval kõrge tugiraami ja RA-käimisraamina.

Carl-Oskar ja **Rebel** on stabiilsed tugi- ja RA-käimisraamid, mis sobivad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Tänu oma paindlikule raamile on nad kasutatavad nii tasastel kui ebatasastel pindadel.

Kõrge tugiraam ja RA-käimisraam on unikaalse kokkupandamisviisiga, mis võimaldab neid kokkupandult püstises asendis ladustada. Neid saab kokku panna ja lahti pakkida lihtsalt käsitsetavate käepidemete abil.

Tugiraam ja RA-käimisraamid on saadaval kahes eri laiuses ja kahes eri kõrguses.

Hoiatus!

RA-käimisraame tohib kasutada ainult toena käimisel või istmena parkimisel. Istumise ajal peab seisupidur olema rakendatud.

Tehnilised andmed

(Kõik mõõdud mm-s. Sulgudes toodud mõõdud ei ole standardmõõdud. RA-käimisraam Carl-Oskar ja Rebel tarnitakse standardina ilma istmeta.)

Turvaline käimisraam Artikli nr								Kokkupandult	Kasutaja max. kaal
	Min.	Max.	Istme kõrgus	Laius	Pikkus	Ratta suurus	Kaal (kg)	P x L x K (min.)	Standard (kg)
Carl-Oskar, RA-käimisraam									
12315 Madal 67 cm	950	1130	(640)	670	820	300x45	13,0	820x260x950	125
12325 Norm. 67 cm	1070	1260	(640)	670	820	300x45	13,2	820x260x1070	125
12415 Madal 72 cm	950	1130	(640)	720	820	300x45	13,1	820x260x950	125
12425 Norm. 72 cm	1070	1260	(640)	720	820	300x45	13,3	820x260x1070	125
Carl-Oskar, kõrge tugiraam									
13315 Madal 67 cm	950	1130	-	670	820	300x45	14,5	820x260x960	125
13325 Norm. 67 cm	1070	1260	-	670	820	300x45	14,7	820x260x1070	125
13415 Madal 72 cm	950	1130	-	720	820	300x45	14,6	820x260x950	125
13425 Norm. 72 cm	1070	1260	-	720	820	300x45	14,8	820x260x1070	125
Rebel, RA-käimisraam									
22311 Madal 67 cm	860	1040	(550)	670	750	200x40	11,3	750x250x860	125
22321 Norm. 67 cm	1060	1240	(620)	670	750	200x40	11,5	750x250x1000	125
22411 Madal 72 cm	860	1040	(550)	720	750	200x40	11,4	750x250x860	125
22421 Norm. 72 cm	1060	1240	(620)	720	750	200x40	11,6	750x250x1000	125
Rebel, kõrge tugiraam									
23311 Madal 67 cm	860	1040	-	670	750	200x40	12,8	750x250x860	125
23321 Norm. 67 cm	1060	1240	-	670	750	200x40	13,0	750x250x1000	125
23411 Madal 72 cm	860	1040	-	720	750	200x40	12,9	750x250x860	125
23421 Norm. 72 cm	1060	1240	-	720	750	200x40	13,1	750x250x1000	125

Tarvikud

Vt ka kasutusjuhend ja kokkupanemisjuhend

Sangadega korv	10601	NB!	Max. koormus 10 kg
Kandik, ainult RA-käimisraam, istmepadi	10602		Max. koormus 2 kg
Hapnikupudeli hoidja 1,5 l (Puudub madalal Rebelil)	10615		Max. koormus 5 kg
Jalutuskepi hoidja	10603		
Porikaitse (Carl-Oskar)	10608		
Ühekäe pidur	10652		
Seljatugi 72 cm-le	10655		


Tabel 1. Tarvikute võimalikud kombinatsioonid

	Korv	Kandik	Jalutuskepi hoidja	Haagise pidur	Hapnikupudeli hoidja	Ühekäe pidur
Korv	-	x	x	x	x	x
Kandik	x	-	x	x	x	x
Jalutuskepi hoidja	x	x	-	x	x	x
Haagise pidur	x	x	x	-	x	x
Hapnikupudeli hoidja	x	x	x	x	-	x
Ühekäe pidur	x	x	x	x	x	-

- = Ei kehti


Kasutusjuhend, kõrge tugiraam

Lahtipakkimine, kõrge tugiraam

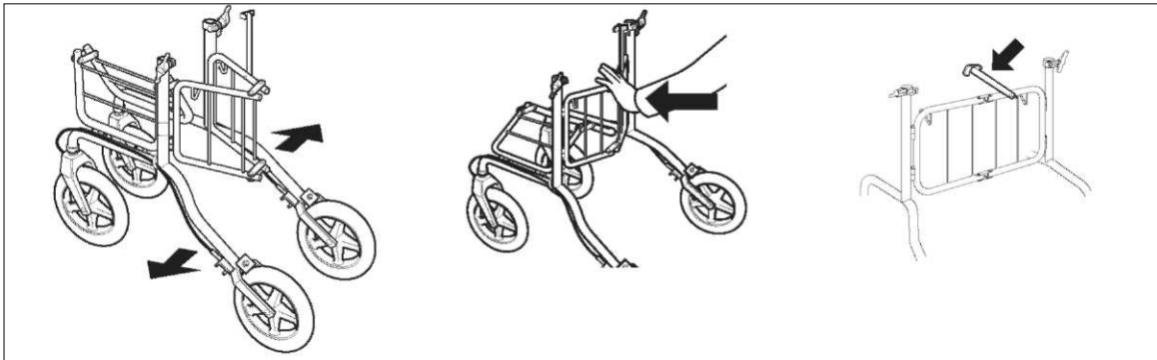


1 Tõmmake külgesid väljapoole. 2 Suruge võret ettepoole. 3 Lukustage võre lükates konksu allapoole.

4 Asetage laud kohale ja kinnitamiseks pingutage tiibmutrit.

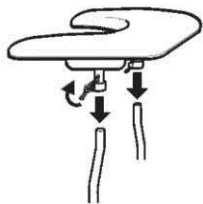

NB! Tiibmutrit pingutades kontrollige, et polt lukustub korralikult mutri sees.

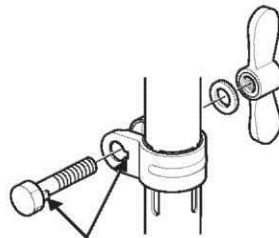


5 Reguleerige laud õigele kõrgusele. Lõdvendage tiibmutrit ja reguleerige laud õigele kõrgusele. Kinnitage tiibmutter.



NB! Torusid ei tohi tõsta üle „0”-märgi, mis asub torude tagaküljel.

6 Reguleerige kaugust käepidemetest.

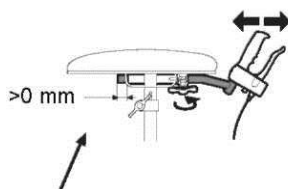

Sisemine toru ei tohi olla välimise sees.

Kokkupakkimine, kõrge tugiraam

Kõrge tugiraami kokkupakkimiseks korrake lahtipakkimist vastupidises järjekorras.

Kasutaja jaoks kopeeritav lehekül

Kasutusjuhend, RA-käimisraam

Lahtipakkimine, RA-käimisraam

1 Tõmmake käepidemeid väljapoole.

2 Lükake istet ettepoole.

3 NB! Kontrollige, et võre lukk rakenduks.

4 NB!

Käetugede tugitorud peavad olema suunaga sissepoole.

Kokkupakkimine, RA-käimisraam koos istmega


Tõmmake punasest silmusest, et vabastada võre.

Tõmmake istet tahapoole ja lükake käepidemeid sissepoole.

RA-käimisraam ilma istmeta
Lükka haak alla.


Kokkupakkimine, ilma istmeta

Tõmmake haak üles ja võret tahapoole ning lükake käepidemed sissepoole.

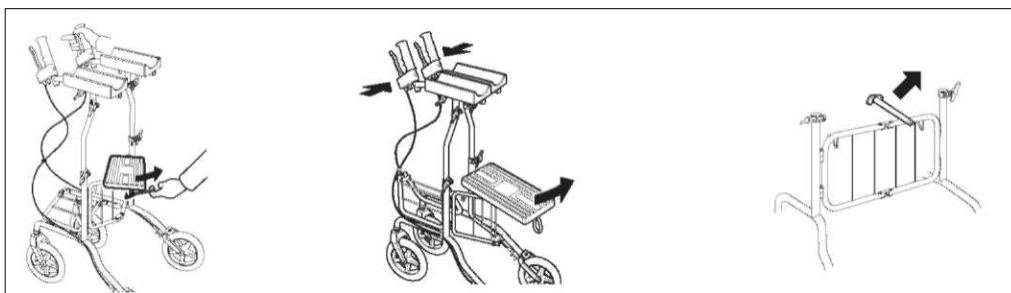


Kõrguse reguleerimine

Lõdvendage tiibmutter ja reguleerige käepide randme kõrgusele. Kinnitage tiibmutter.

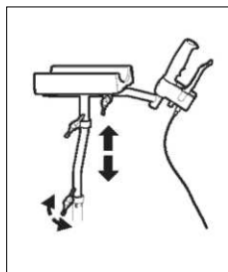

NB! Käepidemeid ei tohi tõsta üle „0”-märgi, mis asub torude tagaküljel. Käepidemed peavad olema suunaga tahapoole. Märk peab olema samal joonel klambri joonega torude külgedel, et ei tekiks ebastabiilsust ja ohtlikke olukordi.

Joon klambril

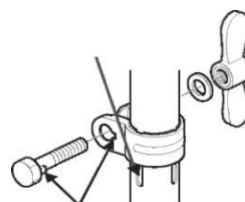

Hoiatus! Käepidemed ei tohi olla suunaga väljapoole, kuna see suurendab ümbermineku ohtu.

NB! Tiibmutrit pingutades kontrollige, et polt lukustuks korralikult mutri sees.

Carl-Oskar ja Rebel, turvaline tugiraam

Kasutusjuhend kõrgele tugiraamile ja RA-käimisraamile

Pidur

Pidurdamiseks tõmmake piduri käepidet **sissepoole**.

TÄHELEPANU! Pidev pidurdamine kulutab liigselt rattaid ja pidureid.

Seisupidur

Parkimiseks suruge piduri käepidet **allapoole**.

RA-käimisraam istmega

Hoiatus! Rakendage seisupidur **enne** istumist.

Pidurite reguleerimine

Lõdvendage lukustusmutter; reguleerige lõdvendades/pingutades reguleerimistoru. Pingutage lukustusmutrit uuesti pärast reguleerimist.

Puhastamine ja hooldus

NB!

Käimisraami osade vahetamisel kasutage ainult Human Care varuosi, et tagada jätkuv CE kinnitus.

NB!

Kontrollige käimisraami regulaarselt, et jätkuvalt tagada selle turvalisus kasutaja jaoks. Soovitatakse järgmiseid meetmeid.

NB!

Ärge tehke käimisraami juures ise muudatusi.

Regulaarseid kontrolle peab viima läbi vastavalt art. nr 99201-ENG juhendis toodud soovitudele.

Käimisraami peab puhastama määrdeaineteta puhastusvahendiga. Pärast puhastamist tuleb kõik ühendus- ja tihked kohad fooniga kuivatada ning pihustada neile õhuke kiht õli.

Hoolduse, remondi ja varuosade kohta lisainformatsiooni saamiseks vt Human Care HC Sweden veebilehekülge: www.humancarerollators.com

Esindaja

Human Care HC Sweden AB

Ilabäcksvägen 5
342 32 Alvesta
Tel (+46) 472-447 70
Faks (+46) 472-122 04

www.humancarerollators.com
teknik@ahlbergleber.com

99101-ENG revB 2007-05-29