

# Mustang


Eestikeelne kasutusjuhend

© 2011 R82 A/S. All rights reserved.

The R82 logo and the Mustang are registered trademarks of R82 A/S.

## Sisukord

MUSTANG.....	3
Ettevaatusabinõud.....	4
Garantiaeg.....	4
Kaasaskäivad tööriistad.....	5
Kasutusjuhend Mustangi üles seadmiseks.....	6
Kõrguse kohandamine.....	7
Nurga muutmise.....	7
Rinnatõe kõrguse reguleerimine.....	8
Rinnatõe reguleerimine.....	8
Seisupidurid.....	9
Kiirenduspidur (DRAG PIDUR).....	9
Ratta stopperid.....	9
Liikumise suuna stabilisaatorid.....	10
Rinnatõe vahelüli (abiseade).....	11
Rinnatõe kate (abiseade).....	11
Peatõe kohandamine (abiseade).....	12
Puusatõe kohandamine (abiseade).....	13
Kõhutoe kohandamine (abiseade).....	14
Eesmine käepide (abiseade).....	14
Käsivarretoed, eesmised ja tagumised (abiseade).....	15
Eesmised käetoed (abiseade).....	15
Istme kohandamine (abiseade).....	16
Nimmetõe kohandamine (abiseade).....	16
Ripptooli kohandamine (abiseade).....	17
Hoiutasku (abiseade).....	17
Juhtimiskangi kohandamine (abiseade).....	18
Jalgade eraldaja kohandamine (abiseade).....	19
Kõrguse kohandamine.....	20
Toote originaalsuse indikaatorid.....	21
Toote hooldamine.....	22
Sagedasti esinevad probleemid & nende lahendused.....	23

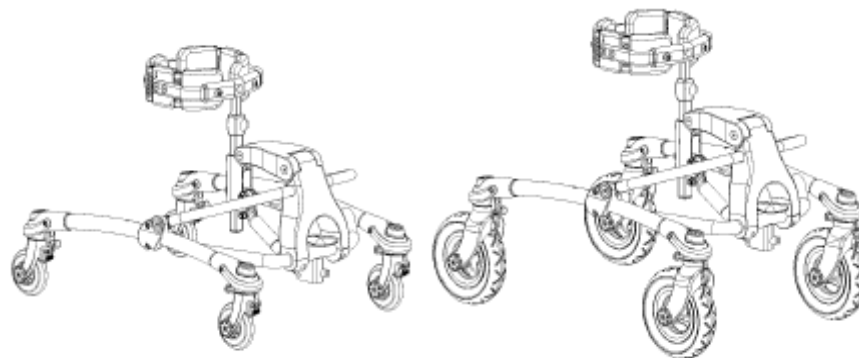

## MUSTANG

Täname, et valisite R82 Mustangi oma lapse uueks kõndimisraamiks.

Mustang on kõndimisraamide seeriast R82 ning sobib lastele, kes vajavad igapäevaselt lisa abi kõndimisel. Mustang on laialdaselt levinud näiteks tserebraalparalüüsi diagnoosiga ning teisi mootorhäireid põdevate laste seas, kellel on tasakaaluga probleeme. Mustangi sihtotstarbeline kasutus oleks eesmise kõndimisraamina, kuid seda on võimalik kasutada ka tagumise kõndimisraamina, olenevalt lapse liikumisvõimekusest.

Mustangit toodetakse kahes suuruses. Esimene suurus on mõeldud kasutuseks eelkõige siseruumides (kuid sobib ka väliseks kasutuseks tasapinnalise maapinna korral). Esimene suurus on varustatud nelja 4" rullikuga. Teine suurus on kohandatud kasutuseks nii siseruumides, kui ka õues, olles varustatud 4 rattaga suuruses 200 x 50 mm.

Käesolev kasutusjuhend on loodud abistamiseks kasutajat/hooldajat Mustangi kasutusele võtmisel. Seega omaltpoolt soovitame esmalt kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda.

## **Ettevaatusabinõud**

- Lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks. Juhendis esitatud abinõude eiramise korral võite seada ohtu kõndimisraami kasutaja.
- Kõndimisraami kohandamine viisidel, mida antud kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole, tuleb korda saata R82 personali poolt.
- Antud toode on CE-märgistatud, mis tõendab, et see täidab kõiki olulisi Euroopa turvalisus standardeid. Mustang on 1985. aastal testitud ning heaks kiidetud EN-i poolt. Palume eemaldada tootel olev CE-märgistus juhul, kui soovite toodet ümber ehitada või kasutate alternatiivseid varuosi originaalsete R82 varuosade asemel.
- Antud toote maksimaalne eluiga igapäevasel kasutamisel on 5 aastat. Aegumise järgselt tuleb toode R82 personali poolt uuendada ning parandada edaspidiseks kasutamiseks.
- NB! Mitte kunagiegi tohi jätta kõndimisraami kasutaja järelvalveta. Antud toote kasutamisel on vajab laps pidevat järelvalvet täiskasvanu poolt. Toote valekasutamine võib põhjustada tarbijale tõsiseid vigastusi.
- Antud toode on loodud kasutamiseks ühele inimesele korraga. Palume mitte panna kõndimisraami rohkem kui ühte last korraga.
- Kui kõndimisraami kasutaja on tootel märgitud maksimaalsele kehakaalu ning pikkuse määrdule lähedal ning kogeb pidevalt tahtele allumatuid liigutusi – näiteks krampe – soovitame kaaluda suurema maksimum kandvusega kõndimisraami muretsemist.
- Enne iga kasutuskorda kontrollida, et kõik seadistused kandraamil oleksid tugevalt kinnitatud.

## **Garantiaeg**

R82 tüüpi kõndimisraamidele anname 5 aastase garantii raami purunemise või defektide ilmnemise puhuks. Samuti tagab R82 garantii tootmisdefektide või materjalidefektide ilmnemise korral. Garantii on kooskõlastatud rahvuslike müügiseaduste ja –regulatsioonidega müügiirigis. See tähendab, et garantii kehtivus võib sõltuda sellest, kas klient on kinnipidanud kasutusjuhendis kirjeldatud hooldusjuhtnõõridest ning ajalisest hooldusgraafikust. Garantii on jõus juhul, kui R82 toode on kasutusel samas riigis, kust see osteti ning toode suudetakse identifitseerida sellel oleva seerianumbri abil. Samuti peavad olema täidetud toote hooldamist puudutavad kliendi omavastutusnõuded.

Garantii ei kata õnnetusjuhtumitest tulenevat kahju, ega kahju mille on põhjustanud omaniku poolne valekasutus või hooletus. Garantii ei laiene abiseadetele, mis tavapäraselt kuluvad ning vajavad periooditi väljavahetamist. Käesolev garantii muutub õigustühiseks, kui toote juures kasutatavad abiseadmed ei ole originaalsed R82 tooted või juhul, kui toodet muudetakse või parandatakse kellegi muu, kui R82 autoriseeritud esindaja poolt.



R82 säilitab õiguse kontrollida täheldatud toodet ning asjakohast dokumentatsiooni enne garantiinõude vastuvõetavaks tunnistamist. Garantii annab tootele R82 maaletooja või alternatiivselt, R82 esindaja.

### ***Kaasaskäivad tööriistad***

Tööriistakott, mis sisaldab 5 mm kuuskant võtit.

## Kasutusjuhend Mustangi üles seadmiseks


- Võta raam kastist välja
- Eemalda kiirkinnituse poldid (A)
- Paki raam lahti (B)
- Taaspaigalda kiirkinnituse poldid (C)

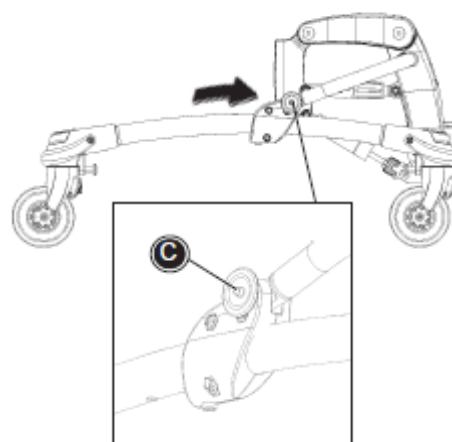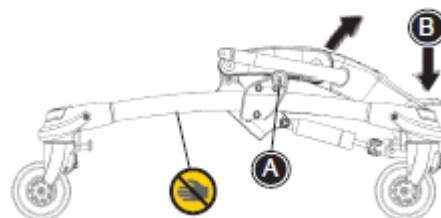


Paigaldage rinnatugi ning kinnitage sealne kruvi (D) 5 mm kuuskant võtmega, mille leiате tööriistakotist.

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks kõndimisraami kokkupanekul ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse!

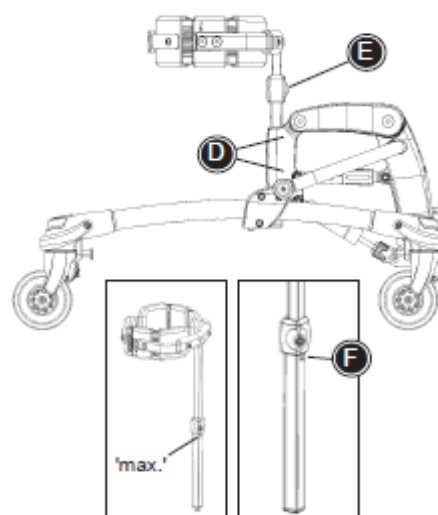


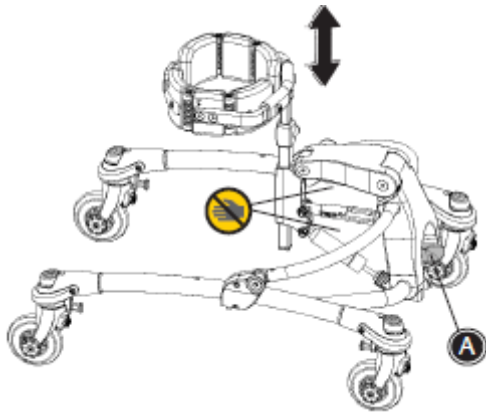

### **Kõrguse kohandamine**

- Aktiveerige käepide (A) rinnatõe kõrguse kohandamiseks.

**! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse rinnatõe kõrguse kohandamisel!  
EST Nurkade kohandamine**

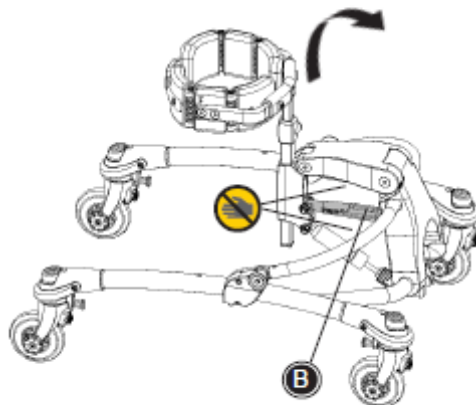

### **Nurga muutmine**

- Keerake käepidet (B) rinnatõe õige nurga alla seadmiseks.


**! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse rinnatõe õige nurga alla sättimisel!**

## Rinnatõe kõrguse reguleerimine

Rinnatõe kõrguse reguleerimiseks kasutage 5 mm kuuskantvõtit, mille leiata tööriistakotist.

! Olge tähelepanelik – raamile on trükitud maksimaalse kõrguse näitaja!

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

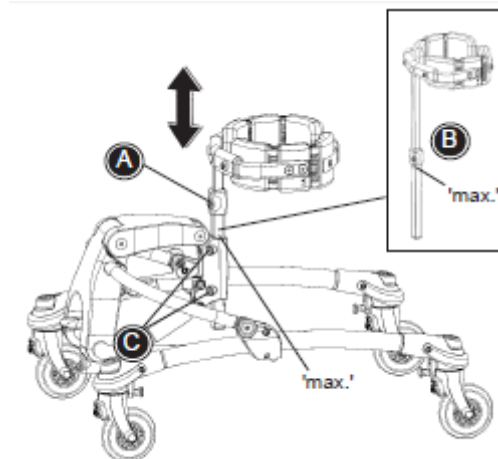


## Rinnatõe reguleerimine

- Rinnatõe laiuse reguleerimiseks laske kruvid (A) lõdvemaks

! Ärge paigaldage rinnatõe pidesid kaugemale maksimaalsest paigaldusmärkest!

- Reguleerimaks rinnatõe pidesid eraldi, keerake kruvid (B) ja (C) ükshaaval lõdvemaks. Lihtsa juurdepääsu ning demonteerimise tagamiseks soovitage kruve (C) mitte liiga kõvasti kinni keerata.
- Kinnitage rinnatugi kasutades tagumisi rihmasid ja pandlaid (D)

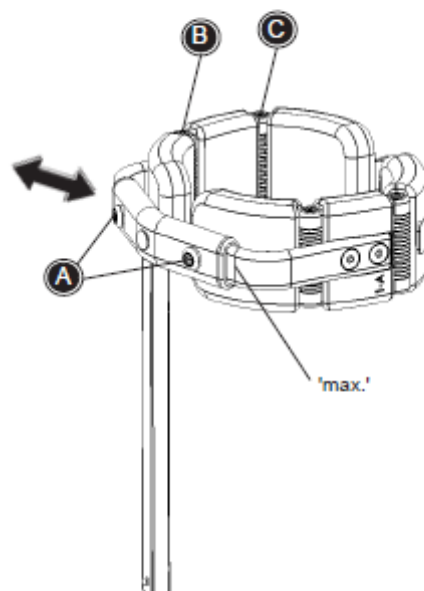

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

! Kontrollige kõiki rihmasid ja pandlaid enne iga kasutuskorda ning asendage kulunud osad enne toote kasutamist!




## **Seisupidurid**

Mustangi standardvarustusse kuuluvad seisupidurid kõigile neljale rattale.

- Aktiveerige pidur (A)
- Deaktiveerige pidur (B)


! Kontrollige, et kõik pidurid oleksid aktiveeritud enne lapse paigutamist Mustangisse.

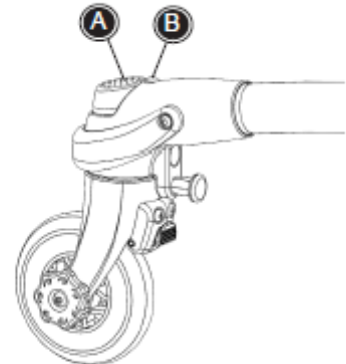

## **Kiirenduspidur (DRAG PIDUR)**

Mustangi standardvarustusse kuuluvad kiirenduspidurid kõigile neljale rattale.

- Kinnitage käepide nõrgemini või tugevamini - vastavalt reguleerite Mustangi liikuma panemiseks vajalikku jõudu.

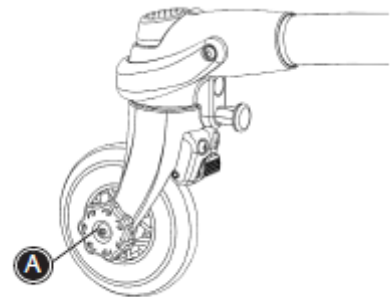


## **Ratta stopperid**

Mustangi standardvarustusse kuuluvad ratta stopperid kõigile neljale rattale.

- Lükake ratta stopperid alla pidurite aktiveerimiseks
- Tõmmake ratta stopperid üles pidurite deaktiveerimiseks

! Ratta stopperid töötavad vaid siis, kui liikumise suuna stabilisaatorid on aktiveeritud!

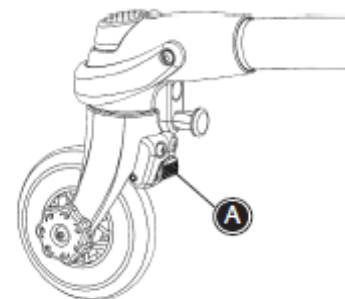

## **Liikumise suuna stabilisaatorid**


Mustangi standardvarustusse kuuluvad liikumise suuna stabilisaatorid kõigile neljale rattale. Liikumise suuna stabilisaatorid lukustavad rattad sõidusuunda.

- 1) Liikumise suuna stabilisaatorite aktiveerimiseks tõmba nuppu (1A), keera seda kella osuti suunas (1B) ning vabasta see nii, et nupp tagasi oma pesa vajuks.


Nupp peaks seejärel välja nägema nagu näidatud joonisel (1C). Eesmised rattad on nüüd lukustatud otsesõidusuunda.

- 2) Liikumise suuna stabilisaatorite deaktiveerimiseks tõmba nuppu (2A), pööra seda vastupäeva (2B) nii, et see enam pesa ei sobituks ja seejärel vabasta nupp.

Nupp peaks seejärel välja nägema nagu näidatud joonisel (2C). Eesmised rattad võivad nüüd pöörata igasse suunda.

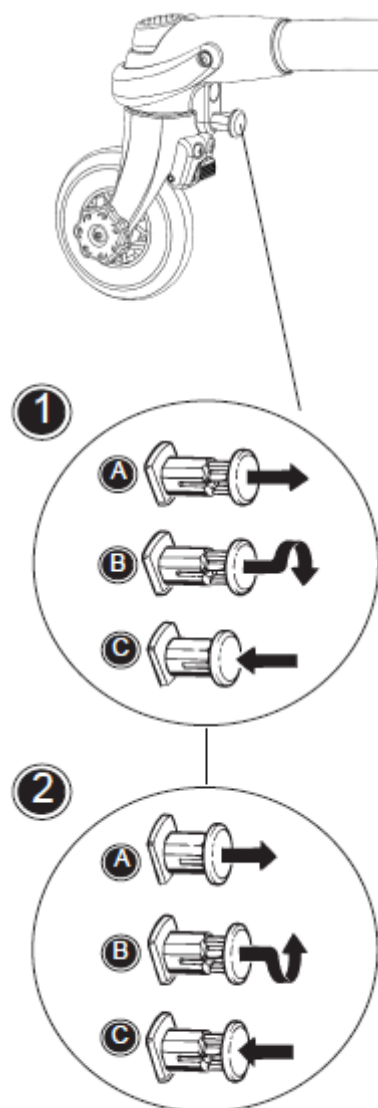

### **Rinnatõe vahelüli (abiseade)**

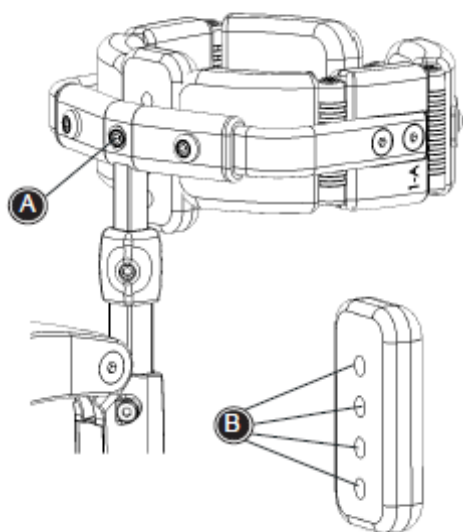


- Rinnatõe vahelüli kõrguse kohandamiseks eemaldage kruvi (A).
- Taaspaigaldage kruvi (A) ühesse vahelüli aukudest (B).

Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiata tööriistakotist.

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitust ja teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

### **Rinnatõe kate (abiseade)**

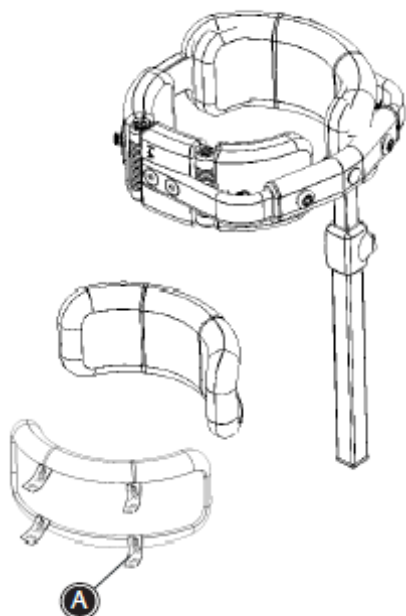

Lisa mugavuse tagamiseks võib rinnatõe paigaldada pehmendava kate.

- Ava takjaskinnitus (A) ning eemalda kate - näiteks kate pesemise eesmärgil (40°C).

! Kontrollige kõiki rihmasid ja pandlaid enne iga kasutuskorda ning asendage kulunud osad enne toote kasutamist!

## **Peatoe kohandamine (abiseade)**

- Peatoe õige nurga alla seadmine (A)
- Peatoe kõrguse kohandamine (B)


**! Ärge paigaldage peatuge kaugemale maksimaalsetest paigaldusmärkidest!**

- Peatoe õige nurga alla seadmise süsteem (C)


**! Paigaldamisel kasutage tööriistakotis olevat 5 mm kuuskant võtit.**

**! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse peatoe kohandamisel.**

**! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.**

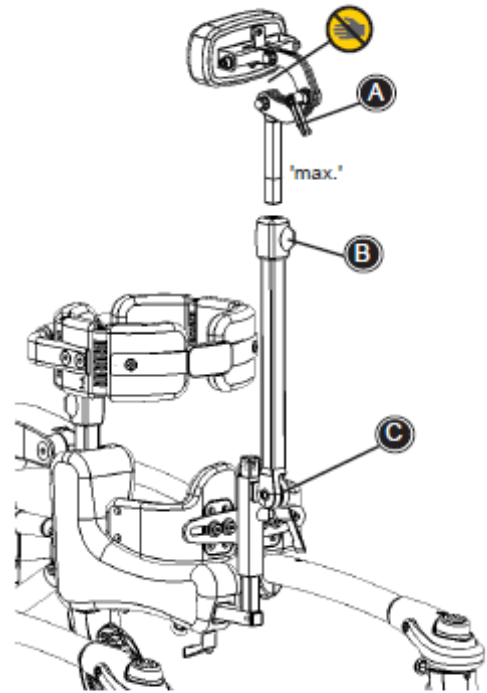

## **Puusatoe kohandamine (abiseade)**

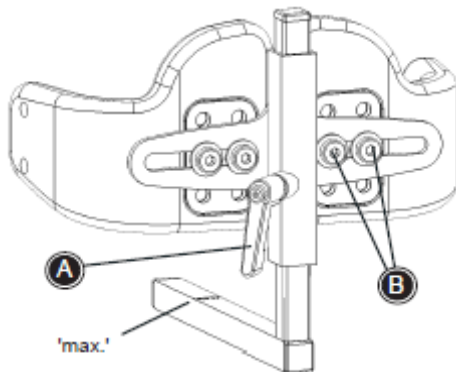

- Kõrguse kohandamine (A)
- Kõrguse ja laiuse kohandamine (B)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiata tööriistakotist.

! Ärge paigaldage puusatuge kaugemale maksimaalsest paigaldusmärgist!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

## Kõhutoe kohandamine (abiseade)


Kõrguse kohandamine (A)

Kõrguse kohandamine (B)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiate tööriistakotist.

! Olge tähelepanelik – raamile on trükitud maksimaalse kõrguse näitaja!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

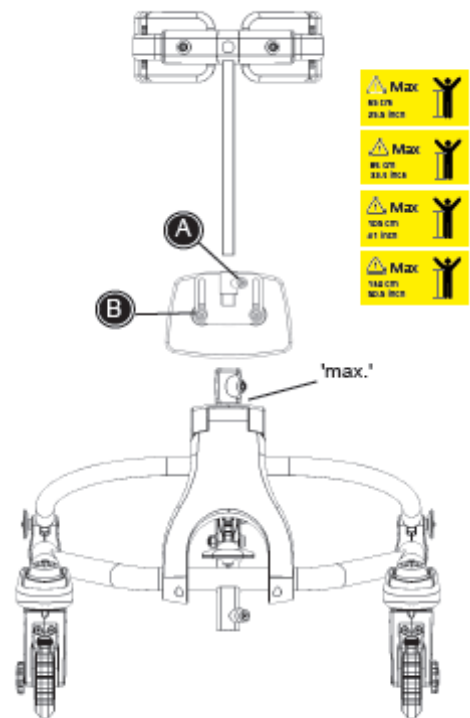

## Eesmine käepide (abiseade)


Kõrguse kohandamine (A)

Sügavuse reguleerimine (B)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiate tööriistakotist.

! Olge tähelepanelik – raamile on trükitud maksimaalse kõrguse näitaja!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

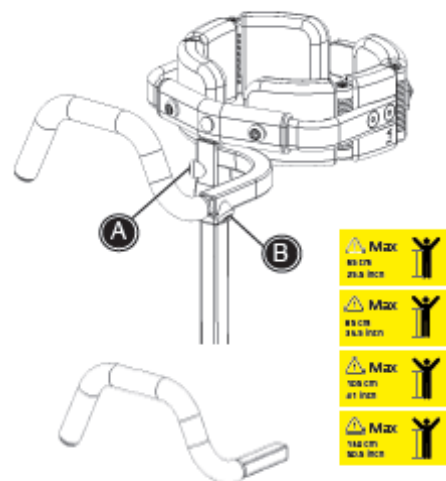


## **Käsivarretoed, eesmised ja tagumised (abiseade)**

- Nurga ja sügavuse kohandamine (A)
- Nurga ja sügavuse kohandamine (B)
- Rotatsiooni reguleerimine (C)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiate tööriistakotist.

! Olge tähelepanelik – raamile on trükitud maksimaalse kõrguse näitaja!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

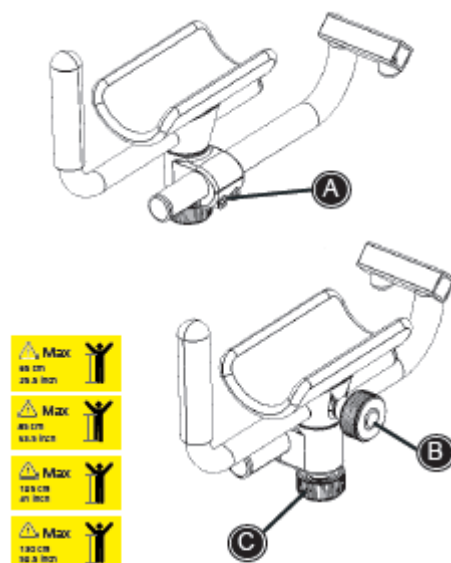


## **Eesmised käetoed (abiseade)**

- Nurga ja sügavuse kohandamine (A)
- Nurga kohandamine (B)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiate tööriistakotist.

! Olge tähelepanelik – raamile on trükitud maksimaalse kõrguse näitaja!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

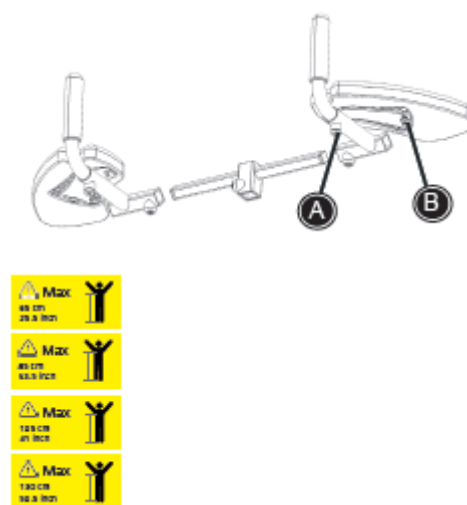


### ***Istme kohandamine (abiseade)***

- Kõrguse kohandamine (A)

! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiata tööriistakotist.

! Enne kinnitamist veenduge, et istme nurgatugi oleks paigaldatud piisavalt kõrgele rinnatoe pidemele.

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

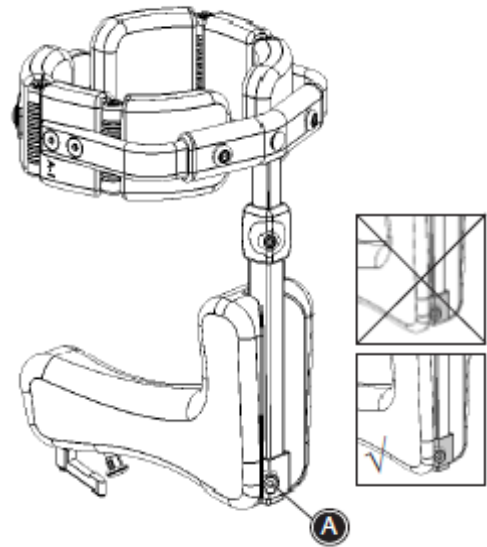


### ***Nimmetoe kohandamine (abiseade)***


- Kõrguse kohandamine (A)
- Sügavuse kohandamine. Keera pidet (B) selle lõdvendamiseks ning tõmba välja turvalukk (C), et tugi eemaldada.

! Ärge paigaldage nimmetuge kaugemale maksimaalsest paigaldusmärgist!

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

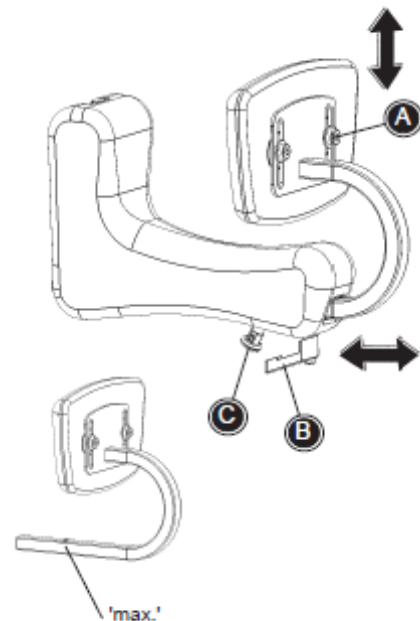



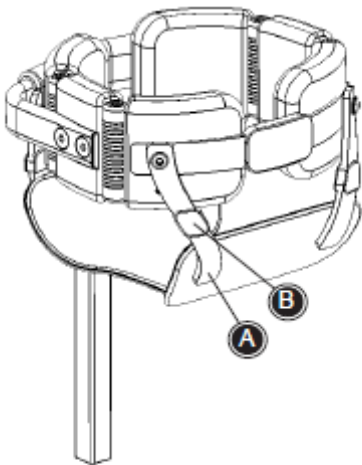


### **Ripptooli kohandamine (abiseade)**

- Tõmba rihmadest kõrguse reguleerimiseks (A)
- Ava pandlad ripptooli eemaldamiseks (B)

! Kontrollige kõiki rihmasid ja pandlaid enne iga kasutuskorda ning asendage kulunud osad enne toote kasutamist!

### **Hoiutasku (abiseade)**

Hoiutasku võite takjaskinnituse (A) abil paigaldada soovipärasesse kohta raamil.

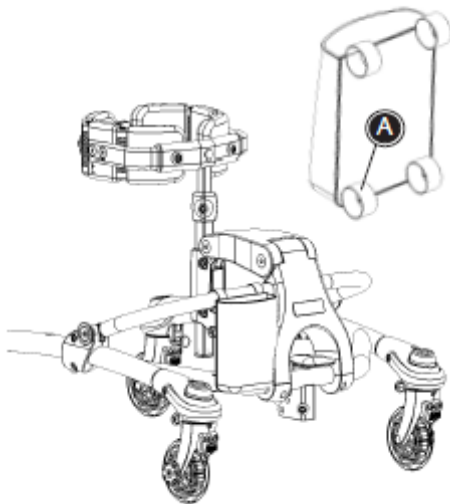

Hoiutasku eemaldamiseks avage takjaskinnitused, näiteks pesemise tarvis (40°C).

! Kontrollige kõiki rihmasid ja pandlaid enne iga kasutuskorda ning asendage kulunud osad enne toote kasutamist!

## **Juhtimiskangi kohandamine (abiseade)**

Nurga kohandamine (A)

Laske kruvi (B) lõdvemaks ning lükake sisse turvanupp (C) juhtkangi eemaldamiseks.


! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiata tööriistakotist.

! Ärge kasutage juhtimiskangi kõndimisraami tõstmisel. Kõndimisraami valekasutus võib kasutajale tõsiseid vigastusi tekitada.

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist.

Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks kõndimisraami kokkupanekul ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse!

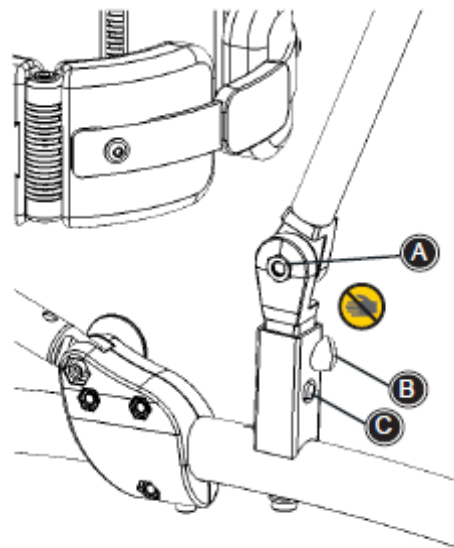

## **Jalgade eraldaja kohandamine (abiseade)**

Kõrguse kohandamine (A)


! Paigaldamisel kasutage 5 mm kuuskant võtit, mille leiata tööriistakotist.

! Veenduge, et jalgade eraldaja pide on korralikult oma pesas enne selle kinnitamist!

! Ettevaatust! Veenduge, et teie sõrmed ei jääks paigaldamisel jalgade eraldaja ning põrandavahele ega jalgade eraldaja ning istme vahele. Samuti veenduge, et kõndimisraami kasutaja varbad ei jääks jalgade eraldaja ning

põrandavahele.

! Veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

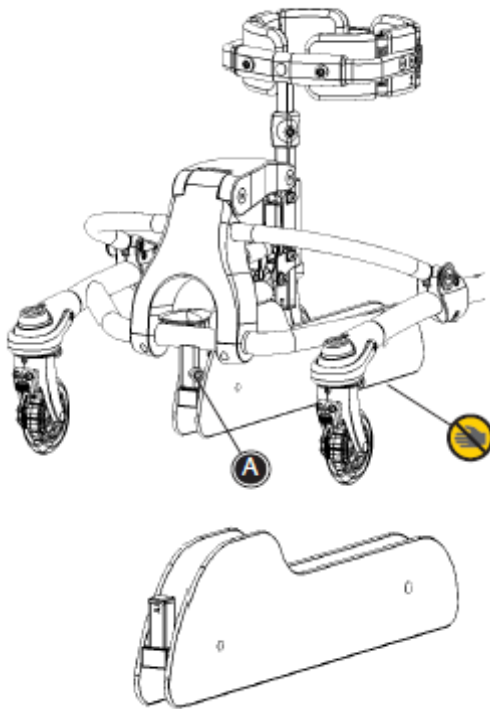


## Kõrguse kohandamine


Standartselt on Mustangi kõrgus sätitud auku nr.2, kuid vajaduse korral on võimalik Mustangi kõrgust mitmel moel reguleerida.

- 1) Eemaldage kiirkinnitus (A)
- 2) Keerake kruvid (B) lõdvemaks
- 3) Eemaldage kruvi (C)
- 4) Kohandage raami kõrgus ning taastage kruvi (C) ühte raamis olevatest aukudest. Keerake kinni kruvid (B) ning taaskinnitage kiirkinnitus (A).

! Veenduge, et kõik kruvid ja pidemed oleksid korralikult kinnitatud enne Mustangi kasutamist. Kruvide kinnitusi ning teisi kõndimisraami seadistusi tuleb regulaarselt kontrollida.

! Ettevaatust! Vigastuste vältimiseks kõndimisraami kokupanekul ärge jätke sõrmi raamil olevatesse aukudesse!

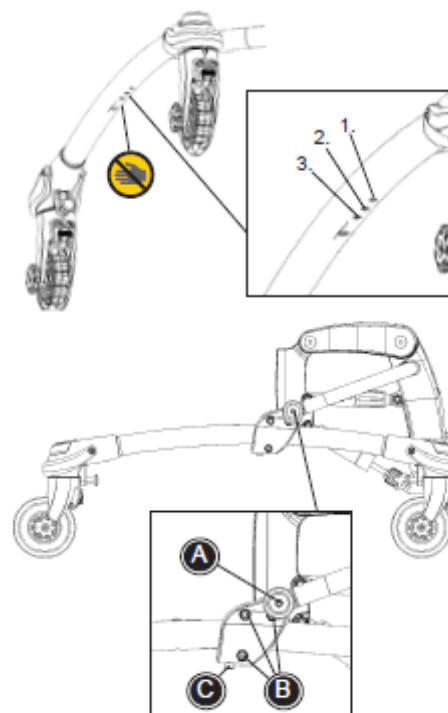

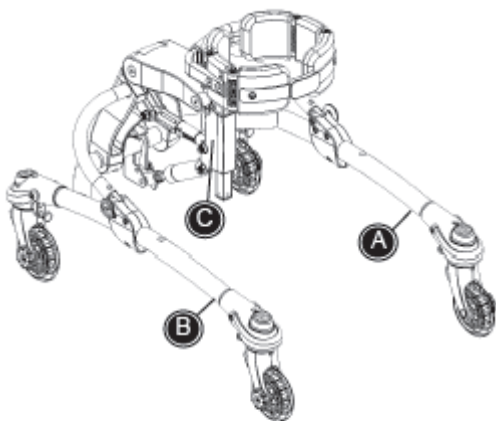

### Toote originaalsuse indikaatorid

- a) Seerianumber  
Sildi võib leida raami alumiselt küljelt, parema tagaratta ülevalt.
- b) Tootja  
Sildi võib leida raami alumiselt küljelt, vasaku tagaratta ülevalt.
- c) Kõndimisraami kasutaja  
soovitav maksimaalne pikkus  
Sildi võib leida raami keskse telje vasakult küljelt.



size 1



size 2



size 3



size 4

## Toote hooldamine

### RAAM

Kontrollige regulaarselt kõikide kruvide olemasolu ning veenduge, et kruvid on tugevasti kinnitatud. On oluline, et hoiaksite toote puhta – nii sanitaarsetel eesmärkidel, kui ka toote eluea huvides. Suuna stabilisaatorite auke tuleb regulaarselt puhastada. Raami pesemiseks sobivad mõlemad, auto-šampoon või nõudepesuvahend. Juhul, kui Mustang on õline või muul moel liialt määrduanud, et seda eelmainitud puhastusvahenditega pesta, võib kasutada ka alternatiivseid rasvaärastus seadmeid.

### KONTROLL

Seisva raami kruvide regulaarne kontroll on elementaarne kasutaja ohutuse tagamisel. Kõiki kruvisi, mis ühendavad raami eri telgesid tuleks pinguldada vähemalt korra kuus. Samuti on oluline kontrollida raami mõranemise või muude vigade ilmnemise osas.

### PARANDUS

Probleemide ilmnemisel soovitame koheselt kontakteeruda maaletoojaga. Defektiga toode on potentsiaalseks ohuallikaks kõndimisraami kasutajale. Toote korrastustööde või paranduse käigus tuleb kasutada originaalseid R82 varuosi. Purunenud lisaseadmed või olemasolevad varuosad on võimalik saata R82 parandusse. Defektide ilmnemisel Mustangi raamil, tuleb kogu toode R82 parandusse saata. R82 ei vastuta kahju või põhjustatud vigastuste eest, kui kasutusel oleva Mustangi juures on kasutatud mitte originaal varuosi või kui parandustööd on sooritatud kellegi muu, kui autoriseeritud R82 töötaja poolt.

## Sagedasti esinevad probleemid & nende lahendused

### Probleem – Lahendus

1. Kõndimisraami kinnitused tunduvad lõdvad. – Pinguta kõik raamil olevad kruvid.
2. Mustang on liiga jäik/lõtv liikuma pannes. – Veendu, et kõik seisupidurid ning ratta stopperid oleksid deaktiveeritud. Lõdvenda/pinguta **DRAG BREAK** pidet reguleerimaks vajalikku jõudu Mustangi liikuma panemisel.
3. Ratta stopperid ei tööta. – Eemalda piirkonnast pori ja mustus ning puhasta rattad.
4. Kõrguse reguleerimise pide ei tööta. – Puhasta piirkond mustusest ja porist.
5. Kõrguse reguleerimine ei toimi. – Kontakteeru oma piirkonna maaletooja või edasimüüjaga liugklotsi asendamiseks.