

R82<sup>®</sup> 


panda futura<sup>™</sup>

**Eestikeelne kasutusjuhend**

E  
T

## **ET** SISUKORD

OHUTUS .....	4
GARANTII.....	4
ISTMED .....	5
ISTME PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE .....	5
SELJATOE TAHAPOOLE KALLUTAMINE .....	6
SELJATOE PIKENDUS.....	6
PEATUGI.....	7
LÜKKESANG/LÜKKAMISKÄEPIDEMED .....	8
EEMALEPÖÖRATAVAD ÕLATOED.....	9
KÜLGTOED.....	10
EEMALEPÖÖRATAVAD KÜLGTOED .....	10
EEMALEPÖÖRATAVAD PÕLVETOED .....	11
ISTME PIKENDUS .....	11
JALATUGI/JALAPLAAT .....	12
TÕKISPADI .....	12
KINNITUSLUKKUDE PAIGALDAMINE.....	13
KÄETOED JA LAUD .....	14
VEST JA RISTVEST .....	16
RINNAKURIHM .....	16
5-PUNKTILINE RIHM.....	17
RINNARIHM .....	17
PUUSARIHM .....	18
Y-PUUSARIHM .....	18
VAAGNARIHM .....	19
PAHKLUURIHMAD .....	19
JALARIHMAD.....	20
KÄEMANSETT .....	20
H-RIHM.....	21
TERMOKOTT .....	21
KAPUUTSIGA VIHMAKEEP .....	22
TRANSPORTIMINE MOOTORSÕIDUKITES .....	23
TOOTE KINNITAMINE SÕIDUKISSE.....	24
TOOTE ANDMED.....	25
MÕÕTMED.....	26
TOOTJA .....	26
TEHNILISED ANDMED.....	26
HOOLDAMINE .....	26
EDASIMÜÜJA .....	26

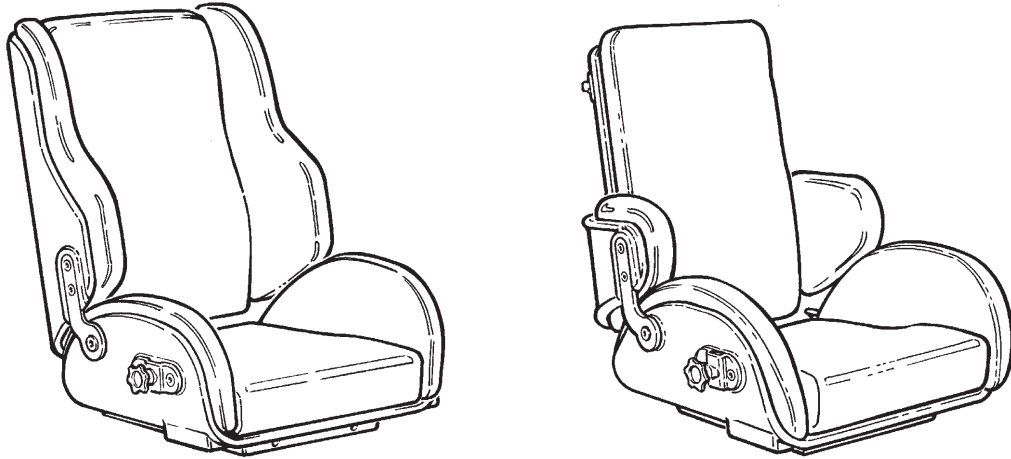

## **ET** PANDA FUTURA

Õnnitleme teid R82 Panda Futura ostmise puhul. Oleme veendunud, et see vastab täielikult teie ootustele.

Panda istet on kahe eri versioonina: Panda Standard ja Panda Active. Standardi iste on ette nähtud peamiselt lastele, kes vajavad tuge kätele ja õlgadele. Active'i iste on ette nähtud aktiivsetele lastele, kes vajavad rohkem liikumisvabadust.






Mõlema versiooni puhul saab seljatuge kallutada istmealusest sõltumata. Paljud reguleerimisvõimalused ja tarvikute suur valik võimaldavad kohandada istet individuaalse lapse mugavuse ning toe vajaduse järgi. Pandat saab kasutada nii siseruumides kui ka väljas, olenevalt kasutatavast raamist.

Käesolev kasutusjuhend aitab teil Panda Futura paljusid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.



## **ET** OHUTUS

Panda Futural on CE-märgis, mis näitab, et see vastab kõigile asjakohastele Euroopa ohutusnõuetele.

-  Toote ümberehitamisel või muude varuosade ja tarvikute kasutamisel R82 originaalosaade asemel eemaldage CE-märgis.
-  Tool on heaks kiidetud standardite ISO 7176/19-2001 ja 16840-4:2009 järgi.
-  Panda Futura on mõeldud vaid ühele kasutajale. Ärge pange Panda Futurale üle ühe kasutaja.
-  Ärge kunagi jätke last sellesse tooli järelevalveta. Tagage pidev täiskasvanu poolne järelevalve. Panda Futura valesti kasutamine võib viia kasutaja tõsiste vigastusteni. Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.
-  Kasutusjuhendi viimane versioon on alati võrgus olemas: [www.r82.com](http://www.r82.com)

## **ET** GARANTII


Panda Futural on 12-kuuline garantii. Garantii kehtib vaid R82 originaalvaruosade ja -tarvikute kasutamise korral. Kõiki spetsiaalseid reguleerimisi peab tegema R82.

## ET ISTMED

Panda Futura istet on kahe versioonina: (A) STANDARD (5 suuruses) ja (B) ACTIVE (4 suuruses).

ACTIVE'i istme kuju võimaldab ülajäsemete suuremat liikumisvabadust ja see sobib suurepäraselt aktiivsematele lastele.

STANDARDi iste on varustatud külgedega, mis pakuvad lapsele rohkem tuge ja vähendavad liikumisvabadust. Lapse jaoks sobivaima mudeli määrab tema vajatav tugi. Mõlema mudeli puhul saab kasutada suurt hulka erinevaid tarvikuid.

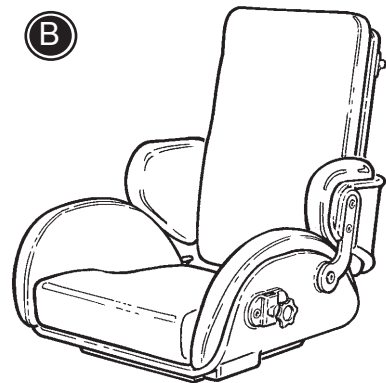


## ET ISTME PAIGALDAMINE/ EEMALDAMINE


Istme paigaldamiseks toimige järgmiselt. Asetage iste adapterile ja lükake täies ulatuses taha, kuni see oma kohale klõpsatab.



Ärge kasutage esimest auku, millesse see klõpsatab. See on vaid „turvaauk”, mis püüab istme kinni, kui nupp peaks õigest august välja tulema.


Istme eemaldamiseks toimige järgmiselt. Lukustage lahti punane käepide (B). Tõmmake nupp (A) välja, tõmmake istet ettepoole ja samal ajal tõstke seda.

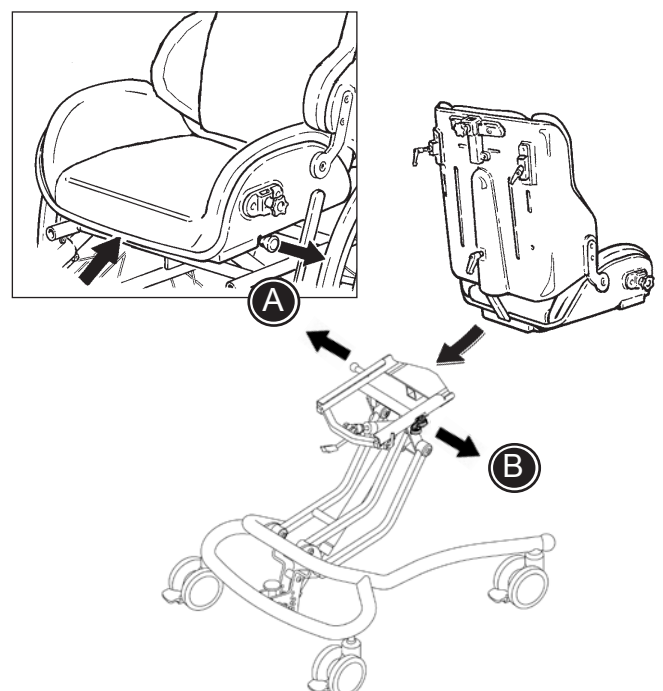


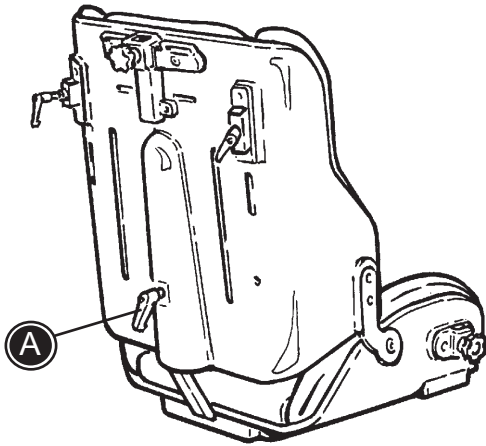

## ET SELJATOE TAHAPOOLE KALLUTAMINE

Seljatoe tahapoole kallutamiseks lõdvendage käepidet (A).

 Enne käepideme lõdvendamist võtke tooli seljatoest kindlalt kinni, et vältida äkilist tahapoole kaldumist.

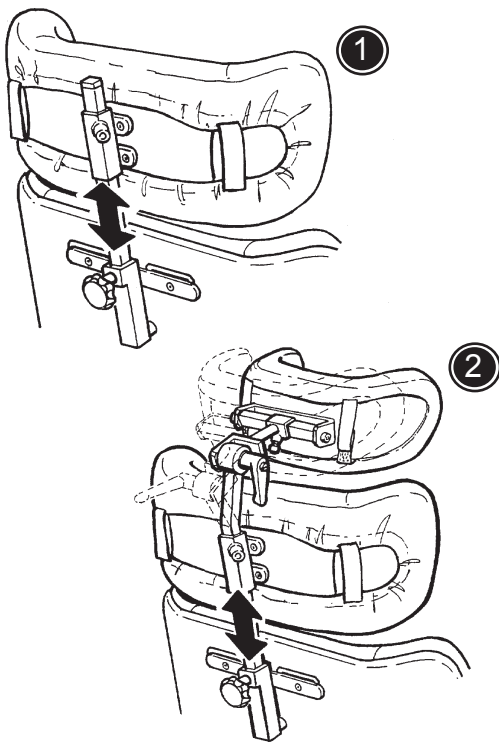

## ET SELJATOE PIKENDUS

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




- 1) Seljatoe pikenduse kõrguse reguleerimine.
- 2) Peatoe ja seljatoe pikenduse kokkuühendamine. Läbiva latina kasutatakse peatoe latti.




## ET PEATUGI

- A) Peatoe külje suunas reguleerimine.
- B) Peatoe nurga seadistamine.
- C) Peatoe varre nurga seadistamine.
- D) Kõrguse reguleerimine.

**!** Peatoe õigesti reguleerimiseks peavad A, B, C ja D olema lõdvendatud. Õige asendi seadistamise järel pingutage A, B, C ja D.

- E) Peatoe latti saab täiendava eesmise toe saamiseks pöörata 180°.
- F) Kui standardne latt ei taga piisavat eesmist tuge, võite kasutada „luigekaela” latiga peatuge.
- G) Paigaldage kate peatoele.

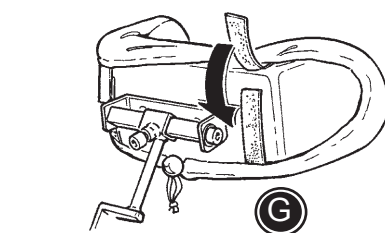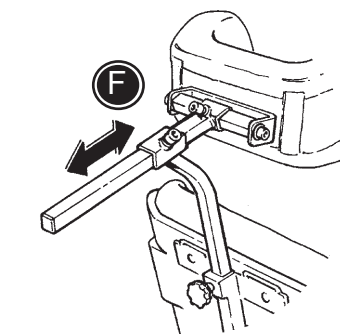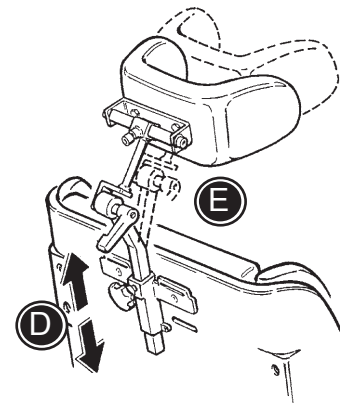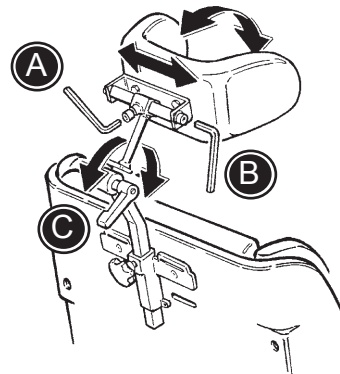

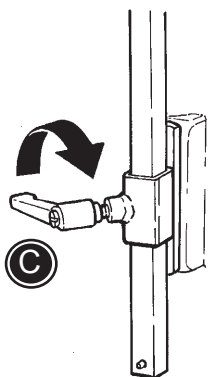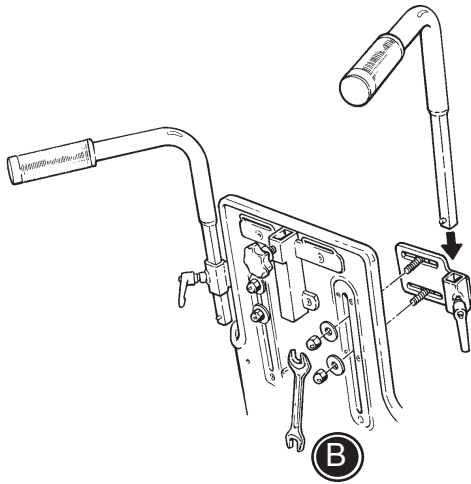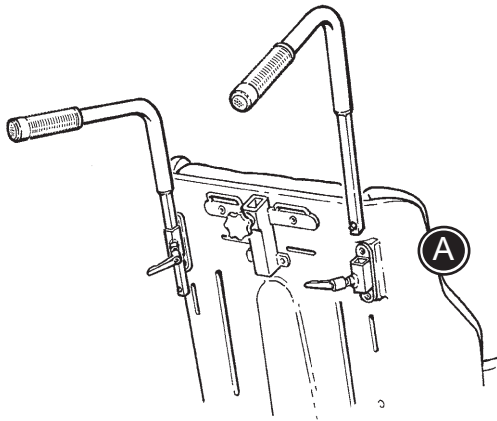

## **ET** LÜKKESANG/LÜKKAMISKÄEPIDEMED

### Panda Standard

Ühendusdetailid paigaldatakse seljatoe külge kuuskantvõtme (A) abil. Lükkesang/lükka-miskäepidemed paigaldatakse istme seljatoel olevatesse ühendusdetailidesse. Kinnitage käepidemega (C).


### Panda Active





Kõigepealt paigaldage seljatoele näidatud viisil ühendusdetailid (B). Asetage käepidemed ühendusdetailidesse ja pingutage hoolikalt (C).




## ET EEMALEPÖÖRA- TAVAD ÕLATOED

- A) Õlatoed paigaldatakse peatoe latile. Paigaldage peatoe latt istme seljatoel olevasse ühendusdetaili.
- B) Tõmmake vabastusnupp välja, et pöörata õlatoed üles ja eemale.
- C) Reguleerige kuuskantvõtmega õlatugede kõrgust.
- D) Reguleerige kuuskantvõtmega õlatugede sügavust.


 Hooldaja peab eemalepööratavaid osi aeg-ajalt (vähemalt iga 3 kuu tagant) kontrollima ja õlitama.

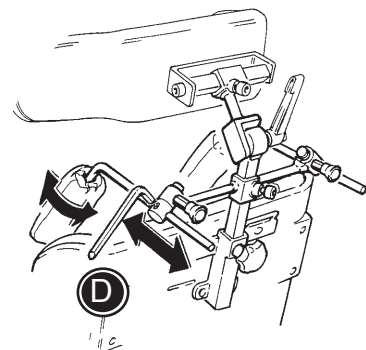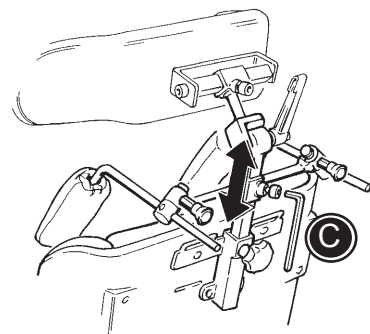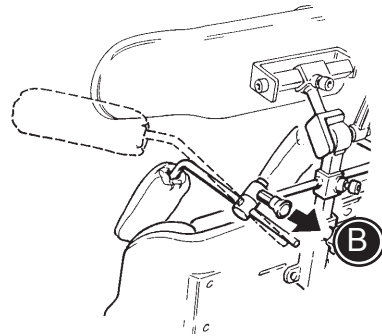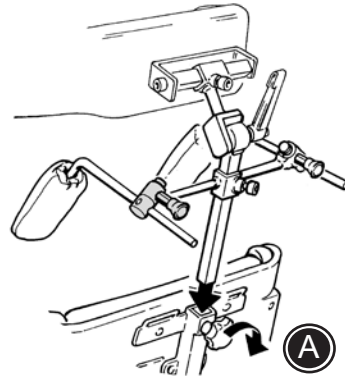

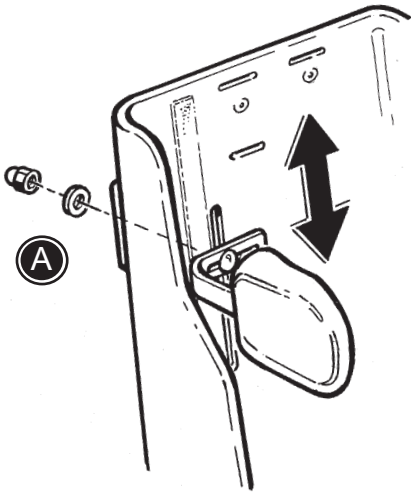

## ET KÜLGTOED


Eemaldage seljatoepadi ja paigaldage külgtoed istme seljatoes olevatesse pesadesse (A).

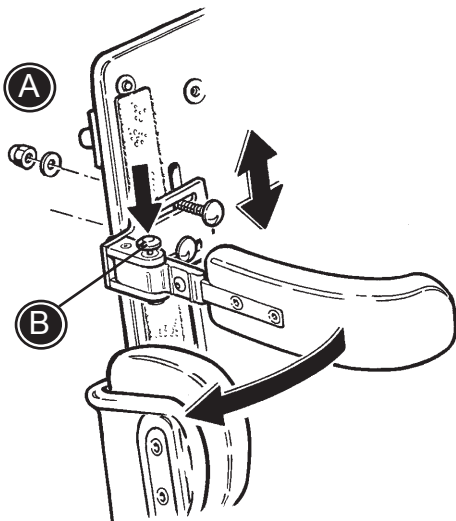

## ET EEMALEPÖÖRA- TAVAD KÜLGTOED

Eemaldage seljatoepadi ja paigaldage eemalepööratavad külgtoed istme seljatoes olevatesse pesadesse (A).

Eemalepööratavate külg tugede vabastamiseks vajutage punast nuppu (B) ja seejärel pöörake need eemale.

 Hooldaja peab eemalepööratavaid osi aeg-ajalt (vähemalt iga 3 kuu tagant) kontrollima ja õlitama.


## ET EEMALEPÖÖRA- TAVAD PÕLVETOED

Kinnitage ühendusdetail (A) 4 mm kuuskantvõtme abil istme alla. Sisestage põlvetoed ühendusdetaili ja kinnitage 6 mm kuuskantvõtme abil (B).

- \* Põlvetoed lattide nurga reguleerimiseks lõdvendage kruvisid (C) 6 mm kuuskantvõtmega.
- \* Sügavuse reguleerimiseks lõdvendage kruvisid (B) või (D) 4 ja 6 mm kuuskantvõtmega.
- \* Põlvetoed ise on 4 mm kuuskantvõtme abil nurga all ja külgsuunas reguleeritavad (E).
- \* Põlvetugede eemalepööramiseks lükake alla ühendusdetailil olev punane nupp (F).




Hooldaja peab eemalepööratavaid osi aeg-ajalt (vähemalt iga 3 kuu tagant) kontrollima ja õlitama.

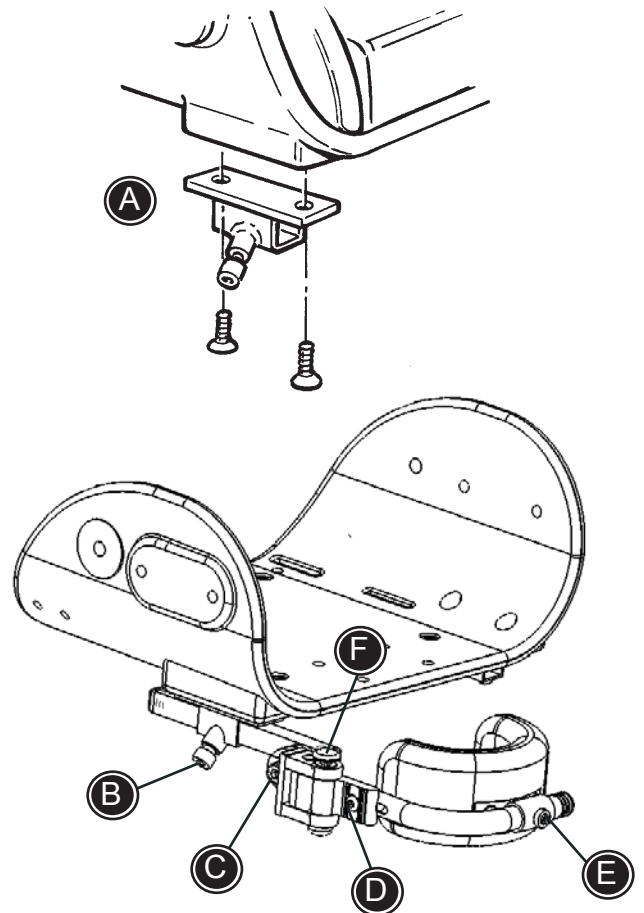


## ET ISTME PIKENDUS


Istme pikendus sisestatakse istme all olevasse adapterisse ja seatakse soovitud asendisse. Kinnitage käepidemega (A).

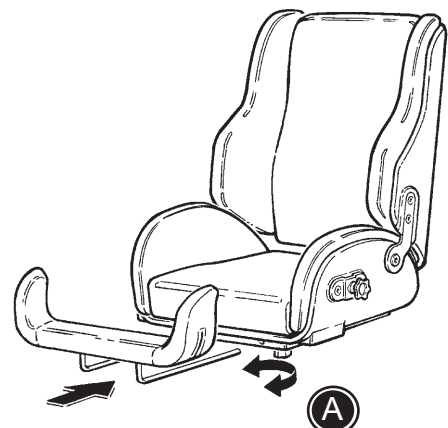


## ET JALATUGI/ JALAPLAAT

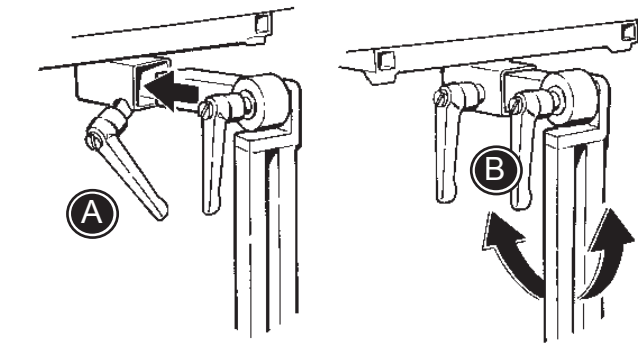


A) Jalatoe lati paigaldamiseks ja sügavuse reguleerimiseks kasutage kinnituskäepidet.

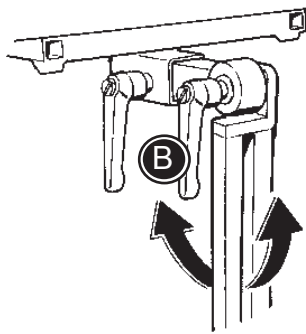

B) Reguleerige käepideme abil jalatoe lati nurka.

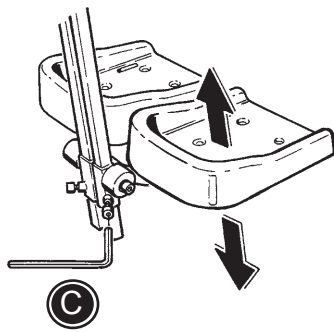


C) Reguleerige 6 mm kuuskantvõtmega jalatoe kõrgust.

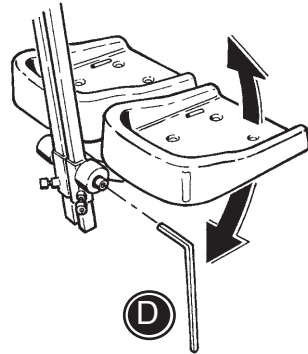


D) Reguleerige 6 mm kuuskantvõtmega jalatoe nurka.

E) Reguleerige 6 mm kuuskantvõtmega jalaplaadi kõrgust.

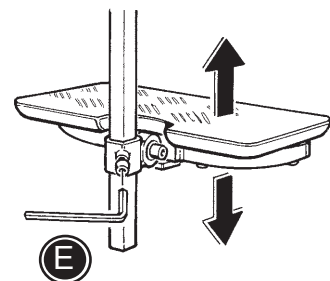



F) Reguleerige 6 mm kuuskantvõtmega jalaplaadi nurka.

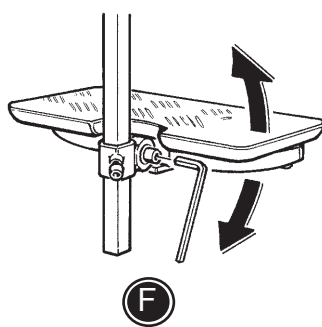

E

F

## ET TÕKISPADI

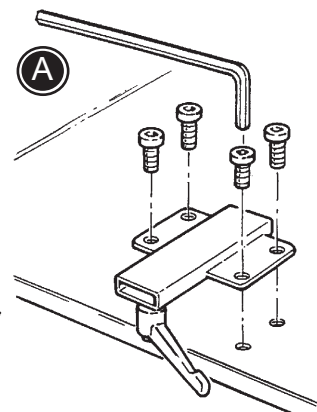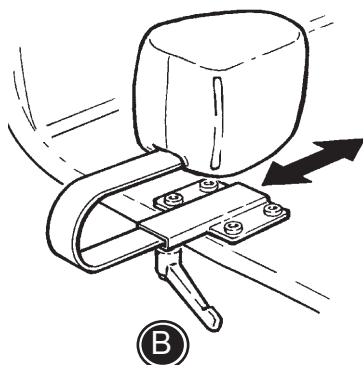

A) Kinnitusvahendid kinnitatakse 6 mm kuuskantvõtmega.

B) Tõkispadi paigaldatakse kinnitusvahenditele ja selle sügavust saab reguleerida käepidemega.

B

## ET KINNITUSLUKKUDE PAIGALDAMINE

Panda istmele saab paigaldada kinnituslukke kinnitusrihmade kiireks ja hõlpsaks kinnitamiseks ning reguleerimiseks. Seejärel saab kiiresti õigesse asendisse kinnitada puusarihm (85427-x), abduktsioonirihmu (89112-x ja 89108-x), 5-punktilisi rihmu (89665-x), rinnarihm (85428-x) ja rihm-/ristveste (89625-x). Nende paigaldamiseks on vaja kuuskantvõtit.

### Seljatoele paigaldamine


- \* Kuus kinnituslukku (D) paigaldatakse seljatoele kuuskantkruvide abil. Ülemised kaks kinnituslukku saab seada ka alumisse asendisse, nii et kinnitusrihm saab juhtida läbi patjade (pärast nende lõikamist).
- \* Rihm-/ristvesti kinnitusrihmad ja 5-punktilise rihma saab seejärel juhtida läbi pilude ning kinnitada kinnituslukkude abil.

### Märkus.


Kinnitusrihm võib paigaldamise järel nende pikkuse korrigeerimiseks lühendada (veenduge, et otsad on sulatatud).

### Istmele paigaldamine


- \* Istme kummalegi küljele paigaldatakse kahe kuuskantkruvi abil üks sünteetiline adapterplokk (A).
- \* Istme kummalegi küljele paigaldatakse kuuskantkruvi abil üks kinnituslukk (B) puusarihmadele ja abduktsioonirihmale (abduktsioonirihma mudel 89108).
- \* Abduktsioonirihma T-mudeli (89112) paigaldamise korral lisatakse mõlemale küljele allapoole täiendav kinnituslukk (C). Need paigaldatakse kuuskantkruvi abil (B komplekt).
- \* 5-punktilise rihma kasutamise korral paigaldatakse seljatoe ülaküljele kaks lisakinnituslukku (C).

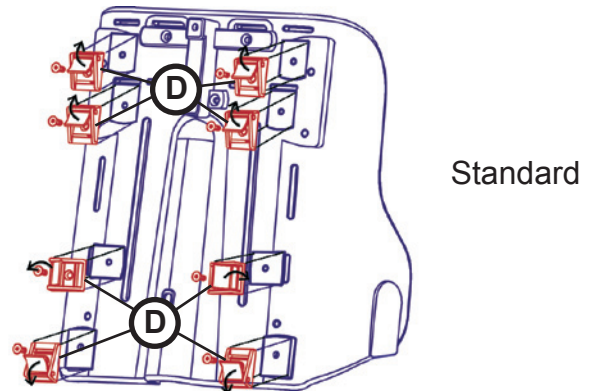


Standard

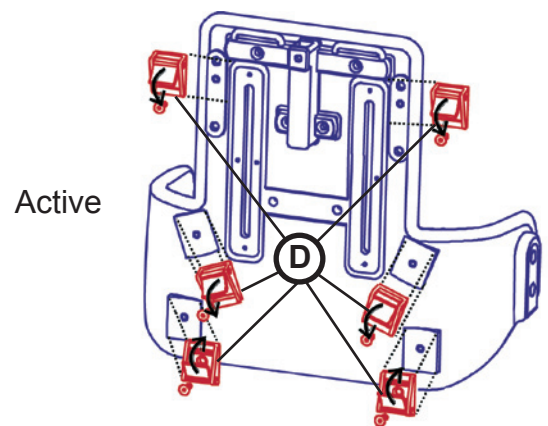

Active

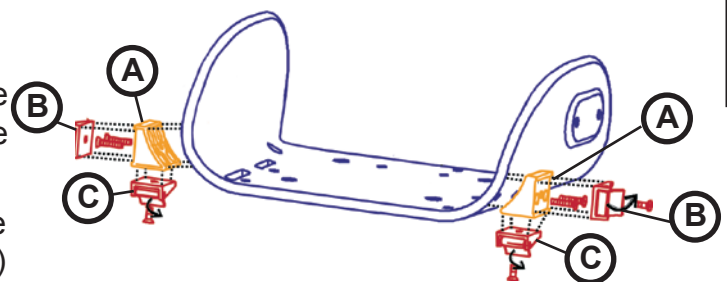

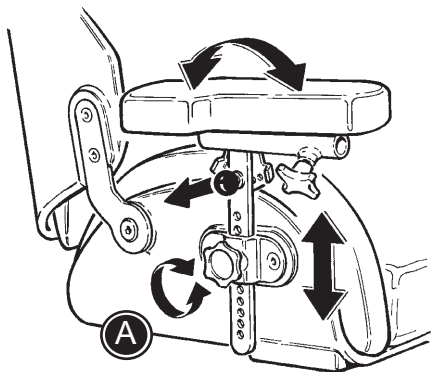


## **ET** KÄETOED JA LAUD


A) Käetugede kõrguse reguleerimine.


B) Laua reguleerimine külgsuunas.

C) Laua sügavuse reguleerimine.


D) Laua nurga reguleerimine käetugede nurga reguleerimise kaudu.

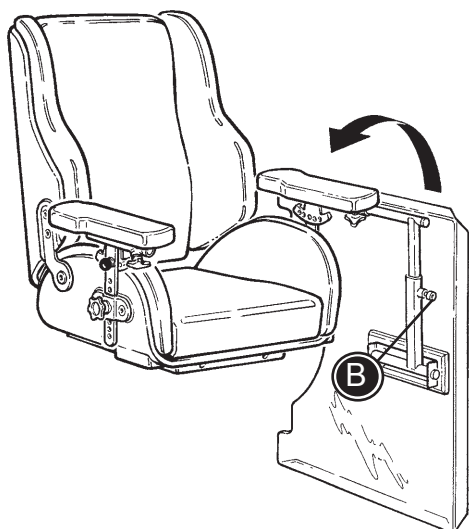

 Lauda saab paigaldada vaid käetugedega varustatud Panda Futurale.

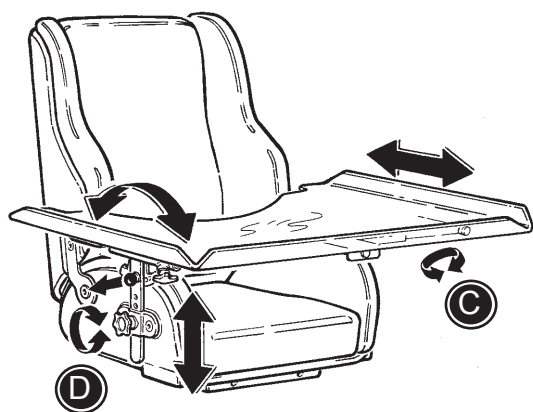


E  
T

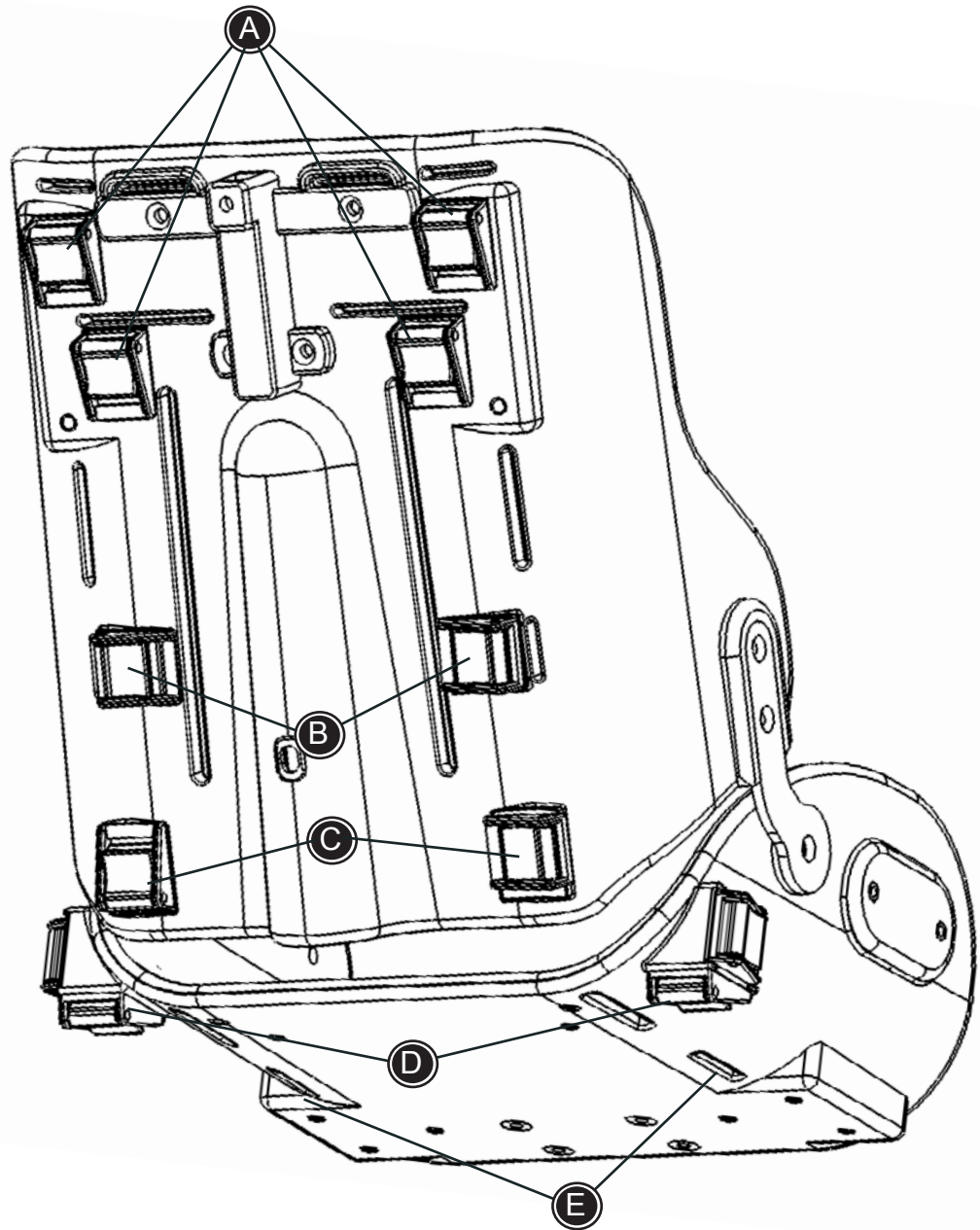

See joonis kuulub järgnevatel lehekülgedel toodud kirjelduste juurde.



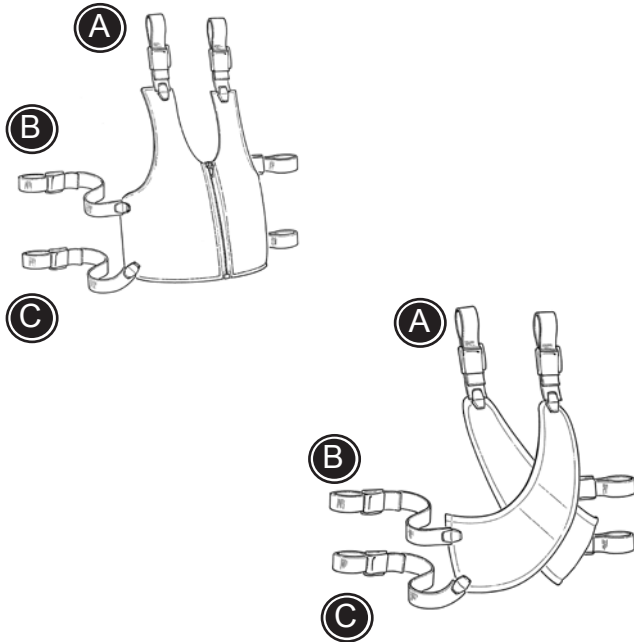

## ET VEST JA RISTVEST

Paigaldage kinnituslukud seljatoele. Vt lk 15.


Vesti ja ristvesti saab avada ning sulgeda pannalde ja tõmblukuga.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (A).
- \* Paigaldage külgedel olevad ülemised rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendusdetailidesse (B).
- \* Paigaldage külgedel olevad alumised rihmad seljatoe alaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (C).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

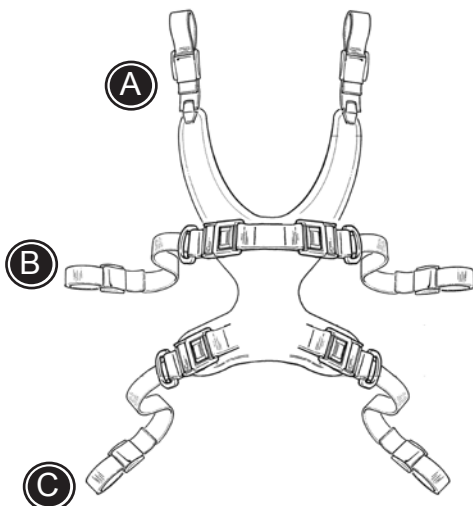

## ET RINNAKURIHM

Paigaldage kinnituslukud seljatoele. Vt lk 15.

Rinnakurihma saab avada ja sulgeda pannaldega.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (A).
- \* Paigaldage külgedel olevad ülemised rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendusdetailidesse (B).
- \* Paigaldage külgedel olevad alumised rihmad seljatoe alaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (C).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.




## ET 5-PUNKTILINE RIHM

Paigaldage kinnituslukud seljatoele. Vt lk 15.

5-punktilist rihma saab avada ja sulgeda pannaltega.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Paigaldage rihmad (E) istmel olevatesse rihma ühendusdetailidesse või rihma ühendusdetailidesse (D).
- \* Pange kasutaja tooli „kolmnurgale” (F) istuma.
- \* Külgedel olevad rihmad (D) juhitakse läbi istmes olevate pilude ja paigaldatakse istmel olevatesse rihma ühendusdetailidesse.
- \* Õlarihmad paigaldatakse seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (A).

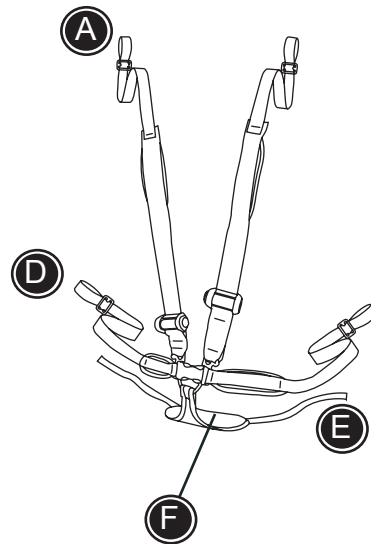

**!** Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.


## ET RINNARIHM

Paigaldage kinnituslukud seljatoele. Vt lk 15.

Rinnarihma saab avada ja sulgeda pannaltega.


Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (A).
- \* Paigaldage külgedel olevad rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendus-detailidesse (B).

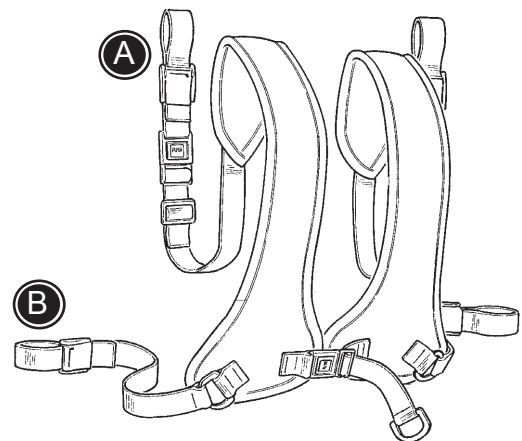

**!** Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

ET

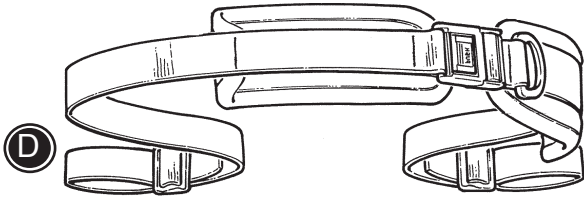

## ET PUUSARIHM

Paigaldage kinnituslukud istmele. Vt lk 15.

Puusarihma saab avada ja sulgeda pannaaltega.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

\* Paigaldage rihmad istme all olevatesse rihma ühendusdetailidesse (D).

 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

## ET Y-PUUSARIHM

Paigaldage kinnituslukud istmele. Vt lk 15.

Y-puusarihma saab avada ja sulgeda pannaaltega.


Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

\* Paigaldage rihmad istme all olevatesse rihma ühendusdetailidesse (D).

\* Paigaldage rihmad (E) istmes olevatesse eesmistesse piludesse.

E ja D on samaväärsed.

 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

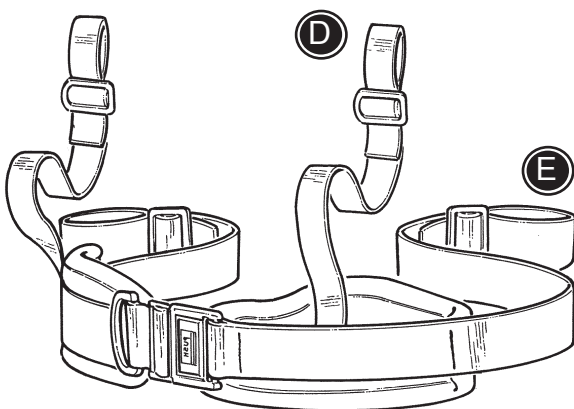



## ET VAAGNARIHM

Paigaldage kinnituslukud istmele. Vt lk 15.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Avage pandlad (G).
- \* Paigaldage rihmad (D) istme all olevatesse rihma ühendusdetailidesse (D).
- \* Pange kasutaja rihmadesse ja sulgege pandlad (G) üle reite.

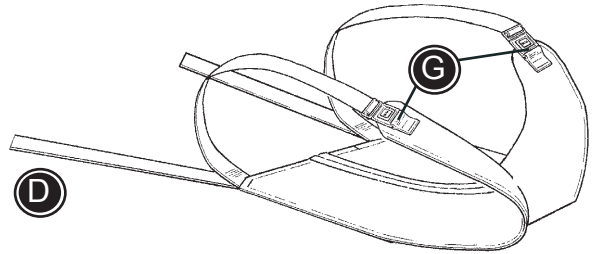


 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.


## ET PAHKLUURIHMAD


Pahkluurihmu saab avada ja sulgeda takjariba või pandlaga (A).

Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- \* Eemaldage pandlad (C).
- \* Tõmmake rihmad (B) läbi jalaplaatides olevate pilude.
- \* Paigaldage pandlad (C) uuesti ja veenduge, et rihmad ei libise ära.

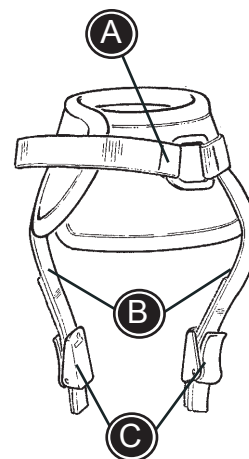

 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

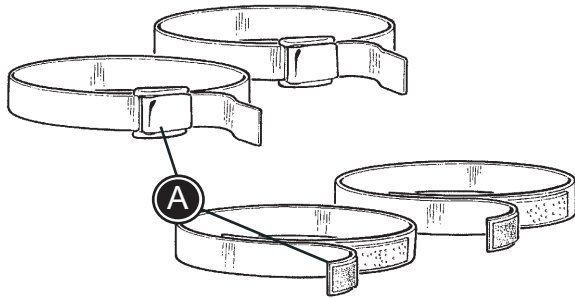


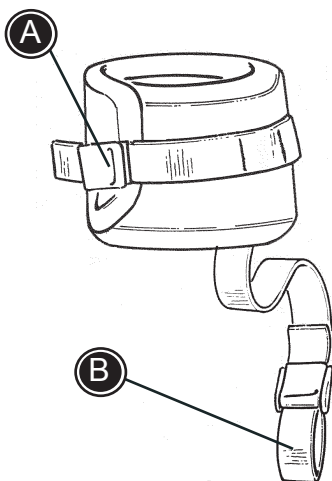
## **ET** JALARIHMAD

Jalarihmu saab avada ja sulgeda takjariba või pandlaga (A).

Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- \* Avage rihmad ja tõmmake need (A) läbi jalaplaatides olevate pilude.
- \* Sulgege rihmad kasutaja jala ümber.

 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.




## **ET** KÄEMANSETT

Käemansetti saab avada ja sulgeda pandlaga (A).

Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- \* Paigaldage käemansett kasutaja randme ümber.
- \* Paigaldage rihm (B) käetoela ümber.

 Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

## ET H-RIHM

Paigaldage kinnituslukud seljatoele. Vt lk 15.


H-rihma saab avada ja sulgeda pandlaga.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 15.

- \* Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (A).
- \* Paigaldage külgedel olevad rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendusdetailidesse (B).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

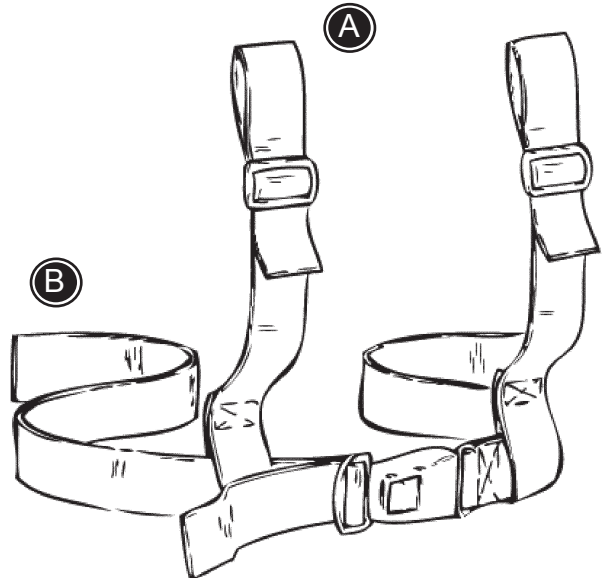


## ET TERMOKOTT

- \* Asetage termokott tooli.
- \* Avage koti külgmised tõmblukud ja pange kasutaja selle sisse.
- \* Sulgege tõmblukud uuesti.

Koti külgedel on takjaribad, mis võimaldavad kasutada ka puusarihma.



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

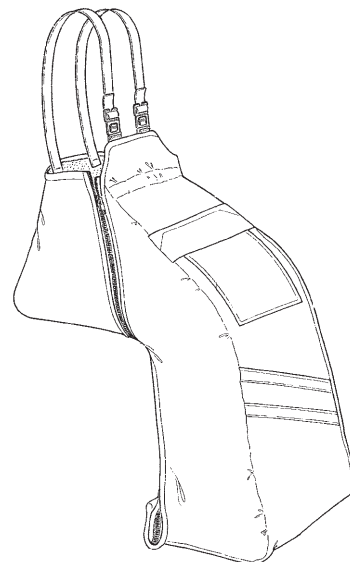



## **ET** KAPUUTSIGA VIHMAKEEP

Vihmakeep pannakse üle istme seljatoe, ümber kasutaja keha ja jalatoe alla. Nii katab see ka tooli.



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

**i** Tool on heaks kiidetud standardite ISO 7176/19-2001 ja 16840-4:2009 järgi.

**!** Panda Futura iste on heaks kiidetud ka-sutaja transportimiseks mootorsõiduki-tes. Maksimaalse koormuse kohta vaa-dake käesoleva kasutusjuhendi taga olevat MÕÕTMETE osa.

**!** See heakskiit ei kehti eritellimusel valmistatud toolidele ja raamidele.

**!** Võimaluse korral tuleb kasutaja teisaldada sõiduki istmele ja kasutada sõidukisse paigaldatud kinnitussüsteeme.

**!** Mootorsõidukis istmena kasutamise korral tuleb iste ja raam paigutada esiküljega ettepoole. Kasutage heakskiidetud 4-punktilist kinnitusrihmade süsteemi ISO 10542-2 järgi.

**!** Kasutage ratastoolis heakskiidetud 3-punktilist rihma ISO 10542-1 järgi. Ratastooli osad, nagu käetoed või rattad, et tohi hoida kinnitustahandeid kehast eemal. EI PIISA vaid puusarihma või vestide ja rihmade kasutamisest, mis ei ole ISO 10542 järgi heaks kiidetud.

**!** Esirattad tuleb pöörata raami alla, et need oleks enne kinnitamist raamiga ühetasaselt.

**!** Kõik tarvikud tuleb ratastoolilt eemaldada ja sõidukis eraldi kinnitada. Tarvikud, mida ei saa kasutajaga seotud kaalutlustel eemaldada, tuleb kinnitada ratastooli külge, kuid paigutada kasutajast eemale energiat summutava polstri abil, mis asetatakse tarvikute ja kasutaja vahele.


**!** Sõiduki mis tahes kokkupõrke järel peab edasimüüja toodet enne kasutamise jätkamist kontrollima.


**!** Enne transportimist tuleb järgida alltoodud juhiseid istme ja raami ettevalmistamiseks.

## **ET** TRANSPORTIMINE MOOTOR- SÕIDUKITES

Panda Futura iste Combi Frame'i, Multi Frame'i või Serval Frame'iga on heaks kiidetud mootorsõidukites transportimiseks, kui iste ja raam paigutatakse esiküljega ettepoole.


Ohutuse tagamiseks tuleb järgida kogu selles peatükis esitatud teavet.

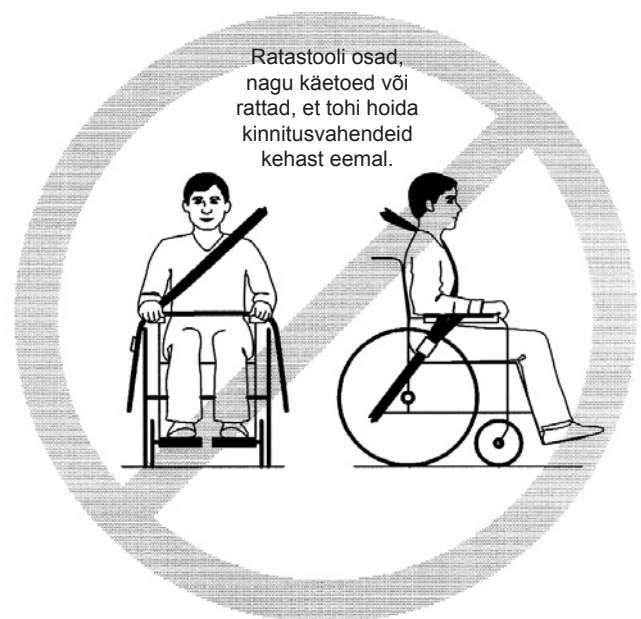


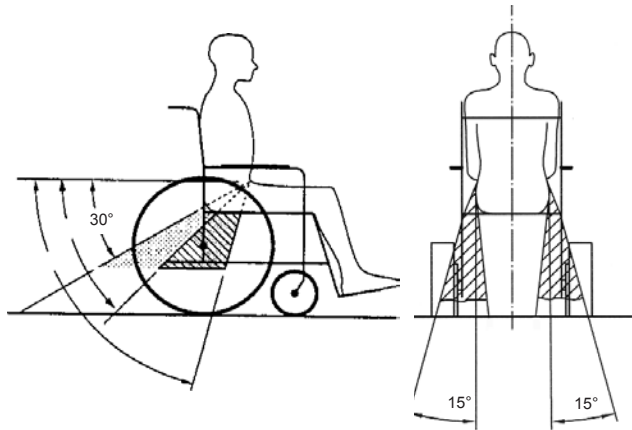

## ET TOOTE KINNITAMINE SÕIDUKISSE


- \* Paigaldage sõidukisse 4-punktiline kinnitusrihmade süsteem. (Järgige tootja juhiseid.)
- \* Kinnitage tool 4-punktilise kinnitusrihmade süsteemi abil sõidukisse. Kasutage kinnitamiseks konkse või rihmu.

 Kasutage 4-punktilist kinnitusrihmade süsteemi, mis on heaks kiidetud ISO 10542-2 ja SAE J2249 järgi.

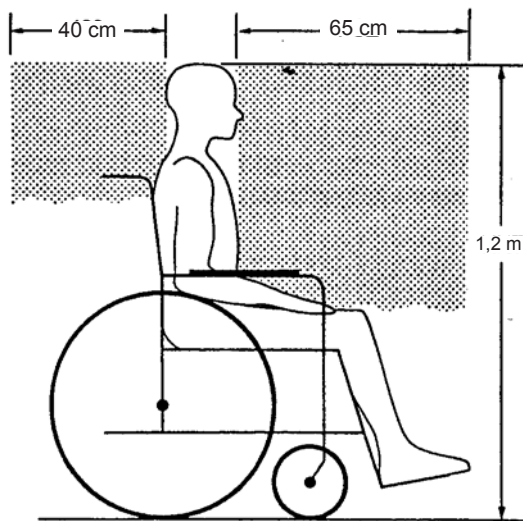

### Asend sõidukis

- \* Enne transportimist eemaldage toolilt kõik tarvikud.
- \* Paigutage laps näoga ettepoole.

 Laste sõidutamisel sõidukites järgige soovitatavat ohutuspiirkonda.





## ET TOOTE ANDMED

### Panda Futura iste Standard ja Active

A) Seerianumber  
Silt paikneb istmel padja all paremal.

B) Tootja  
Silt paikneb istmel padja all vasakul.

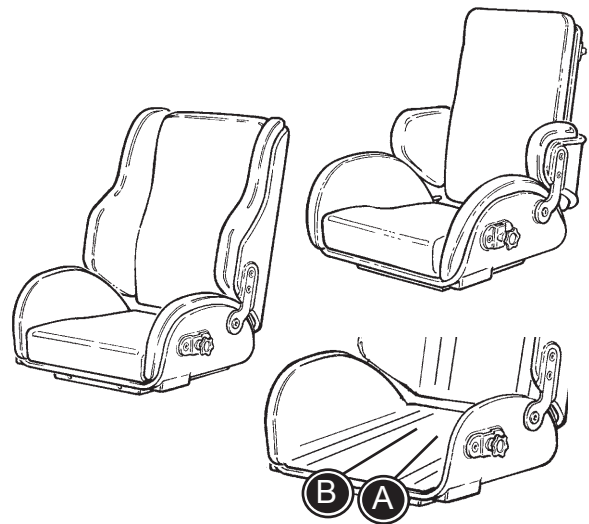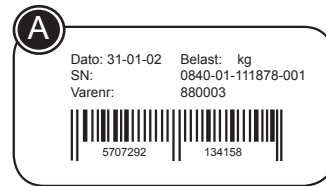

## ET MÕÕTMED

Iste	Istme sügavus (cm)	Istme laius (cm)	Seljatoe kõrgus (cm)	Käetoe kõrgus (cm)	Mass (kg)	Max kasutaja mass (kg)	Max kasutaja mass transportimisel	Seljatoe nurk
Panda Active, suurus 2	24	22	35	13...18	5,2	50	–	–4°...+27°
Panda Active, suurus 2½	28	25	38	13...18	5,6	50	–	–10°...+20°
Panda Active, suurus 3	31	29	40	13...27	6,2	50	–	–9°...+27°
Panda Active, suurus 4	36	32	45	17...30	7,5	60	–	–6°...+17°
Panda Standard, suurus 1	22	22	29	13...18	5,7	50	27	–3°...+28°
Panda Standard, suurus 2	24	22	39	13...18	5,7	50	27	–15°...+32°
Panda Standard, suurus 2½	28	25	41	13...28	6,2	50	43	–10°...+35°
Panda Standard, suurus 3	31	29	44	13...27	7,3	50	43	–5°...+36°
Panda Standard, suurus 4	36	32	52	18...27	8,7	60	43	–5°...+30°



Lisateavet max koormuse / kasutaja kehamassi ja transportimise kohta leiate aadressilt: [www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart\\_transport.pdf](http://www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart_transport.pdf)

## ET TEHNILISED ANDMED ET EDASIMÜÜJA

Iste ABS: akrülonitriilbutadieenstüreen, ringlussevõetav  
 Vahtplast Tulekindel  
 Kate Gemma



Leidke edasimüüja aadressil [www.r82.com](http://www.r82.com)

## ET TOOTJA

R82 A/S  
 Parallelvej 3  
 8751 Gedved

## ET HOOLDAMINE

Panda Futura kate on eemaldatav ja seda saab pesta temperatuuril max 40°. Garantii kehtivuse tagamiseks tuleb iste hoida puhtana.



Hooldaja peab eemalepööratavaid osi aeg-ajalt (vähemalt iga 6 kuu tagant) kontrollima ja õlitama.



Iga nädal pühkige kuiva lapiga maha mustus ja pori. Ärge kasutage kloori või metüülpiiritust sisaldavaid puhastusvahendeid.



Kvalifitseeritud tehnik peab Panda Futurat kontrollima ja pingutama vähemalt iga 6 kuu tagant, et vältida rikkeid.



Selles kasutusjuhendist mittekirjeldatud reguleerimisi tohivad teha vaid volitatud R82 töötajad.