


Tähelepanu!

Enne Stingray käru igakordset kasutuselevõtmist veenduge:

1. Et lahtised rihmad või polstri osad ei jääks istet paigaldades adapteri vahele!!
2. Istet adapterile kinnitades peavad luku vabastushoovad olema fikseerimata (punane fiksaatornupp peab olema ülemises asendis). Istme kinnitamisel ja eemaldamisel raamilt, ei tohi istmel istuda.
3. Veenduge, et kõik lukustuvad osad lukustuksid kuuldava klõpsatusega!!!
4. Iste on korrektselt kinnitunud, kui fiksaatornuppu saab luku vabastushoobade vahel vabalt üles-alla liigutada.
5. Peale istme kinnitumist, fikseerida luku vabastushoovad punase fiksaatornupuga (punane fiksaatornupp peab olema alumises asendis)!! Lisakontrolliks lükake istet vastupidises asendis, veendumaks, et iste on lukustunud

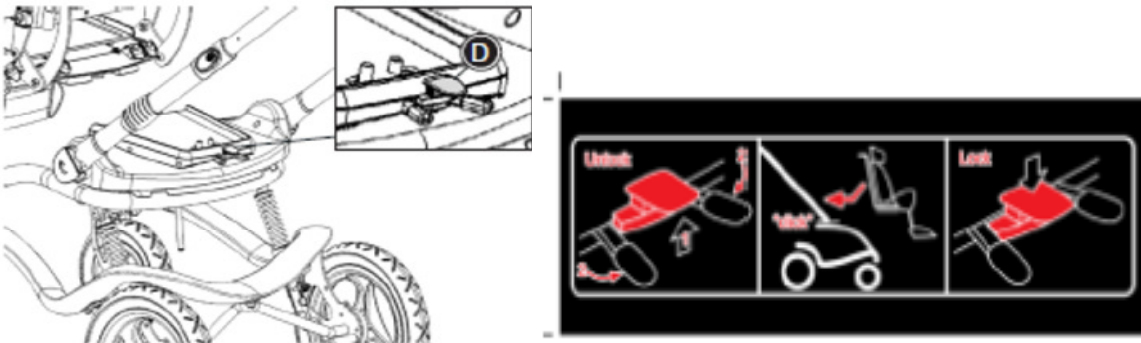

6. Iga lisaraskus (näiteks ostukott), mis on lisatud lükkamiskäetoole, võib põhjustada Stingray ebastabiilsust.

Vahendi kolmandate isikute valdusesse andmisel (teised pereliikmed, hooldajad jne.), peab tagama käru kasutama õpetamise kliendi esindaja.

Kasutusjuhendis toodud nõuete täitmine on väga oluline, et tagada teie lapse turvalisus.

Olen tutvunud Stingray käru kasutamise nõuetega:

Kasutaja:


Esindaja:

Allkiri, kuupäev:

Tähelepanu!

Enne Stingray käru igakordset kasutuselevõtmist veenduge:

1. Et lahtised rihmad või polstri osad ei jääks istet paigaldades adapteri vahele!!
2. Istet adapterile kinnitades peavad luku vabastushoovad olema fikseerimata (punane fiksaatornupp peab olema ülemises asendis). Istme kinnitamisel ja eemaldamisel raamilt, ei tohi istmel istuda.
3. Veenduge, et kõik lukustuvad osad lukustuksid kuuldava klõpsatusega!!!
4. Iste on korrektselt kinnitunud, kui fiksaatornuppu saab luku vabastushoobade vahel vabalt üles-alla liigutada.
5. Peale istme kinnitumist, fikseerida luku vabastushoovad punase fiksaatornupuga (punane fiksaatornupp peab olema alumises asendis)!! Lisakontrolliks lükake istet vastupidises asendis, veendumaks, et iste on lukustunud

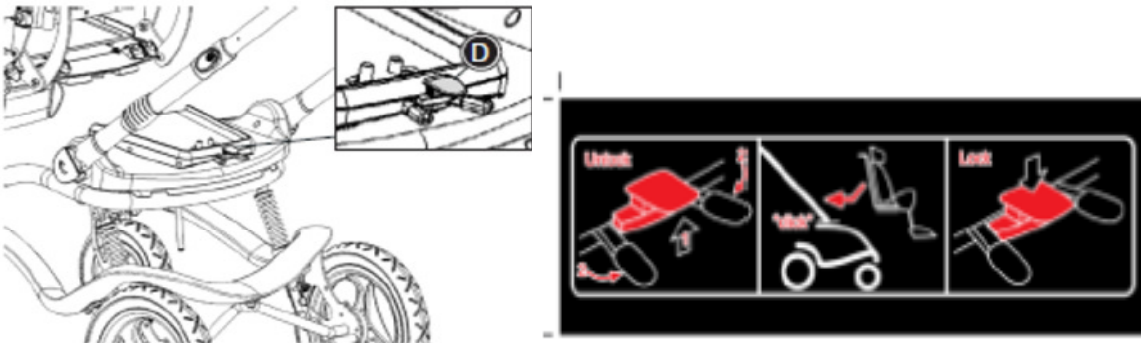

6. Iga lisaraskus (näiteks ostukott), mis on lisatud lükkamiskäetoole, võib põhjustada Stingray ebastabiilsust.

Vahendi kolmandate isikute valdusesse andmisel (teised pereliikmed, hooldajad jne.), peab tagama käru kasutama õpetamise kliendi esindaja.

Kasutusjuhendis toodud nõuete täitmine on väga oluline, et tagada teie lapse turvalisus.

Olen tutvunud Stingray käru kasutamise nõuetega:

Kasutaja:

Esindaja:


Allkiri, kuupäev:

R82[®]

stingray[™]

Sisukord

STINGRAY	3
Turvalisus	4
Garantii	4
Tööriistad	4
Kasutamiseks valmis	5
Tagumised rattad	6
Vedrustus	6
Istme nurga muutmine	7
Lükkamiskäepideme reguleerimine	7
Suuna reguleerijad (esimeste rataste lukustid)	7
Seisupidurid	8
Käsi pidurid	8
Iste	9
Kiirfiksaatorid	9
Seljatoe kõrgus	10
Seljatoe nurk	10
Istme sügavus	10
Küljetugede seadistamine	11
Istme pööramine raamil	12
Istme asetamine/eemaldamine raamile/raamilt	12
Lastekäru Stingray ladustamine/hoiustamine	14
Transpordiks valmistumine	15
Stingray kasutamine sõiduvahendis	16
Stingray kinnitamine sõiduvahendisse	16
Lapse turvalisuse tagamine Stingray's	16
Toote tuvastamine	17
Hooldus	18

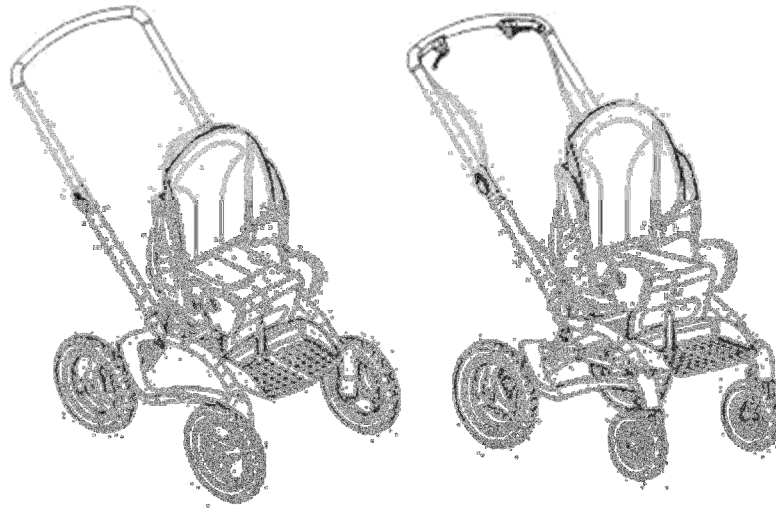

STINGRAY

Stingray on mõeldud lastele, kes vajavad mugavust ja kindlat tuge. Lastekäru sai loodud, et see tagaks liskaks kenale vältimusele ka maksimaalse funktsionaalsuse.

Istet on võimalik pöörata 180 kraadi ilma, et last oleks selle manöövri sooritamise ajaks vaja välja võtta.

Istme sügavust ja seljatoe kõrgust on võimalik hõlpsasti paralleelselt lapse kasvuga reguleerida. Mugavuse tagamiseks on võimalik lisada palju erinevaid lisakomponente.

Turvalisus

- Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ning hoidke see igaks juhuks alles. Teie lapse turvalisus võib saada mõjutatud juhul, kui te ei jälgi hoolikalt juhendis toodud nõudeid.
- CE-märgis tuleb eemaldada kui te tahate iseseisvalt toodet ümber ehitada või kasutate parandusel/hooldamisel mitte selleks ettenähtud varuosi.
- Käru on mõeldud korraga kasutamiseks ainult ühele inimesele. Kunagi ei tohi sinna istuma panna rohkem kui ühte last.
- Ärge jätke käru pikaks ajaks otsese päikese kätte. Enne lapse asetamist kärusse, kontrollige selle temperatuuri.
- Kunagi ei tohi jätta last kärusse ilma järelvalveta, kindlustage, et alati on vajadusel läheduses mõni täiskasvanud inimene. Ebakorrekse kasutamise tagajärjed võivad olla halvad. Enne igat kasutamist kontrollige vööde ja rihmade kinnitatust.
- Iga lisaraskus (näiteks ostukott), mis on lisatud lükkamiskäetoole, võib põhjustada Stingray ebastabiilsust.
- Kui laps istub toolis siis on soovitatav, et enne tooli reguleerimist on kõik rihmad korralikult kinnitatud.

Garantii

Tervele kärule kehtib kahe aastane kaebuste esitamise periood.

Raamile kehtib viie aastane garantii (kaebusi võib siiski esitada ainult siis kui esile kerkib tehase poolne viga)

Tööriistad




Stingray küljest leiate väikse kotikese, mille sisse on paigutatud 3-ne, 4-ne ja 5-ne kuuskantvõti.

Kasutamiseks valmis

- Tõstke Stingray kastist välja
- Käru raami fikseerimiseks tõmmake amortisaatorite juures olevatest kohtadest (A). Õigel tõmbamisel kuulete konkreetset klõpsatust, mis näitab, et raam on õiges asendis.
- Tõstke üles lükkamise käepide, kuni kuulete iseäralikku klõpsatust (B).
- Lukustage käepide (C)

Veenduge, et punane ohutusnupp (D), mis paikneb istme kinnituse tagumises osas, oleks suunaga üles. Kui punane lukusti on vajutatud alla siis iste ei ole õigesti kinnitatud raamile.

- Istme paigaldamiseks libistage iste mööda raamil paiknevat istme alusplaati kuni kuulete iseäraliku klõpsatust (klõpsatus kinnitab, et olete istme paigutanud õigesti raamile). Lisakontrolliks võite istet natuke vastupidises asendis lükata, et veenduda, et iste on lukustunud.

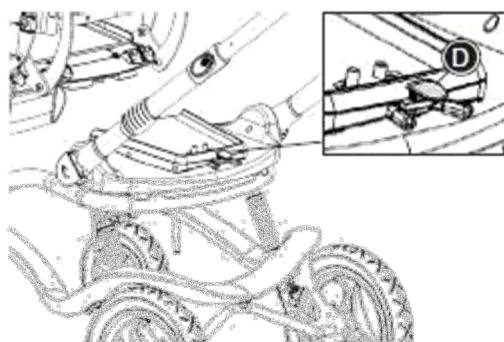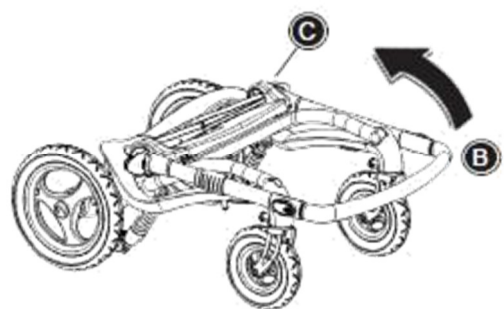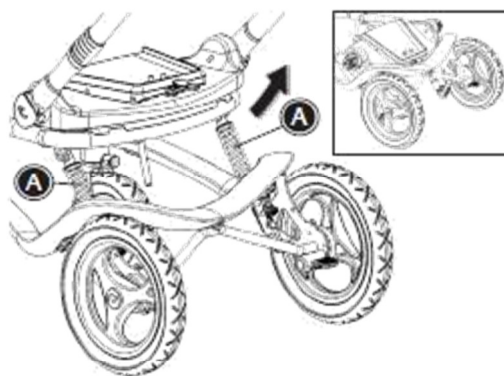

Tagumised rattad



Rattaid on võimalik eemaldada. Sellega saate teha käru kandmisel või ladustamisel siis vastavalt natukene kergemaks või kompaktsemaks.

Rataste eemaldamiseks/tagasi panemiseks vajutage sisse ratta rummul paiknev fiksaator (A).

!!! Veenduge alati, et rattad on korralikult kinnitatud (sellest annab märku konkreetne klõpsatus).

!!! Tagumisi rattaid, millel on ketaspidurid, ei saa eemaldada.

!!! Ratastesse võib maksimaalselt sisestada rõhku, mis ei ületa 36PSI/ 2,5bar'i.

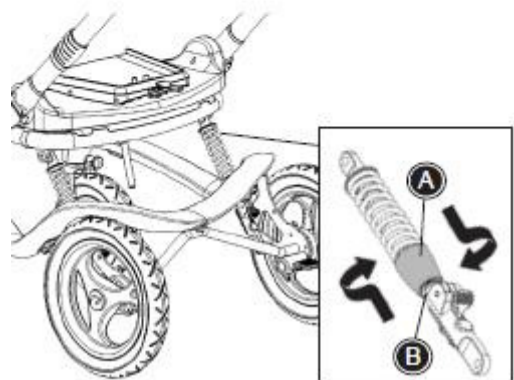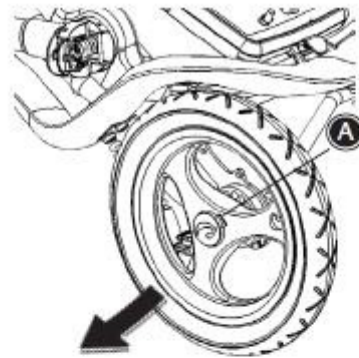

Vedrustus

Vedrustus on reguleeritav.


Kui on vaja jäigemat vedrustust siis selleks keerake reguleerimismutrit (A) päripäeva ning pehmema vedrustuse tagamiseks keerake reguleerimismutrit vastupäeva.

Istme nurga muutmine

Istme nurga reguleerimiseks tõmmake üles vastavast käepidemest (A), mis paikneb käru lükkamiskäepideme parempoolses osas.


!!! Samaaegselt toetage ühe käega istet, et see raskuse all ei muudaks oma nurka liiga äkiliselt.

!!! Istme kallutamisel veenduge, et teie käed ei jääks istme ja lükkamiskäepideme vahele.

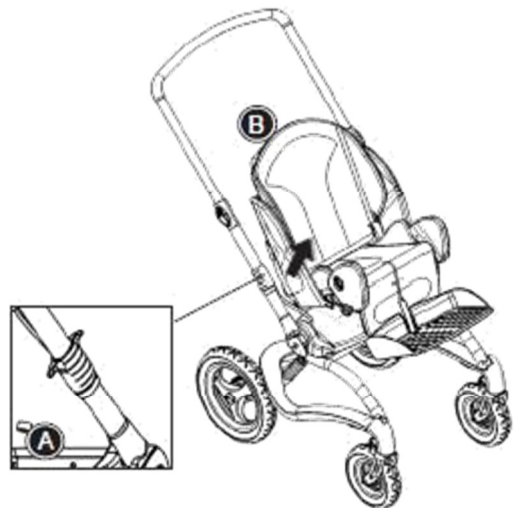

Lükkamiskäepideme reguleerimine

Lükkamiskäepideme pikkust saab reguleerida, kui alla vajutada joonisel näidatud vastavad fiksaatorid (A).

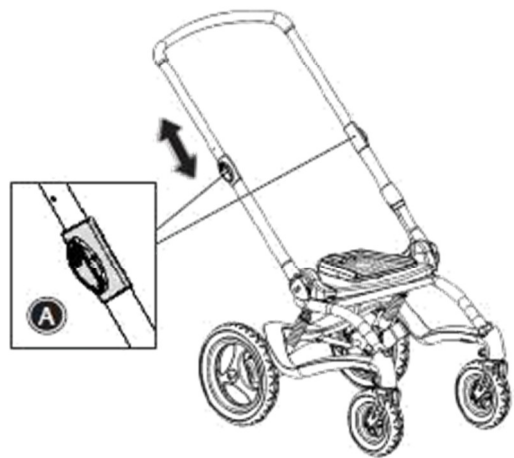

Suuna reguleerijad (esimete rataste lukustid)

Suuna reguleerijatega (A) saate lukustada esimeste rataste kahvlid, et need ei keeraks ümber oma telje.




Seisupidurid

Stingray on saadaval nii eraldi kui ka ühe võlli külge kinnitatud tagumiste seisupiduritega.


Stingray ühe võlli külge kinnitatud seisupiduritega:

Pidurite aktiveerimiseks piisab sellest, et vajutate ainult ühte pidurihooba (A)

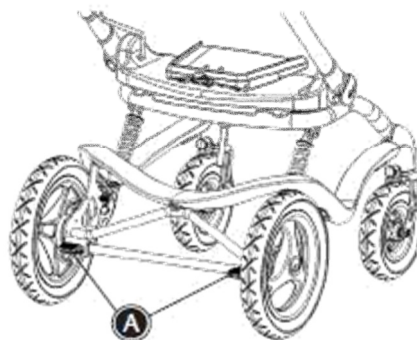

Stingray kahe eraldi seisupiduriga:

Pidurid tuleb aktiveerida mõlemal pool eraldi (B)

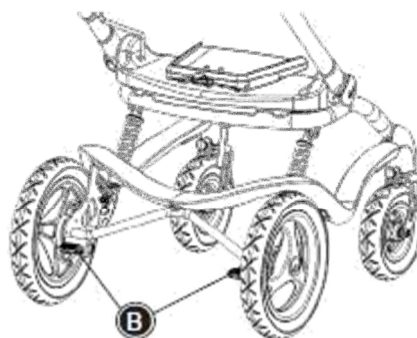


!!! Pidurid peavad olema aktiveeritud alati kui käru seisab pikemat aega ühe koha peal.

!!! Aeg-ajalt kontrollige piduripesade olukorda, veenduge, et seal ei oleks mustust ega pori.

Käsi pidurid

Stingray on saadaval nii peale lisatud käsi pidurite süsteemiga kui ka ilma.

- Pigistage käsi piduri hooba (A), et aktiveerida pidur
- Piduri lukustamiseks pigistage piduri hooba (A) ning vajutage alla punane nupuke (B)
- Piduri vabastamiseks pigistagu uuesti piduri hooba (A)


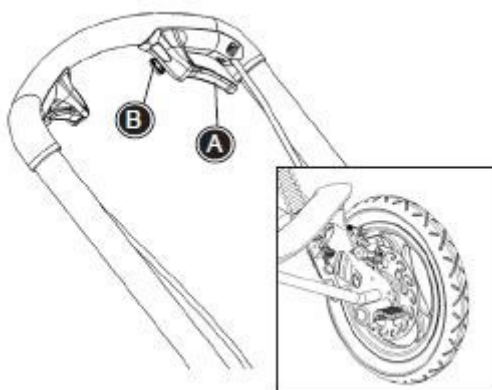


Iste

Iste on varustatud kiirlukustitega, millega saab hõlpsasti kinnitada istme külge erinevaid veste ja rihmasid.

Istme küljes on ka jalatugi, mis hoiab ära lapse väljakukkumise kärust.

!!! Jalatuge ei tohi kunagi seismiseks kasutada.

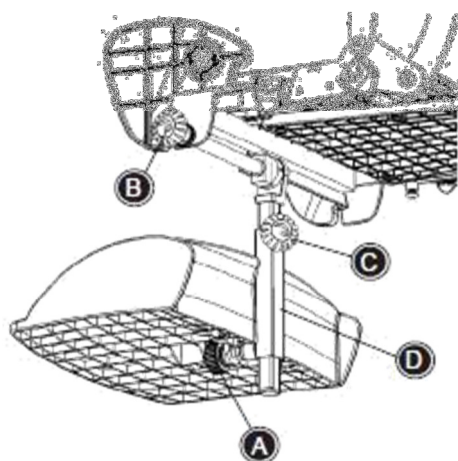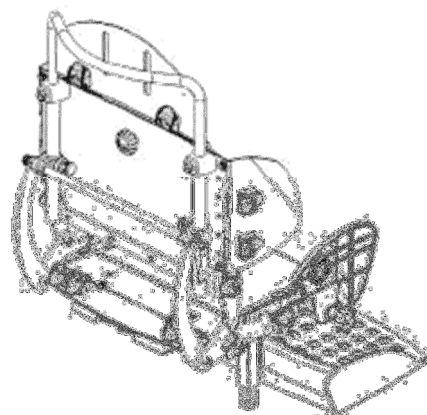


Kiirfiksaatorid

- Fiksaatoriga (A) saab muuta jalatoe plaadi nurka
- Fiksaatoriga (B) saab muuta jalatoe toru nurka
- Fiksaatoriga (C) saab muuta jalatoe kõrgust

Vajadusel, kui on vajalik, et jalatoe plaat oleks veel kõrgemal, võite ümber pöörata jalatoe toru (D)


Seljatoe kõrgus

Seljatoe kõrguse reguleerimiseks vabastage fiksaator (A) ja kaks polti (B). Peale seljatoe kõrguse reguleerimist kinnitage vastavalt fiksaator (A) ja siis poldid (B).

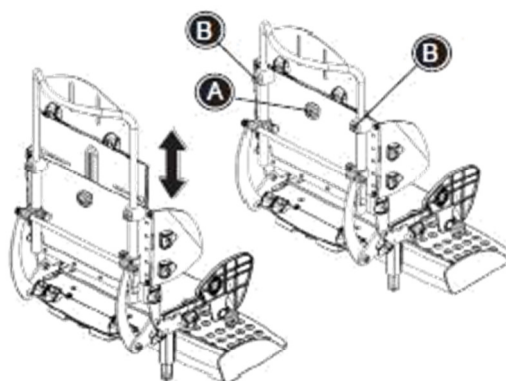

Seljatoe nurk

Esmalt vabastage hoob (A), mis asetseb seljatoest paremal pool. Seejärel hoidke ühe käega samast hoovast ning keerake lahti teisel pool asetsev nupp (B). Eelnenud tegevustega paralleelselt võiksite toetada ka seljatuge, et see ei teeks järsku liigutust. Nüüd vabastage kiirlukustid (C), mis paiknevad mõlemal pool seljatoel. Kiirlukustite deaktiveerimiseks tõmmake neid ja siis keerake 90 kraadi ükskõik millises suunas.

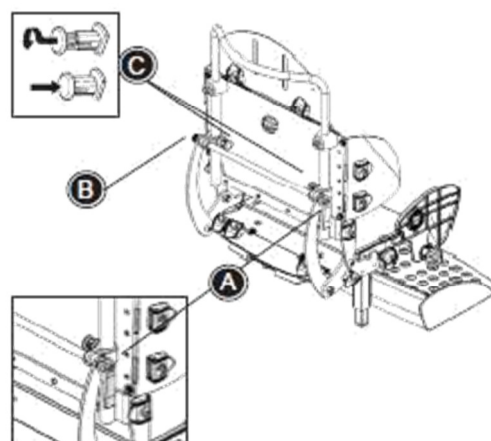


Peale reguleerimist kinnitage esmalt kiirlukustid (C) ning seejärel nupp (B) ja siis alles hoob (A). Hoob tuleb kinnitada mõõduka jõuga.

Istme sügavus

Istme sügavuse reguleerimiseks keerake esmalt lahti poldid (A), mis paiknevad istme peal ning seejärel vabastage istme all paiknevad poldid (B). Poltide lahti keeramiseks kasutage 5-st kuuskantvõtit.


Peale reguleerimist kinnitage kõik poldid.

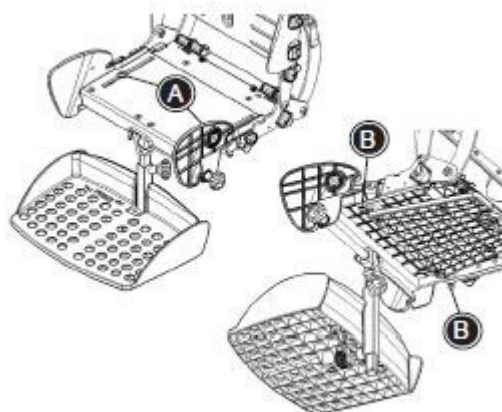

Küljetugede seadistamine

Kinnitamine:

- Pesa (A) kinnitamiseks kasutage 5-st kuuskantvõtit
- Küljetugi asetage vastavasse pesa (B), mille te tekitasite pesa (A) kinnitamisel istmele. Korrektsest kinnitusest annab märku klõpsatus

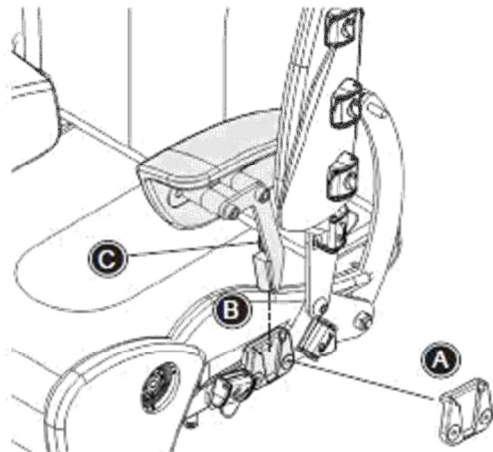


Eemaldamiseks:

- Vajutage klambri (C), et vabastada vastavas pesas olev küljetugi.

Reguleerimine:

- Küljetugede vahelise kauguse reguleerimiseks on alati kaasas vastavad distantspuksid (D).
- Küljetoe asendi muutmiseks keerake lahti vastavad poldid ning liigutage küljetugi mööda siini (E) soovitud asendisse.

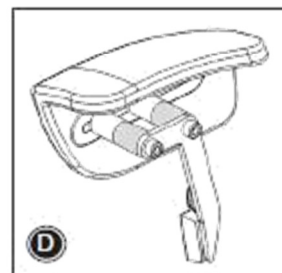


!!! Kõik reguleerimised ja ka lisa osade

paigaldused peab läbi viima hoolikalt. Sellega tagate, et kasutamise ajal ei juhtuks midagi, millel võiksid olla tõsised tagajärjed.

Istme pööramine raamil

Stingray istet on võimalik pöörata 180 kraadi.
Kõige lihtsam viis selle sooritamiseks:

- Esmalt aktiveerige pidurid (A)
- Muutke istme nurka kuni see saavutab maksimaalse asendi(B)
- Vabastage kiirlukud (C)
- Viige lükkamise käepide (D) teisele poole istet
- Lukustage kiirlukud (C)
- Pöörake istet kuni see fikseerub konkreetse klõpsatusega (E)

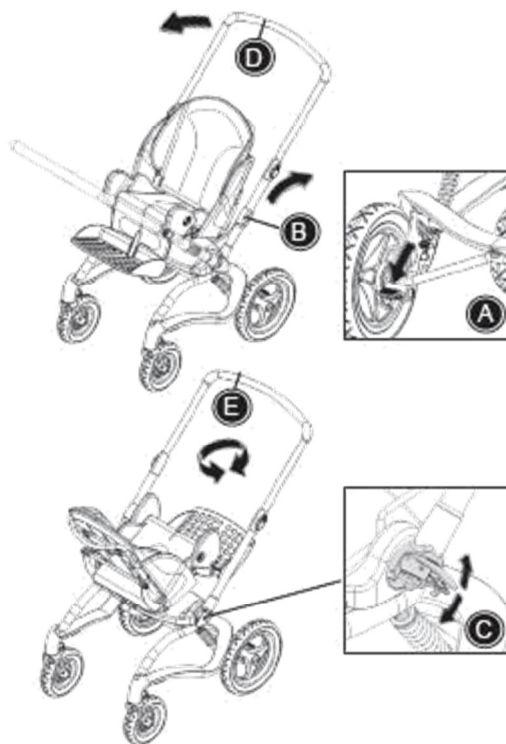

!!! Istet saab pöörata ainult ühele poole.
Õiget suunda näitab lükkamise käepidemel paiknev nooleke.


Eeltoodud manöövrit saab sooritada nii, et laps istub seal sees aga võib sooritada ka ilma lapseta.

!!! Istme pööramisel peate veenduma, et näpud ei jääks istme ja lükkamise käepideme ega ka raami vahele.

Istme asetamine/eemaldamine raamile/raamilt

Enne istme paigutamist vastavale alusraamile, veenduge, et punane ohutusnupp (A) oleks püstises asendis. Peale istme paigale sättimist veenduge, et punane ohutusnupp (A) oleks all.

- Asetage iste alusplaadile, korrektsest asetusest annab märku konkreetne klõpsatus
- Vajutage alla punane ohutusnupp (A).

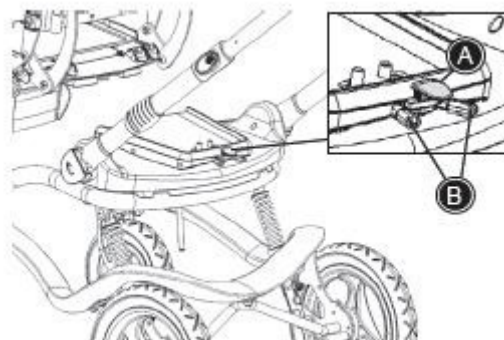

Istme eemaldamiseks:

- Tõstke üles punane ohutusnupp (A)

- Pigistage kokku kaks all paiknevat hooba (B) ning lükake istet otsesihhilises suunas. Nüüd saate istme eemaldada alusplaadilt.

Lastekäru Stingray ladustamine/hoiustamine

Stingrayd on võimalik hoiustada kahel viisil:


- 1) Koos istmega
- 2) Ilma istmeta

Koos istmega:

- Fikseerige pidurid (A)
- Lükake seljatugi ettepoole (B)
- Vabastage kiirlukud (C)
- Viige lükkamise käepide teisele poole istet (D)
- Vabastage vedrude juures olevad lukud (E)

Ilma istmeta:


Esmalt eemaldage iste (F) ja siis viige läbi eeltoodud astmed.

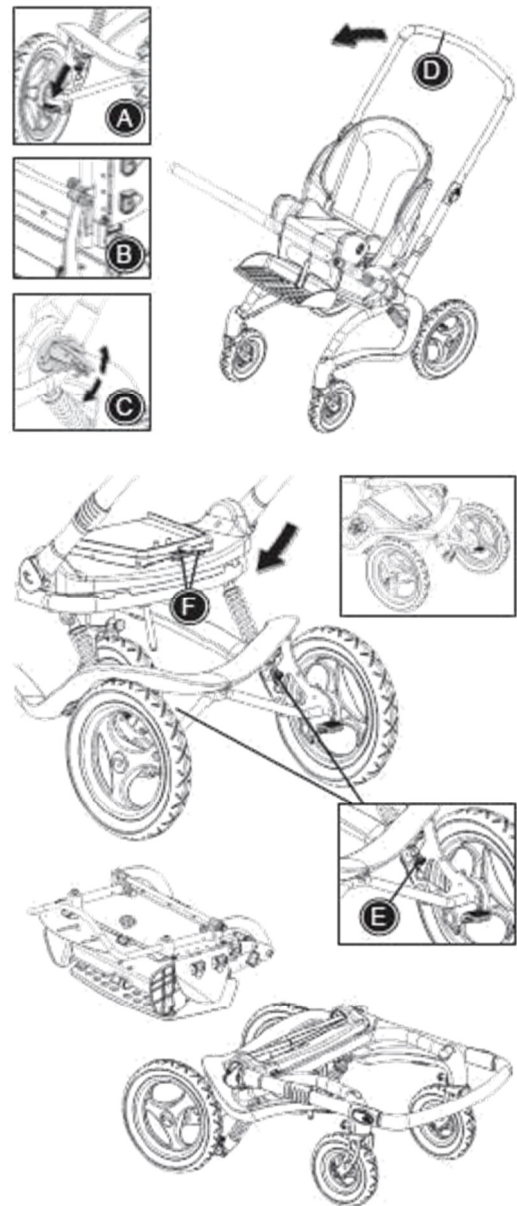

Transpordiks valmistumine

Transpordi kronsteinid:


- Kinnitage kaks eesmist transpordi kronsteini (A), kasutades selleks 5-st kuuskantvõtit
- Kinnitage kaks tagumist transpordi kronsteini (B), kasutades selleks 5-st kuuskantvõtit.

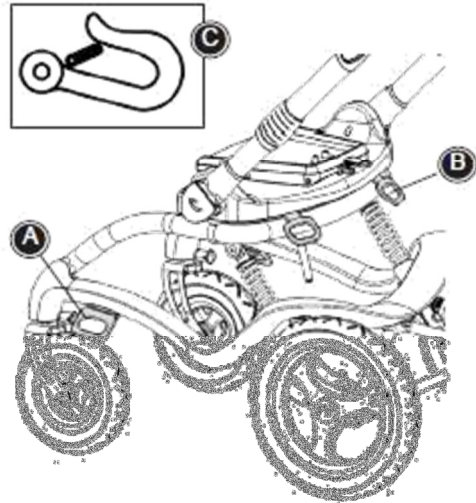

Kõik Stingray'l kasutatavad transpordi kronsteinid on tähistatud turvamärgiga (C).

Seljatoe asend:

Esmalt vabastage hoob (D), mis asetseb seljatoest paremal pool. Seejärel hoidke ühe käega samast hoovast ning keerake lahti teisel pool asetsev nupp (E). Eelnenud tegevustega paralleelselt võiksite toetada ka seljatuge, et see ei teeks järsku liigutust. Nüüd vabastage kiirlukustid (F), mis paiknevad mõlemal pool seljatoel. Kiirlukustite deaktiveerimiske tõmmake neid ja siis keerake 90 kraadi ükskõik millises suunas. Nüüd seadke seljatugi vertikaalsesse asendisse.

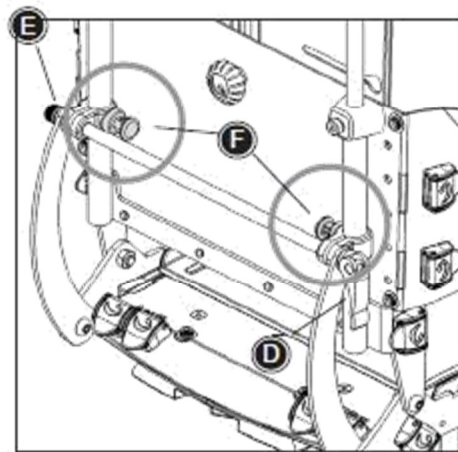

Peale seljatoe vertikaalasendisse viimist kinnitage esmalt kiirlukustid (F) ning seejärel nupp (E) ja siis alles hoob (D). Hoob tuleb kinnitada mõõduka jõuga.

Stingray kasutamine sõiduvahendis

Stingray'd võib transportida autos nii, et seal istub laps sees. Transportides peab jääma käru asend otsesõidu suunas (suunaga auto kapoti poole).

!!! Eelnenud tingimus ei lasku teistele kärudele või abivahenditele.

!!! Võimalusel oleks soovitatav laps asetada siiski otse auto istmele ettenähtud turvatooli.

!!! Enne käru kinnitamist on soovitatav keerata eesmised rattad raamiga risti.

!!! Sõiduvahendisse paigutamisel peate veenduma, et kõik vabalt liikuvad lisad on eemaldatud või suunatud lapsest eemale.

Stingray kinnitamine sõiduvahendisse

Enne sõiduvahendisse asetamist veenduge, et teie masinale on paigaldatud neljapunktiline kinnitus süsteem.

Lapse turvalisuse tagamine Stingray's

Turvalisuse tagamiseks kinnitage istme külge puusavöö

Toote tuvastamine

A) Seerianumber



Raamil paikneb see lükkamise
käepideme parempoolsel siseküljel

Istmel paikneb see tagumises parempoolses nurgas

B) Tootja tähis

Raamil paikneb see lükkamise
käepideme vasakpoolsel siseküljel

Istmel paikneb see tagumises vasakpoolses nurgas

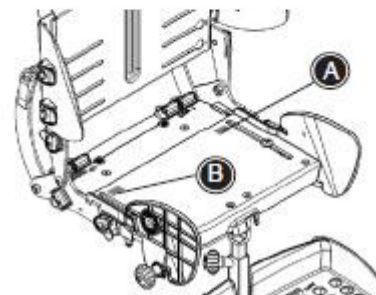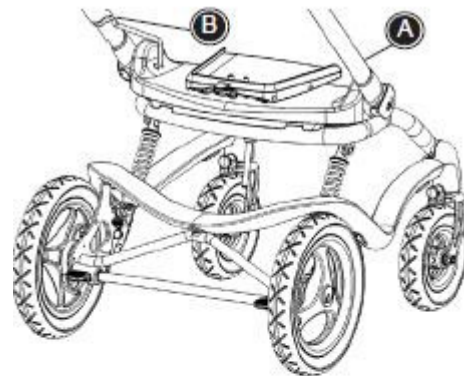

Hooldus

Stingray'l kasutatavad polstrid on pestavad makismaalselt 40⁰ juures. Stingray polstreid ei tohi kuivatada kuivatis ega ka tsentrifugaalsüsteemides (pesumasinas), lakse polstritel loomulikul teel kuivada. Meie soovitame puhastada polstreid regulaarselt niiske lapiga. On tähtis, et te hoiate Stingray raami puhtana, sest sellest sõltub ka tema eluiga.

!!! Iga poole aasta tagant on soovitatav õlitada kõiki liigendiga osi.

!!! Kord nädalas võiksite puhastada kuiva lapiga rattaid. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis on tehtud metüülpiirutse baasil või mis sisaldavad kloriide.

!!! Iga poole aasta tagant oleks soovitatav viia Stingray hooldusesse, et vältida tõsisemaid mehaanilisi vigastusi.

!!! Kõiksuguste erinevate lisade, mis ei ole heaks kiidetud R82 poolt, lisamisel peate eelnevalt pöörduma vastava ettevõtte poole, kust vastav Stingray on ostetud.

!!! Veenduge, et kõik lukustuvad osad lukustuksid kuuldava klõpsatusega. Muda ja mustusega kaetud vastavate fiksaatorite pesad ei pruugi korralikult funktsioneerida.