

## Latekslint MSD-Band

### Omadused

MSD latekslint on käepärane vahend, millega lihasjõudu ja -massi kasvatada, sellega saab treenida kõiki olulisemaid lihasgruppe.

Latekslint parandab üldseisundit ja tasakaalu, tugevdab keha.

Kasutatav taastusravis ning lihaste ja liigeste funktsioonide parandamisel.



Valmistatud naturaalsest latekskummist (võib põhjustada allergilisi reaktsioone).

Saadaval erineva tugevusega.

## **Ohutus**

- Enne latekslindi kasutamist pidage nõu tervishoiuspetsialistiga.
- Ärge kasutage linti nii, et see võiks pingest vabanemisel vastu pead või silmi paiskuda.
- Kontrollige enne kasutamist, et latekslindil ei oleks rebendeid või läbitorkeid. Kui lint on kahjustunud, siis tuleb see kohe välja vahetada.
- Hoidke lint teravatest esemetest eemal.
- Latekslindi kasutamisel eemaldage alati sõrmused. Olge ettevaatlik teravate küüntega.

## **Kasutamine**

Et tagada hea vereringe harjutuste ajal, tuleks enne harjutuste alustamist teha ka soojendusharjutusi.

Tõhus soojendus aitab vältida tõsiseid lihasvigastusi.

## **Puhastamine ja hoiustamine**

Võib loputada veega (nt voolavas kraanivees). Pärast puhastamist lasta kuivada, seejärel tuleks linti kokkukleepumise vältimiseks puuderdata nt talgiga.

Hoida kuivas ja jahedas kohas (max 40 °C).

Toodetud Malaisias

Vastab CE-märgise nõuetele.

