

Flamingo

Eestikeelne kasutusjuhend

Sisukord

Ohutus
Garantii
Hooldus
Flamingo kasutusvalmidusse seadmine
Istme ja seljatoe seadistus
Flamingo kõrguse reguleerimine
Reguleeritavad jalatoed
Küljetoed
Peatugi
Lükkamiskäepide
Käetugi/kandik
WC-pott
Polster ja prill-laud
Vest/ristvest
H-rihm/puusarihm
Istme eemaldamine
Istme WC-potile paigaldamine
Flamingo kui dušši-iste
Flamingo kokkupakkimine
Toote identifitseerimine
Mõõtmed
Tellimisnumbrid/lisaseadmed
Tehnilised andmed
Tootja
Levitaja
Hooldus
Probleemilahend

Flamingo

Valides Flamingo, oleme kindlad, et teil on olemas tualett-/dušši-iste, mis vastab kõikidele kaasaegse abi nõuetele, mis on mõeldud lastele vanuses 2 kuni 13 aastat.

Flamingo on kavandatud muutma tualett/dušši kasutamine võimalikult meeldivaks ja mugavaks nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Kasutage Flamingot dušši-toolina, tualett-istmena või dušši-istmena. Võtke Flamingo reisile kaasa ja kasutage neid paljusid võimalusi, mida Flamingo pakub.

See kasutusjuhend on mõeldud abiks, võimaldamaks täielikult ära kasutada paljusid võimalusi, mida Flamingo pakub. Seetõttu soovitame enne Flamingo kasutusele võtmist kasutusjuhendi läbi lugeda.

Ohutus

Flamingo on pälvinud CE märgistuse. See kinnitab, et Flamingo vastab kõigile vajalikele Euroopa ohutusnõuetele.

CE märgistus eemaldada juhul, kui toodet ehitatakse ümber või kui ei kasutata R82 originaalvaruosi.

Last ei tohi jätta ratastooli järelvalveta. Tagada pidev täiskasvanu järelvalve. Flamingo väärkasutamine võib põhjustada kasutajale tõsiseid vigastusi. Hoolitseda selle eest, et kõik kinnitused ja kohandused oleksid korrektselt paigas ja kontrollida seda regulaarselt.

Garantii

Teateid defektidest võetakse R82 A/S-s vastu kahe aasta jooksul.

Flamingo garantii kehtib 12 kuud. Garantii on kehtiv ainult juhul kui kasutatakse R82 originaalvaruosi ja seadistusi. Kõik eriseadistused peavad olema läbi viidud R82 poolt. R82 ei vastuta kahju või vigastuse eest, mille on põhjustanud kas mitteoriginaalosalade kasutamine või volitamata R82 töötaja parandustööd.

Hooldus

Flamingo töötab ilma igasuguse hoolduseta. Kuid raami tuleks sageli puhastada.

Mitte kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad kloori või denatureeritud piiritust.

Kui lubjasete muutub probleemiks, kasutada äädikhappe kontsentraati. Loputada puhta veega 10-15 minutit. Kohandusi, mida selles juhendis pole kirjeldatud, peavad tegema ainult selleks volitatud R82 töötajad.

Flamingo kasutusvalmidusse seadmine

Flamingo toimetatakse kätte kokkupakituna, et ta transportimisel võimalikult vähe ruumi võtaks. Pakkige Flamingo lahti.

Avage raam ja kinnitage tugijalad kruvidega (A).

Tugijalad ja kruvid leiate seljatoe ülaosast.

Vabastage istme all olev roheline turvalukk (B) ja valige sobiv nurk.

Flamingo on nüüd kasutusvalmis.

Istme ja seljatoe seadistus

1) Istme seadistus:

- Vabastage mõlemalt poolt kinnitused (A), et terve iste õige nurga alla seada.
- 2) Seljatoe seadistus:
Vabastage mõlemalt poolt kinnitused (B), et seljatugi õige nurga alla seada.

Mitte kasutada istme all olevat rohelist turvalukku istme ja seljatoe seadistamiseks. Turvalukk on mõeldud ainult Flamingo kokku pakkimiseks.

Veenduge, et kinnitused mõlemal pool tooli on tugevasti kinni.

Flamingo kõrguse reguleerimine

Kruvige alumise raami ülemises osas (A) olevad kruvid lahti ja tõmmake raami koos istmega kuni olete saavutanud sobiva kõrguse. Enne kruvide kinnitamist veenduge, et mõlemad kruvid oleksid ühel kõrgusel. Kinnitage kruvid.

Reguleeritavad jalatoed

- 1) Jalatugesid on võimalik reguleerida nii soovitava nurga all kui ka koha peale (A). Mõlema jalatoe kõrgust on võimalik eraldi reguleerida. Vabastage jalatoe toru külje peal olev kruvi (B) ja reguleerige kõrgust.
- 2) Terve jalatoe raami nurga reguleerimine:
 - Lükake jalatoed üles vertikaalsesse asendisse (C)
 - Tõmmake istme all olevad rohelised turvalukud alla ja reguleerige jalatugede nurka ette- või tahapoole.
- 3) Jalatugedele on võimalik kinnitada jalarihmad.

Eemaldage WC-pott kui see on kinnitatud, et jalatoe raami üles lükata.

Küljetoed

- 1) Küljetugede kinnitamine:
Küljetugede korrektselt kinnitamiseks järgige alljärgnevat:
 - Asetage küljetugi soonde nagu näidatud (A)
 - Lükake küljetugi polstri taha vastavale kohale (B)
 - Kinnitage küljetugi Allen kruviga (C)Küljetoe eemaldamiseks tuleb Allen kruvi eemaldada. Seejärel suruge küljetoe tagaosale ja väänake see eemale.
- 2) Küljele avanevad küljetoed
Kinnitage küljele avanevad küljetoed seljatoe taga olevatesse aukudesse.
 - Eemaldage aukudest valged punnid (D)
 - Asetage küljetugi soovitud kõrgusele ja kinnitage kahe Allen kruviga (E)
 - Reguleerige kõrgust kinnitades küljetuge teistesse taga olevatesse aukudesse

Vajutage punane mutter (F) alla ja küljetugi avaneb küljele.

Peatugi

- 1) Peatugi kinnitatakse seljatoe taha. Kõrguse reguleerimiseks kasutage kinnitust. Peatoe nurga reguleerimiseks (B) ja küljelt-küljele seaditamiseks (C) kasutage Allen võtit.
- 2) Kui peatuge on vaja veelgi ettepoole nihutada, siis asendage peatoe toru kõvera toruga. Kauguse reguleerimiseks (D) kasutage Allen võtit.

Lükkamiskäepide

- 1) Flamingole on võimalik paigaldada lükkamiskäepide. Paigaldage lükkamiskäepide tooli seljatoe taha ja kinnitage (A). Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimiseks vabastage kinnitust (B).

Käetugi/kandik

- 1) Kui laps on vaja tooli asetada, saab käetoe/kandiku lihtsalt küljele lükata.
 - Käetugi/kandik paigaldatakse tooli mõlemal pool olevatesse kinnitustesse (A).
 - Käetoe/kandiku küljele lükkamiseks avage kandiku all olev kinnitus (B).

WC-pott

Flamingole on võimalik paigaldada kergesti eemaldatav WC-pott. Kinnitage istme alla toed, võimaldamaks paigaldada WC-pott.

- 1) Kinnitage kaks tuge Allen kruvidega istme all olevatesse aukudesse (A).
- 2) WC-pott paigaldatakse istme alla tooli tagant (B).

Polster ja prill-laud

- 1) Polster ja prill-laud on kergesti eemaldatavad, näiteks kui on vaja tooli puhastada.
 - Tõstke prill-laud üles ja eemaldage see (A)
 - Eemaldage polster (B) vajutades/tõmmates nupud toolis olevatest aukudest välja
- 3) Prill-laud on saadaval kahes mudelis; Kõrge mudel (C) ja madal mudel (D)

Mitte kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad kloori või denatureeritud piiritust.

Vest/ristvest

- 1) Vesti/ristvesti paigaldamine:
 - Paigaldage õlarihmad läbi tooli taga olevate aukude (A).
 - Paigaldage küljerihmad läbi istmes olevate aukude (B).
 - Kinnitage rihmad tooli taga olevate pannaldegaga (C).

H-rihm/puusarihm

- 1) H-rihma/puusarihma paigaldamine:
 - Paigaldage õlarihm (H-rihm) läbi tooli taga olevate aukude (A).
 - Paigaldage küljerihmad läbi istmes olevate aukude (B).
 - Kinnitage rihmad tooli taga olevate pannaldegaga (C).
- 2) Tõmmake rihmad ees olevasse pandlasse ja reguleerige pikkust. Avage pannal vajutades nagu näidatud (D).

Istme eemaldamine

Veel üks Flamingo eriline omadus on iste. Seda on võimalik raamist eemaldada, kinnitada standard WC-potile ja kasutada tavalises vannis.

Istme lahti võtmiseks eemaldage kruvid (A) mõlemalt poolt tooli. Seejärel kallutage istet tahapoole, et see eemaldada.

Enne istme lahti võtmist eemaldage laps istmelt.

Istme WC-potile paigaldamine

Flamingo istme paigaldamiseks standard WC-potile on vaja tellida üks lisakinnitus ja järgida tuleb järgmist juhendit:

1) Istme ettevalmistamine:

- Eemaldage iste (vaadake lk.15)
- Eemaldage tooli WC-pott ja selle kinnitused juhul kui need on paigaldatud
- Asetage uus istmeraam istme alla.
- Asetage tugikäepide (A) istmeraami ette kuna istmeraam tuleb oma kohale lükata. Kinnitage mõlemalt poolt kruvidega.
- Kasutades kruve, paigaldage istmeraamile kinnitustorud (B).
- Istme alla tuleb paigaldada kaks raamituge (C)

2) WC-poti ettevalmistamine:

- Eemaldage WC-poti iste (D)
- Paigaldage kinnitus (E) ja kinnitage see WC-poti külge nagu näidatud.

Nüüd paigaldage Flamingo iste WC-potile asetades kinnitustorud kinnitustesse. Kinnitage mõlemalt poolt kruvidega (F).

Flamingo dušši-istmena

Flamingot on kerge vannile paigaldada kui istme alla on paigaldatud iminapad.

- Eemaldage iste (vaadake lk.15)
- Eemaldage tooli WC-pott ja selle kinnitused kui need on paigaldatud

1) Kinnitage istme alla neli iminappa (A)

2) Asetage Flamingo iste vanni vastu vanniseina, vaadake joonist (B)

Valage vanni vesi, kuid ainult lapse puusani.

Enne lapse vanni tõstmist kontrollige, et vee temperatuur poleks üle 37°.

Ärge jätke last vannis järelvalveta.

Kontrollige iga 20 min. järel, et iste oleks turvaliselt vanni kinnitatud.

Flamingo kokkupakkimine

Flamingot saab kergelt kokku ja lahti pakkida, mistõttu on teda kerge transportida. Flamingo kokkupakkimiseks järgige järgnevat juhendit:

- 1) Eemaldage WC-pott kui see on paigaldatud (A).
- 2) Lükake jalatoed vertikaalasendisse (B), tõmmake rohelised turvalukud alla (C) ja lükake jalatoeraam üles tooli alla.
- 3) Lükake seljatugi ette. Eemaldage mõlemalt poolt kruvid (D) ja eemaldage iste raamist.
- 4) Vabastage kinnitused ja valged turvalukud (E), et tooli istme nurka muuta. Eemaldage raami eesosas olevad kruvid (F) ja pakkige Flamingo kokku.

Hoidke raamist kinni kui te raami eesosas olevaid kruve eemaldate.

Toote identifitseerimine

- A) Seerianumber
Märgistus asub vasaku esiratta kohal raami siseküljel.
- B) Tootja
Märgistus asub vasaku tagaratta kohal.

Mõõtmed

Õlgade laius (SHW)
Selja kõrgus (BH)
Istme laius (SW)
Laius, raam (W)
Kõrgus, raam koos istmega (H)
Pikkus, raam (L)
Istme sügavus (SD)
Istme kõrgus (SH)
Jalatoe kõrgus istmest (LUB)
Istme kõrgus kokkupakituna
Istme pikkus kokkupakituna
Raami kõrgus kokkupakituna
Raami pikkus kokkupakituna
Kaal
Maksimaalne raskustaluvus/kasutaja kaal

Tellimisnumbrid/lisaseadmed

Seljatoe külgede komplekt koos polstriga
Polster, täiskomplekt
Seljatoe polster
Istmepolster
Laiade külgedega istmepolster
Külgede polster*, pildid
Prill-laud, kõrge
Prill-laud, madal
WC-pott koos kinnitustega
WC-pott
Küljetoed, küljele lükatavad
Käsitugi/kandik, küljele lükatav

WC-potile kinnitamise riistvara
Iminapad
Lükkamiskäepide

*X = H parem/V vasak

Tehnilised andmed

Iste: Valgest ABS plastikust. Korduvkasutatav

Polster: PUR (poliüuretaan)

Raam: Alumiinium ja pulbervärviga kaetud roostevaba teras 37

Tootja

R82 A/S

Parallelvej 3

8751 Gedved

Taani

Hooldus

RAAM

Kinnitage tooli all olevaid kruvisid regulaarselt, eriti kui on muudetud tooli laiust. Iseenda mugavuse huvides ja tooli vastupidavuse pikendamiseks hoidke tool puhtana. Kui tooli on kasutatud kloorisisaldusega vees, tuleks see puhta veega üle pesta ja niiske lapiga kuivatada. Iga kord kui kasutate tooli dušši-istmena, veenduge, et raam oleks täielikult kuivatatud. Peske tooli autošampooni või pesemisvahendiga. Mitte kasutada kloorisisaldusega puhastusvahendeid ega denatureeritud piiritust. Kui lubjasete muutub probleemiks, kasutada äädikhappe kontsentraati. Loputage 10-15 min. puhta veega.

RATTAD

Vajadusel puhastage rattad karvadest ja mustusest.

ÜLEVAATUS

Kõiki tooli kruve peab pidevalt kinnitama. Kõiki kruve, mis kinnitavad lisaseadmeid, tuleb kontrollida vähemalt kord kuus. Tähtis on avastada väiksemadki tekkinud vead raamil, PVC-l ja teistel osadel.

PARANDUS

Kui teie tool on vigane, peaksite koheselt edasimüüjaga ühendust võtma. Defektiga toole ei tohiks kasutada. Tooli taaseadistamiseks või remondiks tuleb kasutada ainult R82 osi. Katkisi lisaseadmeid või saadaval olevaid varuosi võib saata R82 parandusse. Kui mõni põhiosa on vigane, tuleb terve tool saata R82 parandusse. R82 ei vastuta kahju või vigastuse eest, mille on põhjustanud kas mitteoriginaalosa kasutamine või volitamata R82 töötaja parandustööd.

Probleemilahend

Probleem*

Lahendus

Kõrguse seadistus pole täpselt paigas

Veenduge, et kruviauk oleks sisemisel raamil oleva kruviauguga kohakuti.

Rohelised turvalukud pole paigas

Raputage istet/jalatuge õrnalt kuni turvalukud oma kohale plõksatavad.

Seljatugi/iste on viltu

Veenduge, et kinnitused mõlemal pool tooli oleks kinnitatud.

Kasutaja võib neid probleeme kogeda toolis, mis on valesti seadistatud või mida kasutatakse valesti.