


#10021, 10022, 10023, 10024, 10025 ALUMIINIUMKARK



Palun veenduge enne kasutamist, et ühelgi osal ei ole pragusid ega murdekohti.

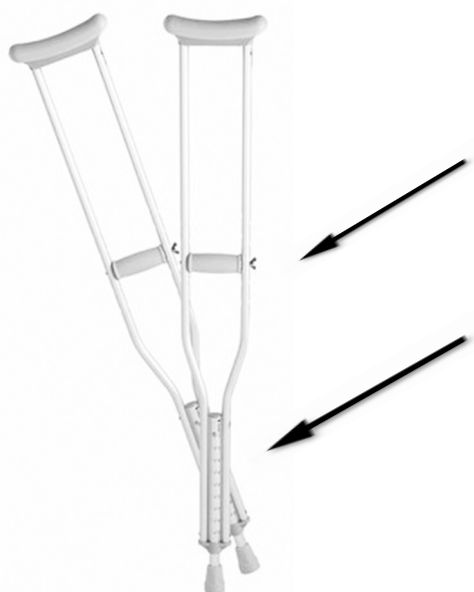

KOKKUPANEKUJUHISED KÕIKIDE KARKUDE JAOKS

1. Keerake lahti tiibmutter ja võtke ära polt, mis kinnitab käepideme kargu külge. Nihutage käepide soovitud kõrgusele ning kinnitage seal tiibmutri ja poldi abil.

2. Suruge jalaosa pikendusel alla mõlemad lukustusnupud ja laske neil täielikult haarduda kargu alumises osas olevate aukudega. Enne kasutamist peavad lukustusnupud olema aukudes kindlalt lukustunud.

KASUTUSJUHEND

Kasutage karke üksnes pärast asjakohast harjutamist ja sobitamist arsti või tervishoiutöötaja järelevalve all.

Jalaosa ja käepideme kõrguse õige reguleerimine on maksimaalse tasakaalu tagamiseks vajalik iga isiku puhul eraldi.



Kasutaja
maksimaalne mass



Keerake kõik tiibmutrid kõvasti kinni ja kontrollige aeg-ajalt kinnituse tugevust. Tiibmutrid võivad pärast kasutamist vajada järelpingutamist. Kontrollige, kas kõik surunupud on kargu mõlemal küljel täielikult haardunud. Olge libedatel pindadel eriti tähelepanelik. Kontrollige kummiotsakuid ja vahetage kulunud otsakud välja.

Toodetud:

Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C. jaoks

Volitatud esindaja Euroopas:

Medica Surgical Innovations Limited

BB2 4PB, Ühendkuningriik

Valmistatud Taiwanis Läbi vaadatud 11.02.2014

