


VERMEIREN

Izzie

KASUTUSJUHEND

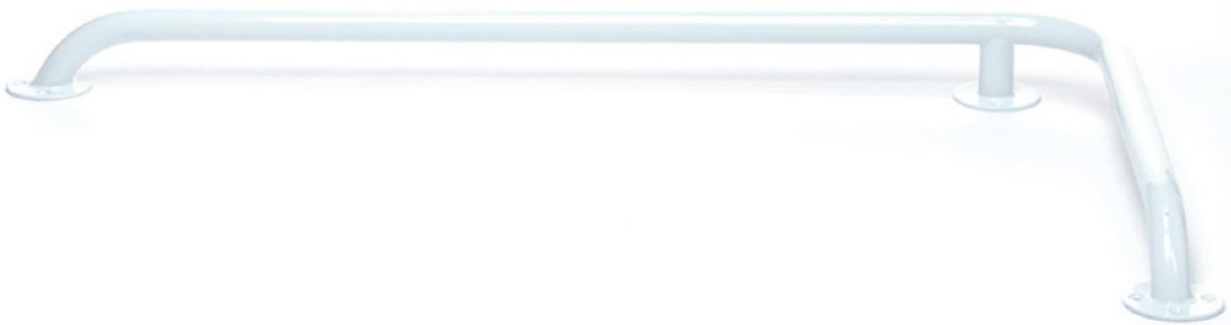



Juhised spetsialistile/edasimüüjale

See kasutusjuhend on toote lahutamatu osa ja peab olema kaasas iga müüdud tootega.

Versioon: C, 06.2020

Kõik õigused on kaitstud, sealhulgas tõlge.

Ühtegi kasutusjuhendi osa ei tohi mingil kujul reprodutseerida (prindituna, fotokoopia, mikrofilm, ega ühegi muu protsessiga) väljaandja kirjaliku loata ega töödelda, paljundada või levitada elektrooniliste süsteemide abil.

Izzie vannitoa tugikäepide



1 Pärast kättesaamist

Pakkige toode lahti ja veenduge, et tarne oleks komplektne. Olemas peavad olema järgmised osad:

- 1 vannitoa tugikäepide,
- 6 kruvi (Izzie R/L-i jaoks 8),
- 6 tüüblit (Izzie R/L-i jaoks 8),
- 2 kummitihendit (Izzie R/L-i jaoks 3),
- kasutusjuhend

Kontrollige, ega toode pole transportimisel kahjustada saanud. Kui leiata ükskõik milliseid tarnejärgseid kahjustusi, võtke ühendust tarnspordiettevõttega.

2 Vannitoa tugikäepideme paigaldamine


⚠ ETTEVAATUST! Vigastusoh!

- Veenduge, et vannitoa tugikäepide oleks kindlalt seinale kinnitatud. Kontrollige kinnitusi korrapäraselt.
- Veenduge, et vannitoa tugikäepideme paigalduskohas ei oleks elektrikaableid ega muid torusid.
- Koos tootega tarnitavad tüüblid sobivad betoon- või massiivtellisseinale. Muud tüüpi seinte korral küsige, millised on õiged kinnitusvahendid.

Tugikäepidemed on ette nähtud üldiseks tugivahendiks. Neid saab kasutada kõikjal, sealhulgas niiskes keskkonnas. Kasutage Izzie'ga kaasas olevaid kinnitusvahendeid.

Izzie paigaldamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadke vannitoa tugikäepide soovitud asukohta.
2. Märkige kinnitusavade asukoht seinale.
3. Puurige seinasse avad.
4. Paigaldage tüüblid.
5. Paigaldage kummitihendid.
6. Asetage vannitoa tugikäepide vastu seinale.
7. Seadke kruvid paika ja kinnitage kindlalt.

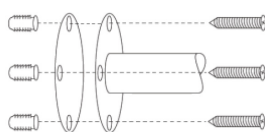

Kui kahtlete, võtke ühendust spetsialistiga ja laske temal Izzie paigaldada.

3 Vannitoa tugikäepideme kasutamine

⚠ ETTEVAATUST! Põletusoh!

- Olge ettevaatlik, kui kasutate tugikäepidet äärmiselt kuumas või külmas keskkonnas (päikesepaiste, äärmuslik külm, saunad jne).
- Kui märkate ükskõik milliseid defekte, ärge Izzie't kasutage.

Vannitoa tugikäepideme maksimaalne kandevõime on 130 kg.

4 Korrashoid

Izzie't võib puhastada ja desinfitseerida tavapärase olmekasutuseks ette nähtud vahenditega. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, mis võivad tekitada värvimuutusi.

Pinnakihi hea kvaliteet tagab optimaalse kaitse korrosiooni eest. Kui väline pinnakate on kriimustamise tõttu või muul viisil vigastatud, laske edasimüüjal kahjustatud pind parandada.

Vannitoa tugikäepideme keskmine kasutusiga on viis aastat.

4.1 Oodatav kasutusiga

Vannitoa tugikäepideme keskmine kasutusiga on viis aastat.

5 Tehnilised andmed

Kaubamärk	Vermeiren
Tüüp	Vannitoa tugikäepide
Mudel	Izzie
Kirjeldus	Mõõtmed
Maksimaalne kandevõime	130 kg
Tugikäepideme ja seinavahekaugus	40 mm
Minimaalne paigalduspind	30 cm: 65 × 370 mm 40 cm: 65 × 470 mm 45 cm: 65 × 520 mm 60 cm: 65 × 670 mm 80 cm: 65 × 870 mm Izzie R/L: 480 × 880 mm
Ladustamistemperatuur	+5 °C kuni +41 °C
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Mõõtude lubatud hälve ±15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	



Vermeiren GROUP NV
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
BE

Veebisait: www.vermeiren.com