

Ostukäru Koala

Art 319001+319002

Kasutusjuhend



Ostukäru Koala on valmistatud alumiiniumist ja kärul on praktiline nailonkangast ostukott. Müügil halli põhivärvusega, detailid on sinise või oranži värvusega

Käepidet saab pöörata ja selle saab hõlpsasti istmeks muuta.



Istmeks muudetud käepide



Toote mass: 2,5 kg
Koti kandevõime: 30 kg
Käru kandevõime: 110 kg



CE



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg,
Taani,
www.mobilex.dk

Mobilex Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź
tel: 042 214 2911
www.mobilex.pl

1. Sissejuhatus


Täname, et ostsite kvaliteetse Mobilexi toote. Kasutusjuhendis on toote kirjeldus ja tähtis teave selle kasutamise kohta. Eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga tähtis need juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutussuunistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab oma tooteid pidevalt parandada ja täiustada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid ette teatamata.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma edasimüüja või Mobilex A/S-iga:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon:	+45 8793 2220
DK-8660 Skanderborg	Faks:	+45 8793 1777
Taani	E-post:	info@mobilex.dk

2. Ohutusnõuded

- Veenduge, et kõik abivahendit kasutavad isikud oleksid selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendi järgimata jätmisest tuleneva kahju ja/või vigastuse eest.
- Kasutage ainult laitmatu seisukorras olevat toodet.
- Puuduste või vigade avastamisel peate kohe pöörduma edasimüüja poole.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Võtke arvesse toote siidil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult siin kirjeldatud eesmärgil.
- Ärge seiske abivahendil.
- Vältige abivahendi juures konstruktsiooniliste muudatuste tegemist, välja arvatud juhul, kui teil on tootja kirjalik nõusolek selliste muudatuste tegemiseks.
- Abivahendi reguleerimisel peab kasutaja jälgima, et sõrmed või muud kehaosad ei saaks seejuures muljuda.
- Ärge ületage istme maksimaalset kandevõimet, mis on 110 kg. Ostukoti max kandevõime on 30 kg.
- Ärge kasutage abivahendit libedal aluspinnal
- Enne esmakordset kasutamist veenduge, et kõik kruvid oleksid kõvasti kinni keeratud.
- Ärge liigutage abivahendit, kui te sellel istute.
- Istumine on lubatud ainult nii, et teie mõlemad jalad on neljale tugijalale toetuva käru ees, rattad ei tohi maapinnaga kokku puutuda (vt joonist).

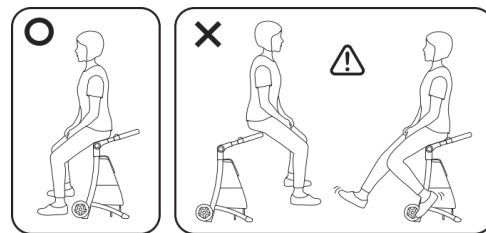

Tarnekomplekt

Abivahend tarnitakse pappkastis ja transportimise hõlbustamiseks kokkuklapitud olekus.

Iga pakend peab sisaldama:

- ostukäru osade komplekti, milles on üks käepide, üks käru alusraam, kaks rattast, üks ostukott;
- üks kasutusjuhend.

Esialgne kontrollimine


Veenduge, et kasti sisu vastaks eeltoodud loetelule. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke kohe ühendust oma tarnijaga.

3. Kirjeldus

Toote kirjeldus

Ostukäru Koala on alumiiniumist ja nailonist raam, millel on kaks rattast ja neli tugijalga. Selle peamine eelis on käepide, mida saab lihtsalt ümberlüüti abil kasutada istmena. Ostukott on kergesti eemaldatav.

Funktsiooni kirjeldus

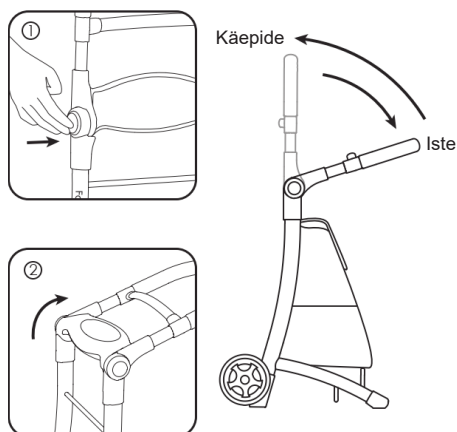


Käepideme/istme ümberlüüti

(vasakpoolne joonis)

Käepideme kasutamiseks istmena vajutage käepideme küljel olevat nuppu ja lükake seda edasi, kuni käepide blokeerub automaatselt. Käepidemele tagasilülitamiseks vajutage nuppu ja tõmmake seda uuesti tagasi, kuni see blokeerub taas automaatselt.

Montaaž (parempoolne joonis)

Lükake rattapesad alusraami põhjas olevatele torudele ja kruvige seejärel komplekti kuuluvate kruvidega torude külge. Tehke sama käepidemega mõlemal pool. Koti raami külge kinnitamiseks keeratakse takjakinnisega rihtmud ümber kolme selleks ettenähtud varva (üks käru jalgadele kõige lähemal, kaks tagaküljel).

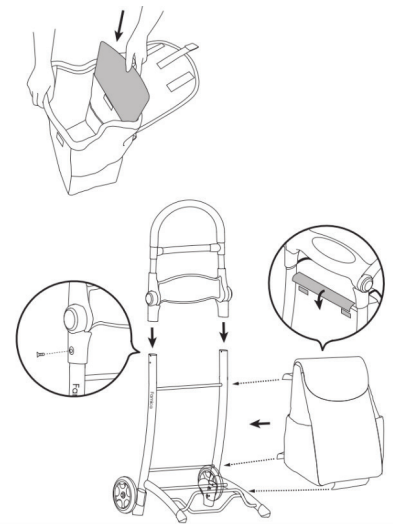

4. Tehnilised andmed

Ostukäru Koala	Art 319001+319002
Kõrgus	96 cm
Istumiskõrgus	65 cm.
Mass	2,5 kg
Koti max kandevõime	30 kg
Kasutaja max mass	110 kg
Raami/koti materjal	Alumiinium + nailon/nailonkangas

Tüübisilt



Tüübisildi näide

	QR-kood, link kodulehele		Tootmiskuupäev
	Tootja		Max koormus
	Lugege kasutusjuhendit		Max laius
	Kasutamiseks sise- ja välitingimustes		Seerianr
	Ostukorvi max kandevõime		Art-nr

Sümbolite tähendus

5. Hooldus ja korrashoid

Harilikku määrdumist saab eemaldada tavapärase puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset toote-teavet ja kasutage ainult kaubanduses müüdavaid vahendeid, mis sobivad puhastamiseks ning desinfitseerimiseks (ärge kasutage alkoholi sisaldavaid tooteid ega lahusteid või küürimisvahendeid).

Rattaid võib puhastada kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist tuleb rattalaagreid määrada õliga korrapäraselt või siis, kui rattad hakkavad kriuksuma.

Toode ei vaja põhimõtteliselt hooldust. Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavatele materjalidele toode siiski kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt kontrollida professionaalses hooldusettevõttes. Soovitame lasta:

- toodet puhastada;
- raami/toodet kontrollida, ega see ei ole paindunud, kahjustatud, kulunud või korrodeerunud;
- kontrollida osade kulumist ja vajaduse korral need välja vahetada;
- järelpingutada kruviühendusi.

Ladustamine: soovitame toodet hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C tugeva päikesevalguse eest kaitstult.

Transportimine

Abivahendit tuleb transportida stabiilses asendis ja kinnitatuna viisil, mis välistab transportimise ajal ootamatu ning ohtliku liikumise.

6. Tavalisemad probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Rattad ei pöörle	Rattad on mustad	Puhastage rattad

7. Toote jäätmekäitlus

Toodet ei tohi hävitada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia kohalikku ringlussevõtukeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S annab 2-aastase garantii kahjustuste puhul, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjalide defektidest. Garantii ei kehti toote mittesihipärase parandamise või kasutamise puhul. Tavapäraselt kuluvad osad ei kuulu garantii alla, välja arvatud juhul, kui kulumise põhjuseks on tootmisviga. Kui toodet on muudetud meie kirjaliku heakskiiduta, kaotavad toote CE-märgis ja garantii kehtivuse. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest oma edasimüüjat või otse ettevõtet Mobilex A/S. Garantii ei kata transpordikulusid ega hõlma isikuvigastuste või toote remondi ajal mittekasutamise hüvitamist. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi nõuete eiramisest.