

SWERECO

Kasutusjuhend

| | |
|--|--|
| Beta kõndimisraam Liikumisabivahend • Neljapunktiline tugi • Kõndimisraamid ja kõnnitoed | Art nr: 122220, 122210, 122200 |
|--|--|

Beta kõndimisraam on iseseisev kõnnitugi, mis on mõeldud kasutamiseks piiratud liikumisvõime, tasakaaluhäirete või kõndimisraskustega inimestele.

| Nimi | Beta kõndimisraam täiskasvanutele | Beta kõndimisraam noortele | Beta kõndimisraam lastele |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| Tootenumber | 122200 | 122210 | 122220 |
| Kõrgus | 85–97 cm | 73–85 cm | 60–72 cm |
| Möödud: laius × sügavus | 60 × 48 cm | 60 × 51 cm | 51 × 47 cm |
| Värvus | Alumiinium | Alumiinium | Lakitud sinine ja punane |
| Kasutaja maksimaalne kehakaal | 120 kg | 120 kg | 70 kg |
| Materjal | Alumiinium, PVC (käepide), kummi (otsakud) | | |
| Jäätmekäitlus | Metallijäätmed, pakend koosneb lainepapist. Sorteeritakse kooskõlas kohalike eeskirjadega. | | |
| Ladustamine | Toatemperatuuril | | |
| Tehniline eluiga | Viis aastat eeldusel, et toodet kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt. | | |
| Muu teave | Soovi korral võib Swereco pakkuda tootekoolitust/teavet. | | |

Ohutusjuhised

- Toode on mõeldud kasutamiseks kooskõlas juhistega ja ainult siseruumides tasasel pinnal. Swereco ei vastuta vigastuste ega probleemide eest, kui toodet kasutatakse, muudetakse või käsitsetakse viisil, mis ei ole kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga.
- Veenduge regulaarselt, et kõrguse reguleerimise nupud vetruksid tagasi. Kui on märke, et kõrguse reguleerimine ei toimi korrektselt, tuleb toote kasutamine viivitamata lõpetada ja saata see remonti/hooldusse.
- Veenduge, et kõik neli jalga oleksid toetumise ja liikumise ajal maapinnaga kontaktis. Kõndimisraami ei tohi kasutada vaipadel, mis võivad libiseda.
- Veenduge regulaarselt, et otsakud ei oleks kulunud ega kahjustatud. Kahjustunud või kulunud otsakud tuleb välja vahetada uute vastu, mida saab tellida Swerecost.
- Toodet ei tohi kasutada, kui alumiiniumtorudel on kahjustusi, nagu praod, deformatsioonid või muljutud osad, või kui kõnnitoel avastatakse muid kahjustusi.
- Toodet ei tohi koormata asjadega, nagu riided, kotid vms.
- Toodet ei tohi kasutada mänguasjana.
- Üle lävepakude liikumisel arvestage, et kõndimisraam tuleb tõsta üle lävepaku ja kõik neli jalga asetada põrandale korraga.
- Toote väljakirjutaja peab tegema riskianalüüsi kasutajakeskkonna kohta, kus toodet kasutada kavatakse.
- Toodet ei tohi libisemisohu tõttu kasutada märjal pinnal.
- Toodet ei tohi kasutada, kui käepidemel on kahjustusi, nt kui käepide on lahti või käib ringi.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
Kasutusjuhendi uusima versiooni saab alla laadida Swereco veebilehelt vastava toote vahekaardi alt. www.swereco.com
order@swereco.com • +46 (0) 850 005 240

Kasutusjuhised


Veenduge, et jalad oleksid sobitatud kasutajale sobivale kõrgusele ja et kõik neli jalga saaksid kasutamisel ühtlase koormuse. Enne kõrguse reguleerimist tuleb veenduda, et kõndimisraam asuks tasasel pinnal. Tähelepanu! Kõndimisraam on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides!

Kõrguse reguleerimine

1. Vajutage jalgadel paiknevatele kõrguse reguleerimisnuppudele ja reguleerige kõrgust, lühendades või pikendades jalgade alumist osa.
2. Peatuge sobiva kõrguse juures ja veenduge, et kõrguse reguleerimisnupud tuleksid uuesti avadest välja.
3. Reguleerige kõrgust samamoodi kõigil jalgadel ja veenduge, et kõndimisraam oleks põrandal tasakaalus.
4. Enne kasutamist kontrollige otsakuid. Kahjustunud või kulunud tugiotsikud tuleb uute vastu välja vahetada.

Toodet tuleb korrapäraselt ja vajadust mööda puhastada seebilahusega, mille pH = 5–9. Toodet võib ka puhastada 70%-lise isopropanooliga.

Toodet ei tohi puhastada etanooliga. Tõsiste tootedefektide/õnnetuste korral võtke ühendust tootja ja ravimiametiga.

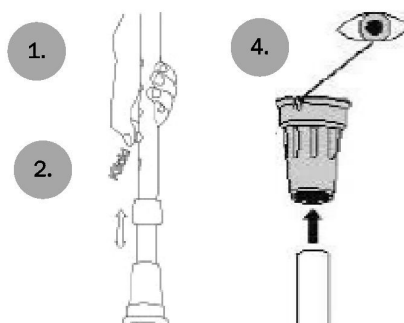

| Sümbolid | |
|----------|---|
| | Toote partiiinumber |
| | Toote aegumiskuupäev (5-aastane eluiga) |
| | Toote number: 122200, 122210, 122220 |
| | Tegemist on meditsiiniseadmega |
| | Toode on CE-märgistusega EL-i määruse 2017/745 kohaselt |
| | Tutvuge kasutusjuhendiga |
| | Tootja: Swereco AB Vagnvägen 4 364 42 Lenhovda |
| Max. kg | Kasutaja maksimaalne kehakaal toote kasutamisel |

Remondijuhised

Remondi käigus tuleb toodet kontrollida ja kulunud või kahjustunud osad välja vahetada.

Toodet võib desinfitseerida selleks ettenähtud seadmetes 3 minutit temperatuuril 85 °C. Toodet tuleb remontida igal kasutajavahetusel või vajaduse korral sagedamini.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda
Kasutusjuhendi uusima versiooni saab alla laadida Swereco veebilehelt vastava toote vahekaardi alt. www.swereco.com
order@swereco.com • +46 (0) 850 005 240