



RULAATOR JAGUAR

Art 312410, 312411, 312412, 312413, 312414, 312415, 312416, 312417

Kasutusjuhend



Tubane rulaator
Šampanjakollane
7" mustad rattad

Jaguari standard
Sinine, oranž ja violetne



SUPREME
Valge/puidukarva
7" hõbedased rattad

Jaguari standard,
kookupandav
Sinine, oranž ja violetne



 **Mobilex A/S**
Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg,
Taani,
www.mobilex.dk

Mobilex Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź
tel 042 214 2911
www.mobilex.pl

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
2. Ohutusnõuded	3
3. Kirjeldus	4
4. Tehnilised andmed	4
5. Hooldus ja korrashoid	5
6. Tavalisemad probleemid ja lahendused	5
7. Toote jäätmekäitlus.....	5
8. Garantiitingimused.....	5
9. Vastavusdeklaratsioon.....	5



1. Sissejuhatus

Täname, et ostsite kvaliteetse Mobilexi toote. Kasutusjuhendis on toote kirjeldus ja tähtis teave meditsiiniseadme kasutamise kohta. Selle eesmärk on aidata teil toodet õigesti ja ohutult kasutada. Enne toote kasutamist on väga tähtis need juhised hoolikalt läbi lugeda. Pöörake erilist tähelepanu ohutussuunistele ja järgige neid alati. Mobilex püüab oma tooteid pidevalt parendada ja täiustada. Seetõttu jätame endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ja tehnilisi andmeid neist ette teatamata.

Rulaatori ettenähtud kasutusala

See toode on meditsiiniseade, mis on mõeldud seismis- või kõndimisraskustega inimeste liikumisvõime parandamiseks. Rulaator võimaldab neil inimestel tagasi saada võime teha igapäevatoiminguid. Rulaator sobib inimestele, kes vajavad erinevate haiguste tõttu stabiilset kõndimisabi. Rulaatorit kasutatakse üksnes abivahendina seismisel ja kõndimisel. Mis tahes muul viisil kasutamine on keelatud.

Näidustused

Rulaator on meditsiiniseade, mis on mõeldud funktsionaalsete piirangutega inimeste abistamiseks. Kasutamistäidustused on liikumiskiiranguid ja puudeid põhjustavad haigused, mis takistavad iseseisvalt istumist, seismist ning kõndimist. Seega on ülaltoodud toimingute tegemisel vaja stabiilset lisatuge. Näidustusi ei ole võimalik seostada ühe kindla kliinilise pildiga. Need sõltuvad eriarsti või füsioterapeudi antud terviseseisundi hinnangust võimalikule kasutajale, kuid põhiline kasutajate sihtrühm on eakad ja patsiendid, kellel on parees, reumaatilised haigused või lülisamba lumbaalosa, põlve või puusade piiratud liikuvus. Toote kasutamine siin kirjeldatud erinevatel eesmärkidel on keelatud.

Vastunäidustused

Rulaatorid ei ole näidustatud isikutele, kes seistes ei suuda säilitada tasakaalu. Rulaatorit ei tohi kasutada siis, kui kasutajal on tajuhäired. Vastunäidustusi ei ole võimalik seostada ühe kindla kliinilise pildiga. Need sõltuvad võimaliku kasutaja terviseseisundi hinnangust. Kindla haiguspildiga sobiva ortopeedilise abivahendi valik tuleb alati teha eriarsti või füsioterapeudi abiga. Veel tuleb arvestada 2. punktis toodud ohutusteavet.

Kasutusala

Toodet saab kasutada koduhoolduses, tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse asutustes ning haiglates.

Meditsiinilised vahejuhtumid ja soovimatud tagajärjed

Rulaatoriga seotud soovimatute sündmuste korral võtke ühendust edasimüüja või tootjaga:

Mobilex A/S		
Grønlandsvej 5	Telefon	+45 8793 2220
DK-8660 Skanderborg	Faks	+45 8793 1777
Taani	E-post	info@mobilex.dk

2. Ohutuspõhised

- Tagage, et kõik rulaatorit kasutavad isikud oleksid selle kasutusjuhendi läbi lugenud.
- Tootja ei vastuta kasutusjuhendi järgimata jätmisest tuleneva kahju ja/või vigastuse eest.
- Kasutage ainult laitmatus seisukorras olevat toodet.
- Puuduste või vigade avastamisel lõpetage kohe rulaatori kasutamine ja pöörduge edasimüüja poole.
- Järgige kõiki tootja soovitusi ja hoiatusi.
- Võtke arvesse toote sildil olevat teavet.
- Kasutage toodet ainult siin kirjeldatud eesmärgil.
- Ärge ronige abivahendile.
- Vältige abivahendi ehituse muutmist, välja arvatud juhul, kui tootja on selliseid muutusi kirjalikult lubanud.
- Rulaatorit ei tohi koormata suurema kaaluga, kui on märgitud tehniliste andmetes.
- Kõik rattad PEAVAD kasutamise ajal olema PIDEVAS kokkupuutes maapinnaga. See tagab rulaatori hea tasakaalu ja õnnetuste vältimise.
- Olge ettevaatlik rulaatori mis tahes osade kokkupanekul või reguleerimisel.
- Kontrollige alati enne kasutamist, kas pidurid toimivad nõuetekohaselt.
- Kasutage rulaatorit ainult siis, kui see on täielikult lahti klapitud ja lukustusseade on aktiveeritud.
- Rulaatorit on lubatud kasutada ainult siseruumides siledal stabiilsel pinnal.
- Kui rulaatorit ei kasutata, peavad seisupidurid olema alati rakendatud.

Tarnekomplekt

Rulaator tarnitakse pappkastis. Pakendis on:

- ✓ 1 rulaator,
- ✓ 1 alus,
- ✓ 1 kasutusjuhend.

Esialgne kontrollimine

Kontrollige ülaltoodud nimekirja alusel kasti sisu. Kui avastate selles etapis, et mõni osa puudub või on kahjustatud, võtke kohe ühendust oma tarnijaga.

3. Kirjeldus

Toote kirjeldus

Jaguari rulaatoril on pulbervärvitud alumiiniumraam. Raam on hea manööverdamisvõimega, stabiilne ja kasutajaga sobitumiseks reguleeritava kõrgusega lükkamiskäepidemega. Pidureid on võimalik kasutada kõndimise ajal ja seisupiduritena. Korvi kasutades ei pea asju käes tassima.

Rulaator koosneb järgmistest osadest:

1. lükkamiskäepide,
2. piduri käepide,
3. käepideme kõrguse reguleerimisklamber,
4. kokkuklappimise lukustusnupp,
5. pidur,
6. tagumine 7" ratas,
7. seisupiduri klamber,
8. lauake,
9. lukuga tasku,
10. korv,
11. esimesed pöörlevad 7" rattad.



Kokkupaneku kirjeldus

See abivahend ei vaja koostejuhist.

Funktsiooni kirjeldus

Raami kokkuklappimine/lahtiklappimine

Raami lahtiklappimiseks tõmmake raami tagaosa tahapoole. Suruge õrnalt käepidet alla, kuni raam avaneb täielikult ja kostub „klõps“, mis tähistab rulaatori lukustumist lahtiklapitud asendis. Nüüd saate asetada korvile aluse. Raami kokkuklappimiseks võtke alus ära ja vajutage kokkuklappimise lukustusnupule. Tõmmake raami tagaosa sissepoole.

Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimine

Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimiseks avage mõlemad kõrguse reguleerimisklambrid ja nihutage käepide soovitud asendisse. Lukustage kõrguse reguleerimisklambrid. Mõlemad käepidemed peavad alati olema ühel kõrgusel.

Pidurid

Piduri käepidet järk-järgult kõvemini tõmmates saate pidureid tasapisi aktiveerida. Pidurid on täielikult aktiveeritud, kui saate piduri käepideme seisupiduri klambriga lukustada ja rulaator on täielikult peatunud. Piduri vabastamiseks laske piduri käepide lahti.

Rulaatoril on ka seisupidur. Seisupiduri aktiveerimiseks tõmmake piduri käepidet ja lukustage see seisupiduri klambriga saavutatud asendisse. Seisupiduri vabastamiseks vabastage piduri käepide ja viige see tagasi neutraalasendisse.

Suruge seisupiduri käepide alla (mudel 312415)

Jaguar SUPREME abivahendil aktiveeritakse seisupidur, kui suruda piduri käepide alla, ja vabastatakse, kui tõmmata see tagasi neutraalasendisse.

HOIATUS! Rakendage alati seisupidur, kui te rulaatorit ei kasuta! Kui rulaator ei paikne horisontaalsel aluspinnal, peate alati rakendama seisupiduri!




Tarvikud

Rulaatori jaoks puuduvad tarvikud.

4. Tehnilised andmed

Rulaator Jaguar	Art 312410-14+16+17 Erinevad värvid	Art 312415 SUPREME
Kõrgus (reguleeritav lükkamiskäepide)	83,5–94,5 cm	90,3–96 cm
Laius	54,5 cm	56,5 cm
Pikkus (sügavus) kokkuklapituna/lahtisena	66/27 cm	66 cm / 27 cm
Mass	6,3 kg	6,0 kg
Kasutaja max kehamass / koti kandevõime	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Pidurid	Kaks lukustatavat pidurit koos seisupiduri funktsiooniga	
Rataste mõõtmed (esi- ja tagarattad)	175 x 27 mm	

Andmesilt

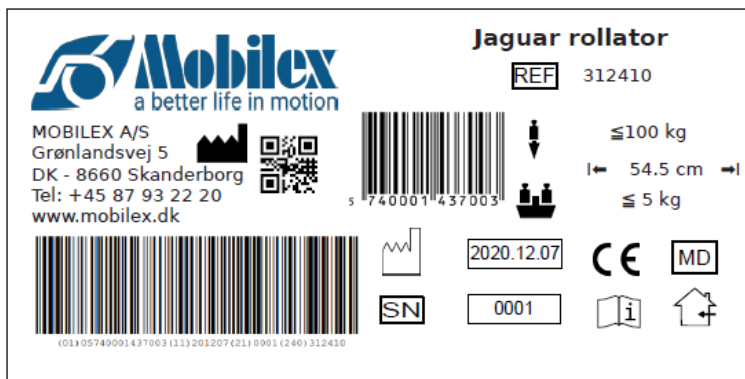

Andmesildi näide

	QR-kood, link kodulehele		Tootmis-kuupäev
	Tootja		Max kandevõime
	Lugege kasutusjuhendit		Max laius
	Kasutada ainult siseruumides		Seerianr
	CE-tähisega toode		Art-nr
	Koti max kandevõime		Meditsiini-seade

Sümbolite tähendused

5. Hooldus ja korrashoid

Harilikku määrdumist saab kõrvaldada tavapärase puhastusvahendite ja käsna või pehme lapiga. Kontrollige konkreetset tooteteavet ja kasutage puhastamiseks ainult kaubanduses müüdavaid sobivaid puhastusvahendeid. Kasutage desinfitseerimiseks ainult kohapeal müüdavaid meditsiiniseadmete kasutamiseks sertifitseeritud desinfitseerimisvahendeid.

Rattaid võib puhastada kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist tuleb rattalaagreid õlitada regulaarselt või siis, kui rattad hakkavad kriuksuma.

Vaatamata tugevale konstruktsioonile ja vastupidavate materjalide kasutamisele toode siiski kulub. Seetõttu on soovitatav lasta toodet regulaarselt kontrollida professionaalses hooldusettevõttes. Soovitatavad hooldustoimingud:

- ✓ toote puhastamine ja desinfitseerimine,
- ✓ raami kontrollimine paindumise, kahjustuse, kulumise või korrosiooni suhtes,
- ✓ vajaduse korral kuluvate osade kontroll ja vahetamine,
- ✓ kõikide osade ühenduste tugevdamine.

Soovitatav kasutusiga: tavaliselt 10 aastat, sõltub kasutuse intensiivsusest.

Ladustamine: soovitame hoida kuivas kohas temperatuuril üle 0 °C.

Transportimine

Soovitatav on rulaator transportimiseks kokku klappida. Rulaatorit tuleb transportida stabiilses asendis ja kinnitatuna viisil, mis välistab transportimise ajal ootamatu ning ohtliku liikumise.

Korduskasutus

Toode sobib korduskasutamiseks. Enne kui uus kasutaja võtab toote kasutusele, tuleb rulaator tehniliselt üle vaadata ja desinfitseerida 5. punkti kohaselt.

6. Tavalisemad probleemid ja lahendused

Probleemid	Võimalikud põhjused	Lahendused
Rulaatorit on raske juhtida või lükata	Ratta ja kahvli vahel on mustus	Kõrvaldage ratta ja kahvli vahel olev mustus
Pidurid ei toimi korralikult või toimivad üksnes ühel poolel.	Piduriklotsid on kulunud või ei ole pidurid õigesti reguleeritud	Reguleerige pidurid Vahetage vajaduse korral piduriklotsid (→ hoolduskeskus)

7. Toote jäätmekäitlus

Toodet ei tohi saata jäätmekäitlusesse koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia kohalikku utiliseerimiskeskusesse.

8. Garantiitingimused

Mobilex A/S annab 2-aastase garantii kahjustuste puhul, mis on põhjustatud tootmisvigadest või materjali defektidest. Garantii ei kehti toote mitteotstarbelise remondi või kasutamise puhul. Tavapäraselt kuluvad osad ei kuulu garantii alla, välja arvatud juhul, kui kulumise põhjuseks on tootmisviga. Kui toodet on muudetud meie kirjaliku heakskiiduta, kaotavad toote CE-märgis ja garantii kehtivuse. Selle garantiiga hõlmatud tootekahjustuste korral teavitage sellest oma edasimüüjat või otse ettevõtet Mobilex A/S. Garantii ei kata transpordikulusid ega hõlma hüvitist isikuvigastuste või toote mittekasutamise eest remondi ajal. Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad kasutusjuhendi nõuete eiramisest.

9. Vastavusdeklaratsioon

Rulaator on läbinud vastavushindamise ELi määruse MDR 2017/745 alusel meditsiiniseadmete kohta ja sel on CE-märgistus. Toote kohta välja antud vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil:

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_jaguar_indendoers_rollator__312410_11_12_13_15__8501.pdf

või paremal oleva QR-koodi kaudu.

