

# Kasutusjuhend

## Käetugi vannile

Toote nr 12400



Versioon 01.2015

### Pehme käepidemega käetugi vannile

#### Otstarve

Käetoe abil saab turvaliselt vanni minna ja sellest välja tulla. Abivahend kinnitatakse lihtsalt tõstetava ja tõmmatava kinnituskruviga.

#### Kokkupanek

1. Koht, kuhu abivahend asetatakse, peab rasvast ja seebijääkidest puhas olema.
2. Keerake kinnituskruvi 1 vastupäeva lahti.
3. Seejärel asetage käetugi vanniservale (kinnituskruviga väljapoole).
4. Siis tuleb abivahendi kinnitamiseks keerata kinnituskruvi päripäeva.
5. Veenduge, et käetugi on kindlalt kinni. Selleks võite seda raputada, sellele toetuda jne.
6. Abivahendit tohib kasutada ainult siis, kui see on piisavalt stabiilne.

1. Kinnituskruvi  
Hoidjad



#### Tehnilised andmed

Toote nr 12400 / pehme käepidemega vanniabivahend

Materjal	Pulbervärvitatud terastoru	Käepideme kõrgus vanni servast	u 36 cm
Värv	valge / must	Kaal	u 1,5 kg
Kõrgus	u 49 cm	Maksimaalne koormus	u 100 kg
Laius	u 19 cm	Maksimaalne vanniserva paksus	u 16 cm

#### Puhastus ja hooldus

Käetuge saab puhastada kauplustes müüdavate puhastusvahenditega, mis ei sisalda õlisid ega rasvu.

**Tähtis!** Desinfitseerimisvahendite kasutamisel järgige tootja antud juhiseid.

- ✓ **Nõuanded turvalisuse tagamiseks**
- ✓ Kasutaja kehakaal võib olla kuni 100 kg.
- ✓ Enne igat kasutuskorda kontrollige, kas vanniabivahend on ikka kindlalt paigas.
- ✓ Ärge kasutage õliseid ega rasvaseid vannilisandeid. Libisemisoht!
- ✓ Kasutage ainult originaalvaruosi.

#### Garantii

Vastab seadustes kehtestatud nõuetele.

Garantii ei hõlma ebasihipärasest kasutusest tingitud vigastusi, normaalset kulumist ega vigu, mis ei mõjuta oluliselt seadme väärtust või kasutuskõlblikkust.

Tehnilised muudatused ja lisad ning tarbetud hooldustööd muudavad nii garantii kui ka üldise tootjavastutuse kehtetuks.

Jätame endale õiguse teha tehnilise parenduse eesmärgil muudatusi.

