

Potikõrgendus käetugedega

Kowsky

Toote kood: ETTE2

Tehnilised andmed

Kõrgus käetugedeta 20 cm

Kõrgus käetugedega 36 cm

Laius käetugedeta 46 cm

Laius käetugedega 61 cm

Sügavus 50 cm

Kaal 6 kg

Max kasutaja kaal 120kg



Lugege juhend enne potikõrgenduse kasutamist põhjalikult läbi!

Kõrgendus sobib nii seinale kui ka põrandale kinnituvatele tualetipottidele.

Kõrgendust ei või kasutada eraldi, st seda võib kasutada ainult tualetipotile kinnitatult.

Tähelepanu!

Inimesed, kes on raskemad kui 120 kg, ei tohi seda potikõrgendust kasutada.

Ohutus

- Potikõrgendust tohib kasutada ainult selle otstarbele vastavalt. Selle otsas ei tohi turnida ega mängida.
- Enne kui te kõrgendust kasutate, veenduge, et see on tehniliselt korras. Kahjustunud kõrgendus eemaldage tualetipotilt.
- Toote konstruktsiooni ei tohi ümber ehitada ega muul viisil muuta. Kasutada tohib ainult tootja pakutud lisasid ja varuosi.
- Potikõrgenduse paigaldamisel kasutage ainult sobivaid tööriistu.
- Paigaldage kõrgendus ainult siis, kui te olete kindel, et te oskate vastavaid tööriistu kasutada.

Pakendis on

1 x tualetipotikõrgendus...

...koos kinnitusdetailidega:

2 x kinnitusmutter (M8)

2 x kinnitusklamber

2 x keermelatt (M8 x 140 mm)

1 x toru

2 x kinnitusnupp (M8 x 12 mm)

2 x käetugi

Puhastamine

- Puhastamiseks ei tohi kasutada teravaid esemeid (nt nuga) ega tugeva toimega puhastusvahendeid (nt valgendi, küürimispasta).
- Kergema mustuse või tolmu võib eemaldada niiske lapiga.
- Suurema mustuse korral võib kõrgendust pesta õrnatoimelise puhastusvahendiga.

Hooldus

Potikõrgendus on hooldusvaba, kuid te võiksite siiski aeg-ajalt kontrollida, et kõrgendusel ei esineks kahjustuste märke.

Kahjustunud kõrgendus tuleb tualetipotilt eemaldada ning kahjustunud osad asendada.

Kontrollige, et

- detailid ei oleks roostetanud, kulunud, mõranenud või muul viisil deformeerunud;
- kõik ühenduskohtad (mutrid, poldid) oleks korralikult kinnitatud, toimiks ning ei segaks istumist.

Ümbertöötlemine

Kehtivad tavalised taaskäitluse võtted.

Metallist detailid eraldada plastikust, seejärel käidelda materjale eraldi.

Tagumise toru kõrguse seadmine

- Eemaldage sobivatelt aukudelt kruvikeeraja abil kattekorgid.
- Keerake mõlemad kinnitusnupud lahti (vastupäeva) ning võtke need küljest.
- Asetage tagumine toru õigesse auku ning keerake kinnitusnupud kinni (päripäeva).
- Tühjad augud katke uuesti korkidega.

Esimese toru kõrguse seadmine

- Eemaldage toru poldi kattekork kruvikeeraja abil.
- Võtke ka selle augu kork ära, kuhu te soovite toru paigaldada.
- Keerake toru kinnituspoldid lahti, kasutades 13 mm mutrivõtit.
- Asetage toru uutesse aukudesse ning keerake poldid uuesti kinni.
- Katke poldid ja vabad augud korkidega.

Tähelepanu! Mõlemad torud peavad jääma samale kõrgusele.

Potikõrgenduse paigaldamine

Ettevalmistus

- Eemaldage tualetipotilt nii prill-laud kui ka kaas.
- Keerake potikõrgenduse kinnitusmutrid küljest.

Paigaldamine

- Asetage kõrgendus tualetipotile.
- Liigutage kõrgenduse kinnitusklambreid nii, et need jääks prill-laua paigalduseks mõeldud aukudega kohakuti. Jälgige, et klambrite augud jääksid kõrgendusest tahapoole.
- Lükake poldid aukudest läbi.
- Veenduge, et kõrgendus on otse, ning keerake kinnitusmutrid poltide otsa. Keerake mutrid kinni, kuid mitte liiga kõvasti – mutrid võivad puruneda.
- Kõrgenduse paigaldamisel vaadake, et prill-lauda ja kaant oleks võimalik üles tõsta. Prill-laud ja kaas peavad ülestõstetult jääma suurema nurga alla kui 90°.

Käetoed

Käetugesid saab vajadusel üles tõsta, et kasutajal oleks lihtsam potile istuda või potilt tõusta. Samuti saab puhastamise kergendamiseks käetoed eemaldada.

Käetugede paigaldamine

- Lükake käetugi kõrgenduse küljel olevasse auku. Vajutage käetoe nupp sisse ning lükake käetugi lõpuni auku.
- Keerake käetuge niiviisi, et see jääks kõrgenduse küljel olevale hoidjale toetuma.
- Korrake sama teise käetoega.

Käetugede eemaldamine

- Keerake käetugi hoidjalt üles.
- Vajutage potikõrgenduse tagant käetoe nupp sisse, tõmmake käetuge väljapoole kuni see tuleb küljest.
- Korrake sama teise käetoega.

Potikõrgenduse ülestõstmine

Et tualetipotti oleks lihtsam puhastada, saab potikõrgendust üles tõsta, ilma et peaks seda eemaldama.

- Ülestõstmiseks
 1. Eemaldage käetoed.
 2. Keerake mõlemaid kinnitusnuppe veidi lahti (vastupäeva) ning lükake kõrgendus üles.
- Allalaskmiseks
 1. Liigutage kõrgendus alla tagasi.
 2. Keerake kinnitusnupud kinni.

Kõrguse reguleerimine

Potikõrgendust saab seada kolmele eri kõrgusele. Selleks tuleb nii esimene kui ka tagumine toru eemaldada ning paigaldada need sobivatesse aukudesse.

Jälgida tuleb, et mõlemad torud jääks samale kõrgusele.

Istumiskõrgused

- | | |
|-----------------|--------|
| a) Ülemine auk | 80 mm |
| b) Keskmine auk | 120 mm |
| c) Alumine auk | 160 mm |

Vaja läheb järgmisi tööriistu:

- | |
|----------------------|
| 1 lapik kruvikeeraja |
| 1 mutrivõti 13 mm |