

## Potitool Stacy

### Vermeiren

Paigaldage seljatugi potitooli tagaosas olevatesse torudesse, kasutades seljatoel olevaid nuppe. Veenduge, et nupud oleks kindlalt aukudes.

Libistage pott eestpoolt potihoidjasse. Enne istumist veenduge, et pott on korralikult paigale asetatud.

Kohandage potitooli kõrgust kasutades jalgadel olevaid nuppe. Veenduge, et nupud oleks kindlalt aukudes. Enne kasutamist veenduge, et kõik jalad oleks seatud samale kõrgusele.

Käetugesid on võimalik liigutada. Käetoel allapööramiseks vajutage käetoel olevat nuppu. Olge oma sõrmedega ettevaatlik. Tõmmake käetugi uuesti ülemisse asendisse. Klõpsatus on märgiks, et käetugi on fikseerunud.

! Kui te ei ole kindel kuidas toodet kasutada, küsige abi.

! Kasutaja kaal: 100 kg

Potitooli Stacy võib puhastada koduste puhastusvahenditega. Puhastamisel mitte kasutada tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

### Andmed:

- laius: 53 cm
- pikkus: 48 cm
- kõrgus (kaas üleval): 81 cm
- istme kõrgus: 44 cm
- kõrgus reguleeritav: 15 cm
- istmelaius: 45 cm
- istmesügavus: 45 cm
- käetoel kõrgus: 25 cm
- seljatoel kõrgus: 24 cm
- kaal: 8,6 kg

Nupp käetoel  
liigutamiseks

