

## Potitool OPEN (301523, 301524, 301526)

### Ohutusjuhised:

- Ära hoia tooli välistingimustes, samuti ära jäta seda kauaks päikese kätte. (NB! Kuuma ilmaga ära jäta tooli kauaks autosse!)
- Hoia tooli kõrgete (38°C või kõrgem) või madalate (alla 0°C) temperatuuride eest.
- Enne kasutamist kontrolli hoolikalt tooli osi (kruvid, torud, istumisplaat).
- Kruvide kinnitust tuleks kontrollida regulaarselt.
- Kasuta ainult potitoolina, ära proovi sellel seista.
- Veendu, et tooli kasutades ei ületataks sellele ette nähtud maksimaalset kasutaja kaalu.
- Ära proovi tooli ümber ehitada, parandamiseks kasuta ainult originaalvaruosi.
- Kontrolli tooli sobivust enne selle kasutuselevõttu, vajadusel pea nõu terapeudiga.
- Tasakaalukaotuse vältimiseks ära ürita end toolist välja kallutada.
- Enne kasutuselevõttu veendu, et kõik kinnitused oleksid lukustunud.
- Ära riputa toolile lisavarustust.
- Kui tooli ei ole pikemat aega kasutatud, tuleks ta enne uut kasutust üle kontrollida.
- Ära eemalda siibrit ajal, kui patsient toolil istub!
- Kasuta tooli ainult tasasel ja kõval pinnal.
- Ära istu käetugedele!

### Kasutamine:

- Tooli kasutamist lase selgitada ainult pädeval spetsialistil.
- Veendu, et oled selgitustest aru saanud ja ära häbene üle küsida!
- Siibri paigaldamiseks/eemaldamiseks on kaks võimalust:
  - Istme alt toolist vasakult või paremalt, libistades selle raamile.
  - Tõsta istmeplaat üles ja tõsta siiber välja.
- Transpordiks kata siiber alati komplektis oleva kaanega.
- Istmeplaati on puhastamiseks lihtne eemaldada, see kinnitub raamile kahe klambriga.
- Potitooli saab kasutada tavalise toolina, kattes istmes oleva augu komplektis oleva kattega.
- Puhastamine: Istet tuleks regulaarselt puhastada, kasutades pehmet pehmet pesuvahendit ja pehmet lappi.
- Maksimaalne lubatud kasutaja kaal on 130 kg.

