

## Potitool Robust, Swereco

Toote kood: 144400, 144975

### Ohutus

- Toodet tohib kasutada ainult vastavalt sellele ette nähtud funktsioonile.
- Potitooli kaant ei tohi kasutada seljatoena.
- Vältimaks õnnetusi, tuleb tool enne kasutamist asetada kindlale tasasele pinnale, nii et see toetuks kõigile neljale jalale.
- Tooli ei tohi liigutada koos sellel istuva kasutajaga.
- Enne kasutamist tuleb kontrollida, et tooli kummiotsikud oleks terved. Katkiste otsikute korral on oht koos potitooliga libiseda. Purunenud ja kulunud otsikud tuleb vahetada uute vastu.
- Enne kasutamist kontrollige, et jalgade kinnitusklambrid oleks korralikult paigaldatud (laste mudel 144975).



### Kasutamine

Toode on mõeldud kasutamiseks tualetipoti kõrgendamiseks (sel juhul kasutatakse koos kõriga), lihtsustades nii viisi tualetis käimist. Toodet võib kasutada ka eraldi koos ämbriga.

Potitooli konstruktsioonis on kasutatud suurema läbimõõduga torusid, mistõttu sobib potitool suurema kehakaaluga kasutajale.

Kõrguse reguleerimine (ainult lastele mõeldud mudel 144975): eemaldage jala kinnitusklamber, tõmmake jalga pikemaks või lükake seda sissepoole, paigaldage klamber tagasi nii et käib klõpsatus. Toimige nii kõigi jalgadega.

Toodet tuleks regulaarselt puhastada (vähemalt kord kuus) seebi ja veega, pH 5-9.

### Andmed

Täiskasvanutele 144400	Lastele 144975
Laius käetugede vahelt: 67 cm	Laius käetugede vahelt: 32,5 cm
Kõrgus: 55 cm	Kõrgus reguleeritav: 34,5-44,5 cm
Käetoe kõrgus istmest: 23 cm	Käetoe kõrgus istmest: 18 cm
Iste: 45x36 cm	Iste: 28,5x25 cm
Ämbrihoidiku laius laiemast kohast: 22 cm	Ämbrihoidiku laius laiemast kohast: 23 cm
Ämbrihoidiku pikkus: 35 cm	Ämbrihoidiku pikkus: 27 cm
Kaal: 12,4 kg	Kaal: 3,6 kg
Max kasutaja kaal: 300 kg	
Materjal: teras, PE (iste), TPE (kummiotsikud)	