

Potikõrgendus Clipper III, Herdegen

Kasutamine ja ohutus

Potikõrgendus on varustatud kaane ning nelja fikseerimisklambriga.

Potikõrgenduse paigaldamiseks toimige järgmiselt: tõmmake fikseerimisklambreid väljapoole, asetage potikõrgendus tualetipotile, seejärel lükake fikseerimisklambrid ükshaaval tihedalt vastu tualetipotti.

Olles potikõrgenduse paigaldanud, veenduge, et see oleks stabiilne ning ei oleks kukkumisohtu.

Potikõrgendus sobib enamiku tualetipottidega.



Hooldus

Potikõrgendust tuleks regulaarselt puhastada vee ja seebiga, kasutada võib ka kloorivabu puhastusvahendeid.

Kõrgendab tualetipotti 11 cm võrra.

Max kasutaja kaal: 185 kg

Materjal: PP