

### **Kasutamiseesmärk**

Peatsikõrgendust kasutatakse voodis madratsi kõrgemale ja madalamale liigutamiseks. Peatsikõrgendus asetatakse madratsi ja kattedmadratsi vahele.

### **Enne esmakordset kasutamist**


Enne peatsikõrgenduse kasutamist/paigutamist palume kontrollida, ega tootel pole mingeid kahjustusi.

Palun kontrollige, et kõik kruvid oleksid olemas ja korralikult kinni keeratud, vastasel juhul ärge kasutage peatsikõrgendust.

### **Kõrguse reguleerimine**

Võimalus muuta peatsikõrgenduse kallet, võimalik 6-kordne kalle.

kalde reguleerimisseade

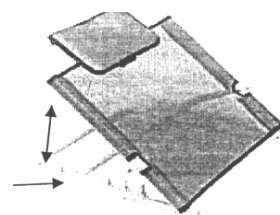

Peatsikõrgenduse kallet tohib muuta ainult siis, kui voodis pole kedagi.

### **Hooldus ja puhastamine**

Peatsikõrgendus ei nõua mingit erilist hooldust.

Puhastamiseks võite kasutada kõiki plastikule mõeldud puhastusvahendeid.

### **Desinfektsioon**

Peatsikõrgenduse desinfektsiooniks võib kasutada standardseid desovahendeid, mis sobivad plastikule.

### **Tähtis**

Desovahendite kasutamise korral järgige palun tootjapoolset kasutusjuhendit.

### **Tehnilised andmed**

Maks. koormustaluvus: 50 kg

Suurus: 50 x 63 cm

Kaal: 3 kg

### **Ohutusnõuanded**

- Palun vaadake, et peatsikõrgendus oleks stabiilselt asetatud ja et see ei saaks tahapoole libiseda!

- Peatsikõrgenduse kallet muutke ainult siis, kui kedagi pole voodis.

### **Garantii**

Vastavalt seadusest tulenevatele garantiinõuetele. Garantii alla ei kuulu: kahjustused ebaõige kasutuse korral, normaalne kulumine ja kasutamine ning vead, mis mõjutavad seadme väärtust ja kasutuskõlblikkust väga vähe.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi, et parandada toote tehnilist külge.