

Kirjeldus:

Asetada voodipeatsi juurde. Sobib patsientidele, kelle vaagnavöö on piiratud funktsiooniga või kes suudavad veel ise ülakeha ja ülemisi jäsemeid liigutada, iseseisvaks istukile tõusmiseks voodis, istmiku tõstmiseks (siibri kasutamine), istumiseks ratastooli, potitoolile jne.

Montaaž:

Detailid panna kokku nii, nagu on näha pildil.

Ohutusnõuanded:

Voodiohjasid ei tohi kiigutada. Detaile tohib panna kokku ainult nii, nagu on pildil näidatud. Seadet võib kasutada üksnes tasasel, kindlal pinnal.

Puhastamine:

Puhastada tavaliste deso- ja puhastusvahenditega. Palun järgige tootjapoolset kasutusjuhendit.

Hooldus:

Vähemalt üks kord aastas kontrollida, kas raamistikul on deformatsioone ja pragusid. Kontrollida, kas käepideme rihmal on kahjustusi. Vigastatud detailid tuleb välja vahetada.

Tehnilised andmed:

Maks. kandejõud: 100 kg
Seismiseks vajaminev pind: 32,5 x 75 cm
Kõrgus: 170 cm
Kaal: 11 kg

Garantii ja tootja vastutus:

Me anname voodiohjadele 2 aastase garantii. Garantii kaotab kehtivuse, kui voodiohjasid või nende detaile on parandanud või muutnud selleks mittevastavad inimesed. Tootja vastutus on sellisel juhul välistatud. Tootja ei vastuta järgmistel juhtudel, kui viga on saanud isikud, esemed ja loomad:

- seadme väär kasutamine
- asjatundmatute inimeste kasutamine
- detailide või lisadetailide asjatundmatu paigaldamine
- ilma tootjapoolse eelneva nõusolekuta muutmine või sekkumine
- originaalvaruosade või -lisaosade mittekasutamine
- montaažijuhendis ettenähtud instruktsioonide mittejärgimine
- ebaharilikud juhtumid

