

Libistamislaud Swereco

Kauba kood 118900

Kuidas toodet kasutada

Libistamislaud on mõeldud istuvate patsientide transpordiks, nt ratastoolilt autoistmele.

Laual võib end libistada kasutaja, kelle kaal ei ületa 120 kg.

Ohutus

Pindade vahe, millele libistamislaud asetatakse, ei tohi olla suurem kui 20 cm.

Ärge unustage libistamislauale kinnitada libisemisvastast teipi, et vältida lauaga kukkumist.

Enne libistamist veenduge, et laud on stabiilses asendis.

Kui hakkate libistama veerevalt objektilt, veenduge, et see ei hakkaks liikuma. Nt ratastooli puhul tuleb rakendada pidurid.

Andmed

Max kasutaja kaal 120 kg

Laius 35 cm

Pikkus 64 cm

Paksus 4,5 mm

Kaal: 780 g

