

Stepless kaldtee

1. Eesmärk ja kasutamine

1.1. Tootja *

V. Guldmann A/S

1.2. Eesmärk ja kasutamine

Eesmärk

Stepless kaldteed on kõrge kvaliteediga transporditavate kaldteede seeriast ja on mõeldud ratastooli kasutajatele suurema kui 60 cm kõrguste vahe ületamiseks.

Stepless kaldteed on saadaval kahes põhilises versioonis: laiad kaldteed, nii fikseeritud kui ka kokkupandavad mudelid ja kitsad kaldteed, saadaval fikseeritud, pikendatava kui ka kokkupandava mudelina. Kõik kaldteed on varustatud käepidemetega, äärekõrgendustega, mis on kaetud mittelibiseva kummimaterjaliga.

Kasutamine

Tavalised ja laiad tavalised kaldteed

Kui pannakse üles kitsast kaldteed, asetatakse kaldtee kaks osa paralleelselt teineteise kõrvale kaugusesse, mis vastaks ratastooli rataste vahelisele laiusele. Kaldtee tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud selle kindel kontakt pinnaga, kuhu seda asetatakse. Kaldteed võib asetada maksimaalse nurga 1:5 all, kui tegemist on elektrilise ratastooli või abistaja poolt lükatava ratastooliga ja maksimaalse nurga 1:7 all, kui tegemist on kasutaja poolt manuaalselt opereeritava ratastooliga.

Teleskoopiline kaldtee

Kui paigaldatakse kitsast kaldteed, asetatakse kaldtee kaks osa paralleelselt teineteise kõrvale kaugusele, mis vastaks ratastooli rataste vahelisele laiusele. Kaldtee tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud selle kindel kontakt pinnaga, kuhu seda asetatakse. Kaldtee asetatakse maksimaalselt 1:5 nurga all, kui tegemist on elektrilise või abistaja poolt opereeritava ratastooliga ja masimaalselt 1:7 nurga all, kui tegemist on kasutaja poolt manuaalselt juhitava ratastooliga. Kaldtee pikendamiseks tuleb hoida kaldteed käepidemest ja tõmmata see välja kogupikkuses.

Tähtis!

Ärge üritage elektrilist ratstooli, mis on lakanud töötamast kaldtee keskel, sealsamas käivitada. Selle asemel tuleks laskuda alla ja üritada uuesti kaldteed mööda üles minna. Keskel peatunud ratastooli käivitamisel sealsamas kohas võivad kaldtee teleskoopilised pinnad tahtmatult nihkuda.

Kokkupandavad ja laiad kokkupandavad kaldteed

Kitsa kaldtee paigaldamisel asetatakse kaldtee kaks osa paralleelselt teineteise kõrvale kaugusele, mis vastaks ratastooli rataste vahelisele laiusele. Kaldtee tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud selle kindel kontakt pinnaga, kuhu seda asetatakse. Kaldtee asetatakse maksimaalselt 1:5 nurga all, kui tegemist on elektrilise ratastooliga või abistaja poolt opereeritava ratastooliga ja maksimaalselt 1:7 nurga all, kui tegemist on kasutaja poolt manuaalselt juhitava ratastooliga.

Tähtis!

Pange kaldtee kokku, hoides mõlemast käepidemest. Vältimaks paigaldaja kehaosade jäämist kokkupandava kaldtee vahele, hoidke ennast paigaldamisel kaldteest kaugemale ja hoidke kinni ainult käepidemest.

1.3. Tähtis/Hoiatus

- enne paigaldamist lugege läbi kogu instruksioon
- ärge ületage kaldtee instruksioonis määratud piirkoormust
- ratastoole tuleb üles-alla lükata aeglaselt
- kaldtee tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud kindel kontakt pinnaga
- kokkupandavad kaldteed tuleb kokku panemise hetkel hoida endast kaugemale vältimaks kehaosade jäämist kaldtee vahele

1.4 Lahti pakkimine ja kaldtee ettevalmistamine

Kui teile visuaalselt hakkab silma mingi purustus pakendi juures, kontrollige kaldteed korralikult enne kasutusse panemist, et vältida defektidega kaldtee kasutamist. Kui avastate kontrollimisel defekti, tuleb kontakti võtta toote müüjaga või hooldajaga.

2. Funktsioonide kirjeldus

2.1. Piktogramm/Märgistused

- märgistus käepidemel kaldtee küljel
- Guldmanni tootemärgistus ja maksimaalse koormuse märgistus

3. Transportimine

Transporditakse käepidemetest, mis on monteeritud kaldtee vasakule küljele

4. Hooldus ja ladustamine

4.1. Kaldtee puhastus

Puhastage kaldteed pehmest riidest lapiga või pehme harjaga, millele on pandud tavalist puhastusvahendit. Tõstetavad kaldteed võib viia ka välja voolava vee alla. Autoklaavi või kemikaale kaldtee puhastamiseks ei tohi kasutada.

4.2. Kuidas vältida/tõkestada korrosiooni?

Kaldtee on valmistatud roostevabast materjalist ja seega korrosioonitõrjet ei vaja.

4.3. Millist hooldust vajab kaldtee omaniku poolest?

Kaldtee hingesid on vaja õlitada iga kuue kuu tagant. Libisevad relsid teleskoopsüsteemiga kaldtee juures tuleb vajadusel kuivatada. Teleskoopsüsteemiga kaldteed ei tohi kasutaja osadeks lahti võtta, vaid selleks tuleb kohale kutsuda kaldtee kvalifitseeritud hooldaja.

5. Teenindus ja kasutusaeg

5.1. Kui te järgite kaldtee instruksioonis antud juhiseid, on kaldtee kasutusaeg 15 aastat. Vajaminevad varuosad tuleb tellida tootjalt või hooldajalt.

5.2. Stepless kaldtee kontrollimine

1 Visuaalne toote kontroll

- kontrollige kaldtee pakendit rebestuste ja kulumise suhtes
- kontrollige defektide võimalikkust

2 Toote normaalseks kasutamiseks vajalik kontroll

- kontrollige toote kõiki funktsioone nii koormusega kui ilma
- 3 Toote mehhaanilise korrasoleku kontroll
- puhastage toode mustusest
 - kontrollige ja hinnake toote erinevate osade korrasolekut
- 4 Kontrollige toodet veelkord punktis 2 näidatud viisil
- 5 Kas kerkis esile mingeid uusi probleeme?
- kui tekkis uusi probleeme, minge tagasi punkti 3 juurde
 - kui probleeme ei kerkinud esile, lõpetage kontroll

6. Tehnilised andmed

Kõrgus 1000 kuni 3100 mm

Laius:

Välimine 191&210 mm

Sisemine 163&182 mm

Ääre kõrgus 46 mm

Max koormus, alla 2000/ üle 2000mm: max 12 kraadi

Kaal, min. ja max kaldtee kohta, sõltuvalt kõrgusest :

Tavaline kaldtee 3.2 kuni 6.0 kg

Teleskoop- kaldtee 3.7 kuni 9.5 kg

Kokkupandav kaldtee 4.0 kuni 10.1 kg

Lai tavaline kaldtee 9.7 kuni 28.6 kg

Lai kokkupandav kaldtee 12.7 kuni 31.66 kg

Materjalid:

Kate ja käepidemed: purunemiskindel ja mittelibisev plastik

Kaldtee : anodiseeritud alumiinium libisemiskindla kattega

Garantii: 1 aasta