

Peapesuvann EXTRA

JUUSTE PESEMISEKS VOODIS

PEAPESUVANN EXTRA

- täispuhutav vinüülist peapesuvann
- suletav veeäravool ja peasüvend
- kaherealine, kõrgus u 19 cm
- mõõtmed: u 60 x 50 cm

Peapesuvanni komplekt EXTRA

koosneb järgmistest osadest:

- peapesuvann EXTRA
- dušikomplekt, u 6 l
- pump

Peapesuvanni EXTRA kasutusjuhend

Art nr 47020, 47050

Kasutusotstarve

Juuste pesemiseks voodis.

Kokkupanek

Vann puhutakse toatemperatuuril täis pumba abil või otse suuga (ärge kasutage kompressorit!).

Kasutamine

- Seadke voodi horisontaalsesse asendisse.
- Katke voodipesu märja kaitseks kile või muu materjaliga.
- Toetage patsiendi õlgu ja kaela padja või kaelatoega.
- Asetage patsiendi alla näiteks käterätik, et paljas nahk ei puutuks peapesuvanniga kokku.
- Asetage tühi ämber äravooluvooliku alla ja veenduge, et voolik ei ole keerdus ega saa ämbrist välja libiseda.
- Vesi püsib vannis tänu klambrile või sulgemiskorgile.
- Soovitame kasutada dušikomplekti art nr 47070 (saadaval lisatarvikuna) või mõnda käepidemega anumad, nt sõelotsaga plastist kastekannu.
- Pärast juuste pesu tuleb vann veest tühjaks lasta ja alles seejärel voodist ära tõsta, et vältida mis tahes kahjustusi või selle sisu loksumist üle ääre.
- Peapesuvann peab enne kokkupanekut täielikult ära kuivama. Vanni ei tohi kuivatada küttekeha peal ega otsese päikesevalguse käes. Kasutage paberkäterätti vms.

Hooldus ja korrashoid

Peapesuvann ei vaja erihooldust. Jälgige vaid, et see oleks enne kokkupanekut täielikult kuivanud.

Desinfitseerimine

Peapesuvanni võib desinfitseerida kaubanduses saadoleva kunstmaterjalidele sobiva desinfitseerimisvahendiga.

Tähtis! Järgige desinfitseerimisvahendi tootja juhiseid.

Ohutusjuhised

- Veenduge, et vann asetseb kindlalt oma kohal.
- Jälgige, et vee temperatuur oleks sobiv (kõrvetamise oht).
- Kasutage vanni üksnes sihipäraselt.
- Peapesuvann ei ole mänguasi.
- Dušikomplekti kasutamise korral ei tohi seda otse patsiendi kohale riputada, sest on oht, et kinnitus tuleb lahti.
- Tõstke vann voodist maha üksnes pärast selle tühjendamist, et vältida vee voolamist madratsile ja madratsi kahjustamist.

Garantii

Seadustes sätestatu kohaselt.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: mittesihipärane kasutamine, normaalne kulumine ja puudused, mille mõju seadme väärtusele või kasutatavusele on vähetähtis.

Sundo Homecare GmbH | D-30916 Isernhagen
www.sundo-homecare.de

Kõik õigused, tehnilised muudatused, vead ja trükivead kaitstud