


- Kaasaskantav
- Suurepärase helikvaliteet
- Laetav

GoTalk®-i kantavad seadmed

Nende Attainment Company kehal kantavate alternatiivsuhtlusseadmete (AAC-seadmete) abil saate sõnumeid salvestada ja esitada.

Seadmel **GoTalk® Select** on neli sõnuminuppu, igaühel kolm taset. GoTalk Selecti saab kanda nööri otsas või kinnitada klõpsuga. Tagaküljel olevad magnetid kinnituvad mis tahes metallpinnale.

Seadet **GoTalk® Go** kantakse nagu kella ja sellel on kolm sõnuminuppu, igaüks kolme tasemega. Ülekatet kaitseb eemaldatav plastkate.

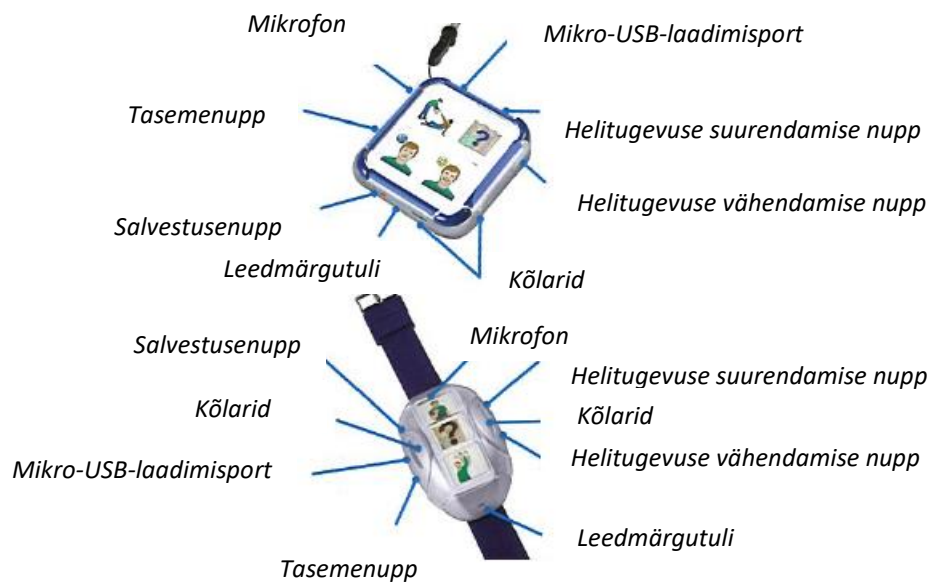

Kasutusjuhised

Enne kasutama hakkamist pange seade kuueks tunniks laadima.

Vaadake **GoTalk® Go** ja **GoTalk® Selecti** paigutuskeemi.

Sisselülitamiseks toimige järgmiselt. Hoidke all **helitugevuse suurendamise nuppu**, kuni kuulete heli.

Väljalülitamiseks toimige järgmiselt. Hoidke all **helitugevuse vähendamise nuppu**, kuni kuulete heli.

Salvestusrežiimi sisse/välja lülitamine. Vajutage punane **salvestusnupp** sõrmeküüne või suletud pastapliiatsiga alla ja vabastage. Salvestusrežiimis põleb punane märgutuli.

Sõnumi salvestamine. Vajutage **sõnuminuppu**. Vilkv punane märgutuli näitab, et käimas on salvestamine. Salvestada saab kuni 28 sekundit. Salvestamise lõpetamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

MÄRKUS. Vajutage ükskõik kumba **helitugevuse nuppu**, kui soovite kontrollida salvestatud sõnumit **salvestusrežiimist väljumata**.

Sõnumi esitamine. Sõnumi esitamiseks puudutage **sõnuminuppu**, kui salvestusrežiim on väljas (punane tuli ei põle). Sõnumite esitamise ajal reguleerivad **helitugevuse nupud** heli valjust.

P.O. Box 930160

Verona, WI 53593 USA

Telefon 1 800 327 4269

Rahvusvahelised kõned +1 608 845 7880

www.AttainmentCompany.com

© 2020 Attainment Company, Inc.

Kõik õigused on kaitstud.

Taseme muutmine. Vajutage sõrmeküüne või suletud pastapliatsiga rohelist **tasemenuppu**. 1. taseme korral kõlab üks piik ja süttib roheline märgutuli. 2. taseme korral kõlab kaks piiksu ja süttib sinine märgutuli. 3. taseme korral kõlab kolm piiksu ja süttib lilla märgutuli.

MÄRKUS. Kui taset muudetakse salvestusrežiimis, kõlab iga taseme korral õige arv piikse, kuid märgutuli jääb punaseks.

Kõigi sõnumite kustutamine.

Hoidke **salvestusnuppu** 10 sekundi vältel all, kuni kuulete heli.

Ülekatete sisestamiseks toimige järgmiselt. Eemaldage plastist kaitsekate. Asetage valge membraani peale paberist ülekatte. Klõpsake kaitsekate oma kohale tagasi.

Aku laadimine. Aku peab vastu kuni 15 tundi pidevat kasutust. Kui aku on tühjenemas, hakkab sõnumite taasesituse lõpupoole vilkuma oranž märgutuli. Laadimiseks on seadmega kaasas mikro-USB-kaabel.

MÄRKUS. Aku kasutusea ja seadme tööea pikendamiseks on soovitatav seadet korrapäraselt laadida.

Tasemelukk. Hoidke ühel ajal all rohelist **tasemenuppu** ja **helitugevuse suurendamise nuppu**, kuni kuulete heli. See lukustab seadme parajasti kasutusel olevale tasemele.

Tasemeluku avamine. Hoidke ühel ajal all rohelist **tasemenuppu** ja **helitugevuse vähendamise nuppu**, kuni kuulete heli. Nüüd on teil võimalik taset vahetada.

Salvestuslukk Hoidke ühel ajal all punast **salvestusnuppu** ja **helitugevuse suurendamise nuppu**, kuni kuulete heli. Salvestusfunktsioon on nüüd keelatud.

Salvestusluku avamine. Hoidke ühel ajal all punast **salvestusnuppu** ja **helitugevuse vähendamise nuppu**, kuni kuulete heli. Salvestusfunktsioon on nüüd lubatud.