

Palun lugege need märkused enne kasutamist tähelepanelikult läbi. Järgige juhiseid ja hoidke neid kindlas kohas. Kui seda abivahendit kasutavad teised isikud, siis peavad nad enne kasutamist olema ohutusjuhistest teadlikud.

1. Ohutusjuhised

- ♥ Laske ALATI oma raviarstil või tarnijal selgitada abivahendi asjakohast reguleerimist ja kasutusviisi.
- ♥ Ärge hoidke seda õues ega jätke päikese kätte. (Ärge jätke toodet palava ilmaga autosse!)
- ♥ Ärge kasutage äärmuslike temperatuuride korral (üle 38 °C või 100 °F või alla 0 °C või 32 °F).
- ♥ Kontrollige hoolikalt toote kõiki osi (kruvid, torud, otsikud, käepidemed ...).
- ♥ Kontrollige korrapäraselt kõikide osade kinnitust (fiksaatorid, käepide, kummiotsik ...).
- ♥ Kasutamisel hoidke käepidemest kõvasti kinni.
- ♥ Kukkumise korral lükake toode kõrvale, et vältida sellele kukkumist.
- ♥ Liikuge alati edasi aeglaselt ja lühikeste sammudega, et säilitada tasakaalu.
- ♥ Ärge kasutage toodet libedatel pindadel (lumi, jää, vesi ...)!
- ♥ Ärge kasutage toodet treppidel liikumisel, suur vigastusoht!
- ♥ Kasutage toodet üksnes liikumisabivahendina: ärge kasutage seda kangina mööbli nihutamiseks või tõstmiseks.
- ♥ Pidage ALATI kinni liikumisabivahendil oleval sildil toodud koormuspiirangust.
- ♥ Toodet ei tohi mingil viisil muuta. Purunenud või defektse osa vahetamiseks kasutage üksnes originaalvaruosi ja laske seda teha tehnikutel.
- ♥ Pärast liikumisabivahendi kokkumonteerimist kontrollige, kas see on AVATUD asendis kindlalt lukustunud ja enne kasutamist maapinnaga paralleelne.
- ♥ Kontrollige ALATI enne kasutamist, kas liikumisabivahend ja selle ühendused on omal kohal ning kindlalt lukustunud.
- ♥ ÄRGE riputage midagi liikumisabivahendi külge.
- ♥ Kui te ei kasuta oma liikumisabivahendit pikemat aega, siis laske seda enne taaskasutamist tehnikutel kontrollida.
- ♥ Olge kasutamisel ettevaatlik: hoiduge põrandal olevatest aukudest ja ebatasasustest.
- ♥ Vaakumotsikud ei tohi olla liiga kulunud. Kui otsikud on märgatavalt kulunud, siis paluge edasimüüjal või hoolduspersonalil need asendada.

2. Paigaldamine

Toodet võivad reguleerida üksnes spetsialistid, kes õpetavad teile ka selle kasutamist. Vale kasutamine või reguleerimine võib põhjustada liigseid pingeid nii tootes kui ka patsiendis.

Seadet peavad reguleerima tehnikud teie konkreetsete vajaduste järgi.

Paluge tehnikul selgitada toote kasutamist ja veenduge, et olete kõigist selgitustest aru saanud.

Kahtluse korral ärge häbenege küsimast.

Kõrguse reguleerimine. Vabastage torus olev fiksaator mõlema pöidlaga, seejärel reguleerige sisemine toru soovitud kõrgusele ja lukustage klamber uuesti. Enne kepi kasutamist kontrollige, kas fiksaatori metalltihvt on läinud mõlemast torust läbi ja ulatub välimisest torust välja.

Keppidel on 1 reguleerimisauk välimises torus ja 9 auku sisemises torus, seega on kokku 9 reguleerimisaset.

Kepi pikkust saab reguleerida sammuga 2,5 cm.

Õnnetusjuhtumite vältimiseks hoidke kõndimisel keppi kehale lähedal.

3. Puhastamine

Keppi tuleb puhastada korrapäraselt pehmetoimelise puhastusvahendi ja pehme lapiga.

ÄRGE KUNAGI kasutage ÕLIJAID puhastusvahendeid! Libisemisoht!

Paluge jaemüüjal või tehnikul liikumisabivahendit korrapäraselt kontrollida. Kummiotsikuid tuleb korrapäraselt kontrollida ja vahetada.

4. Materjalid

Toru on valmistatud alumiiniumist ja terasest, käepide polüpropüleenist.

5. Kasutusest kõrvaldamine / jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus peab toimuma teie piirkondlike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt.

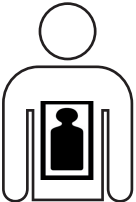
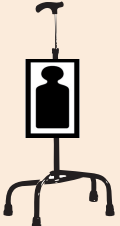
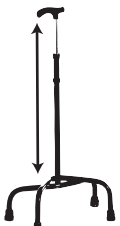


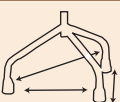

6. Tehnilised andmed

Vaadake kasutusjuhendi lõpus toodud tabelit.

Tootel on 24-kuuline garantii tootmisdefektide suhtes ostukuupäevast alates.

Standardid: DIN-EN-12182:1999, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 10993-1

Bioühilduv

	Kolme toetuspunktiga		Nelja toetuspunktiga	
Viitenr	220300 220317	221317	220400 220413	221413
	110 kg			
	0,90 kg	0,8 kg	1,1 kg	1 kg
	68-95 cm	50-77 cm	68-95 cm	50-77 cm
	11,50 cm Ø 2,50 cm			
	37 × 17 cm			
	35 × 29 cm			
	1-Ø 1,25 cm 2-Ø 1,90 cm			

