



# DRY FLOATATION<sup>®</sup> pehmendustooted

Kasutusjuhend

MÜÜJALE: Käesolev juhend tuleb anda selle toote kasutajale.  
KASUTAJALE: Lugege enne toote kasutamist kogu kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

shape fitting technology<sup>®</sup>

Firma ROHO Group Inc rakendab pideva tooteparenduse põhimõtet ning jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis esitatud andmeid.

ROHO pehmendustooted on toodetud Ameerika Ühendriikides; tootja: The ROHO Group Inc 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).

© 2007 The ROHO Group, Inc.

Järgnevalt on loetletud firma ROHO, Inc kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid: ROHO<sup>®</sup>, DRY FLOATATION<sup>®</sup>, ISOFLO<sup>®</sup> Memory Control<sup>®</sup>, MINI-MAX<sup>®</sup>, Yellow Rope<sup>®</sup>, shape fitting technology<sup>®</sup>, PACK-IT<sup>®</sup>, CONTOUR SELECT<sup>®</sup>, ENHANCER<sup>®</sup>, QUADTRO<sup>®</sup> SELECT<sup>®</sup>, HIGH PROFILE<sup>®</sup>, LOW PROFILE<sup>®</sup> ja ADAPTOR<sup>®</sup>.




## ETTEVAATUSABINÕUD

- **KONTROLLIGE TOOTE KORRASOLEKUT IGAPÄEVASELT JA KASUTAMISE AJAL!**
- **TOOTE KASUTAMINE.** Antud toode on mõeldud kasutamiseks pehmendusvahendina, mis vastab kasutaja kehakujule istuvas asendis, et kaitsta nahakudesid ning ennetada kudede lagunemist. **MITTE KASUTADA** patja vee peal hõljumise vahendina (nt päästerõngana). Mitte kasutada teiste pehmendustoodete peal ega nendega samaaegselt.
- **MEDITSIINITÖÖTAJA VASTUTUS.** ROHO Group soovib konsulteerida meditsiinitöötaja, nt istmete ja kehaasendite osas kogemusi omava arsti või terapeudiga, et teha kindlaks kas padi ROHO DRY FLOATATION on sobilik kasutaja konkreetsete vajaduste jaoks.
- **KORREKTNE TÄISPUMPAMINE.** Toote täispumpamiseks tohib kasutada ainult kaasasolevat käsipumpa. Muude pumpamiseseadmete kasutamine võib patja vigastada ning tühistab garantii kehtivuse.
- **ALATÄITMINE.** Ärge kasutage alatäidetud patja. Alatäitmine vähendab padja tõhusust või muudab selle üldse kasutuks, suurendades naha ja pehmete kudede kahjustuste ohtu. Kui teile tundub, et padi on alatäidetud või ei pea õhku, veenduge, et kõik ventiilid oleks kinni, keerates neid kellaosuti liikumissuunas. **MÄRKUS:** padjamudelite QUADTRO SELECT ja CONTOUR SELECT puhul kontrollige, et reguleerimisseadme ISOFLO® Memory Control® roheline nupp oleks lükatud ISOFLO keskkoha avatud asendisse, et täispumpamise ajal pääseks õhk kõigisse padja sektsioonidesse. Kui teie padi sellele vaatamata õhku ei pea, võtke koheselt ühendust oma meditsiinilise hooldaja, toote edasimüüja või ROHO Group'iga.
- **ÜLETÄITMINE.** **MITTE KASUTADA** ületäidetud patja. Ületäidetud padi ei võimalda teil sellesse sisse vajuda ning ületäitmine vähendab padja tõhusust või muudab selle üldse kasutuks, suurendades naha ja pehmete kudede kahjustuste ohtu.
- **KAALUPIIRANG.** Valida tuleb kasutaja jaoks sobivate mõõtmetega padi. Neopreenist ROHO toodetel ei ole kaalupiirangut, kui toode on kasutaja kehamõõtude järgi õigesti valitud.
- **RÕHK.** Kõrguste muutumise korral võib olla vaja padja rõhku reguleerida. Kontrollige patja, kui kõrguste vahe on 300 meetrit või rohkem.
- **LÄBITORKAMINE.** Hoidke patja eemal teravatest esemetest, mis võivad õhukambreid läbi torgata ja põhjustada padja tühjenemist.
- **KUUMUS/LEEGID.** Hoidke patja eemal suurest kuumusest, lahtisest tulest ja kuumast tuhast.
- **TUGEV KÜLM.** Kui padi on olnud külma käes (alla 0°C) ning on muutunud tavatult jäigaks, laske sel soojeneda 22°C-ni ning avage seejärel nurgas olev õhuventiil. Rullige padi kokku ja siis uuesti lahti, kuni neopreen on muutunud taas pehmeks ja painduvaks. Enne kasutamist reguleerige padi vastavalt antud juhistelet.
- **KÄSITSEMINE.** **MITTE KASUTADA** õhuventiile haardekohtadena padja tõstmisel või tõmbamisel! Padja kandmisel hoidke seda kollasest nailonist kandenööri (kui see on olemas) või padjakatte käepideme abil.
- **VÕÕRKEHAD.** **MITTE ASETADA** kasutaja ja padja vahele võõrkehasid, sest need vähendavad toote tõhusust.
- **LAHUSED.** **MITTE LASTA** tootel kokku puutuda õli baasil valmistatud lahuste ega lanoliiniga, sest need võivad padja materjali lagundada.
- **OSONAATORID.** USA keskkonnaagentuur, Kanada tervishoiuamet ja mitmed teised valitsusasutused on väljastanud hoiatusi seoses osonaatorite kasutamisega. Pikaajaline kokkupuude osooniga lagundab kummi, tekstiili ja teisi ROHO toote valmistamiseks kasutatud

materjale, võib halvendada toote töönäitajaid ning muuta kehtetuks selle garantii.

- **PADJA JA KATTE ORIENTATSIOON.** Toodet tuleb kasutada nii, et õhukambrid oleks suunatud üles. Kui padjakatet kasutatakse valesti või see on vale suurusega, võib see vähendada padja tõhusust või muuta selle üldse kasutuks, suurendades naha ja pehmete kudede kahjustuste ohtu

## DETAILIDE LOEND

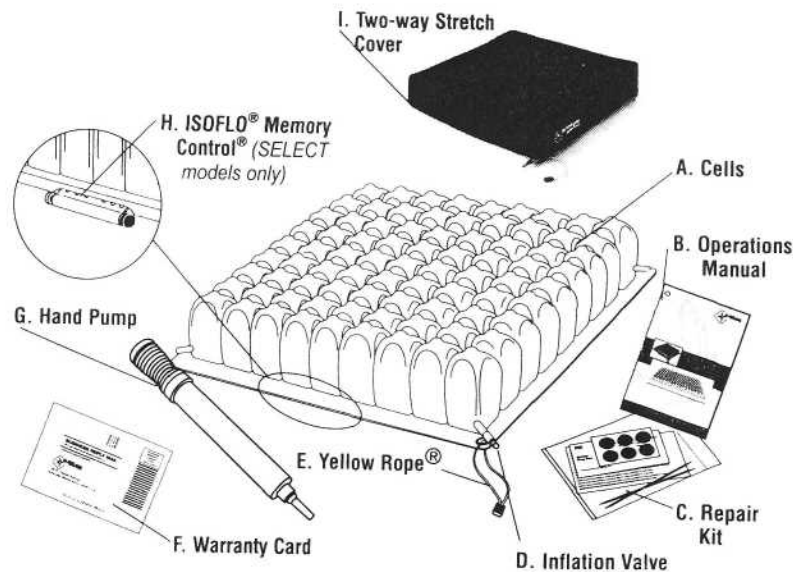

- A. Kambrid:** omavahel ühendatud õhutaskud.
- B. Kasutusjuhend:** sisaldab juhiseid reguleerimise, hoolduse ja parandamise jaoks ning muud olulist teavet padja kohta.
- C. Paranduskomplekt:** paigakomplekt väikesteks parandustöödeks.
- D. Pumpamisventiil:** kasutatakse padjas oleva õhukoguse reguleerimiseks. Mõnedel mudelitel on mitu ventiili.
- E. Kollane nõör:** padja tõstmiseks ja kandmiseks (mõnedel mudelitel puudub).
- F. Garantiikaart:** probleemi korral täitke garantiikaart ja saatke see postiga firmale ROHO Inc või registreerige internetis aadressil [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).
- G. Käsipump:** kasutatakse padja täitmiseks.
- H. ISOFLO® Memory Control®:** ainult padjamudelitel QUADTRO® SELECT® ja CONTOUR SELECT™. Reguleerimisvõime ISOFLO Memory Control võimaldab reguleerida õhu jaotumist padjas, moodustades mitu erinevat õhutsooni, suurendades võimalikke asendivalikuid ning kasutaja asendi stabiilsust.
- I. Kahes suunas veniv padjakate:** kate kaitseb patja, halvendamata sealjuures padja terapeutilisi omadusi.

## KONKREETSETE TOODETEGA SEOTUD JUHISED

Kui olete ostnud ühe järgnevalt loetletud toote, lugege palun enne istmepadja reguleerimisjuhiste juurde asumist läbi alltoodud tekst.

- **Mitme sektsiooniga padjad (kahe sektsiooniga HIGH PROFILE ja LOW PROFILE, seljatoepadi, spetsiaalpadi või kiilpadi):** teisi sektsioone võib reguleerida ainult kasutaja mugavuse või asendi parandamiseks pärast seda, kui padi on igas sektsioonis reguleeritud kasutaja istmikuluu kõige madalama nuki järgi vastavalt reguleerimisjuhiste.
- **Kahe sektsiooniga kõrge või madala profiiliga padjad HIGH PROFILE või LOW PROFILE:** lüngasendis vaagnaga isikutele võimalikult mugava asendi loomiseks tuleb esimesena reguleerida allpool asetseva istmikuluu nuki poolt. Kahte sektsiooni võib kasutada asendi reguleerimiseks küljelt küljele või ette-taha. Ette-taha reguleerimise korral tuleb esmalt reguleerida tagumine sektsioon. Kui mõlemad sektsioonid on reguleeritud, tuleb reguleerimise õigsus veel kord mõlemal poolel üle kontrollida. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Seljatoepadi.** Reguleerige esmalt istmepadja osa ja seejärel seljatoepadja osa. Kontrollige seejärel, et mõlemad padjasektsioonid oleks õigesti reguleeritud. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Padi MINI-MAX®.** Järgige reguleerimisjuhiseid. Kuna kambrite kõrgus on väike, väljub õhk padjast kiiresti. Õhu väljumise takistamiseks pigistage ventiili alumine ots selle kinnikeeramise ajaks kokku. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Nimmepadi.\*** Kinnitage padi tooli seljatoele sobivale kõrgusele, tõmmates rihma ümber seljatoe, kuni padi on kindlalt fikseeritud. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Prill-laua padi.** Kinnitage iga osa eraldi vastavalt prill-laua kujule. Klõpsake padi kinni. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Duši/pesupingi padi.\*** Asetage padi istmele, nii et ventiil jääks ette. Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Padi ADAPTOR®.\*** Need padjad on suletud ja nende rõhku ei saa reguleerida.
- **Padi PACK-IT®.** Järgige reguleerimisjuhiseid.
- **Ristluupadi.** Järgige reguleerimisjuhiseid.

## ERIJUHISED

ROHO Group soovib padja kasutusmugavuse suurendamiseks ja istmekõikumise vältimiseks kasutada istme vahedetaili või kontuurpõhja. Need abivahendid on saadaval teie lähima ROHO toodete edasimüüja või taastusravi vahendite tarnija juures.


\* Padjakate ei ole kaasas.

## REGULEERIMISJUHISED MUDELITELE:

- HIGH PROFILE
- LOW PROFILE
- MINI-MAX
- ENHANCER®

- Prill-laua padi
- PACK-IT
- Seljatoepadi
- Duši/pesupingi padi


- Ristluupadi  
(reguleerida vastavalt vajadusele)
- Nimmepadi  
(reguleerida vastavalt vajadusele)

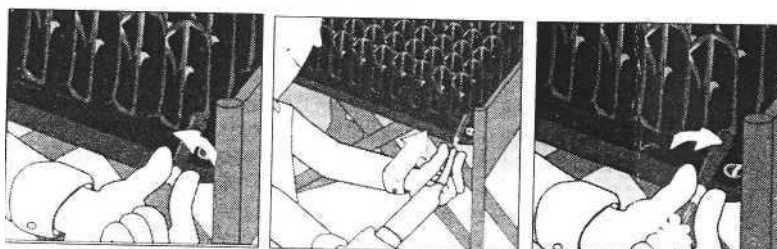

1. SAMM. Asetage padi toolile, jälgides, et see oleks keskel ja õige külg oleks peal ning õhuventiil jääks ette vasakusse nurka. (Konsulterige abivahendi väljakirjutajaga, kui soovite paigutada ventiili teise asendisse.) Keerake ventiil vastupäeva lahti.

2. SAMM. Lükake pumba kummiotsik ventiilile ning pumbake padi vajalikust veidi rohkem täis, nii et see hakkab ülespoole kaarduma.

3. SAMM. Keerake ventiil päripäeva kinni. Võtke pump ära. (Mitme ventiiliga patjade puhul korrake samme 1-3 kõigi ülejäänud ventiilidega.)

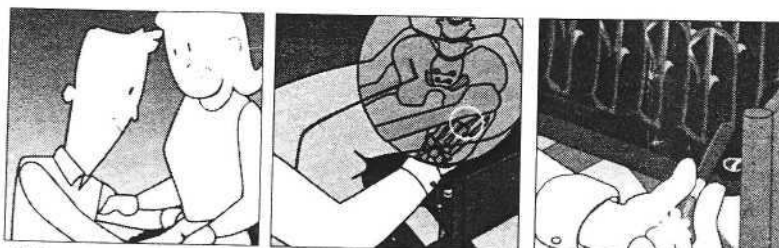

4. SAMM. Aidake kasutaja ettevaatlikult tooli, jälgides, et padi jääks tooli keskele. Kasutaja peab istuma oma tavapärasest istumisasendis.


5. SAMM. Lükake käsi padja pinna ja kasutaja istmiku vahele. Tõstke kasutaja jalga veidi üles ning leidke sõrmedega tema istmikuluu kõige madalam nukk. Seejärel laske kasutaja jalg tagasi istumisasendisse.

6. SAMM. Keerake ventiil õhu väljalaskmiseks vastupäeva veidi lahti, hoides samal ajal kätt endiselt istmikuluu madalaima nuki vastas. Laske õhku välja seni, kuni saate veel vaid vaevu sõrmeotsi liigutada – mitte rohkem kui 2,5 cm ega vähem kui 1,25 cm ulatuses. Keerake ventiil päripäeva kinni.

**MÄRKUS:** ärge istuge valesti täis pumbatud padjale. Padja ala- või ületäitmine vähendab padja tõhusust või muudab selle üldse kasutuks ning võib suurendada naha ja pehmete kudede kahjustuste ohtu. Padi on kõige tõhusam siis, kui kasutaja kõigi istmikupunktide ja tooli vahele jääb 1,25 kuni 2,5 cm vahe.

## REGULEERIMISJUHISED MUDELITELE:


- QUADTRO SELECT ja CONTOUR SELECT koos reguleerimisega ISO FLO Memory Control

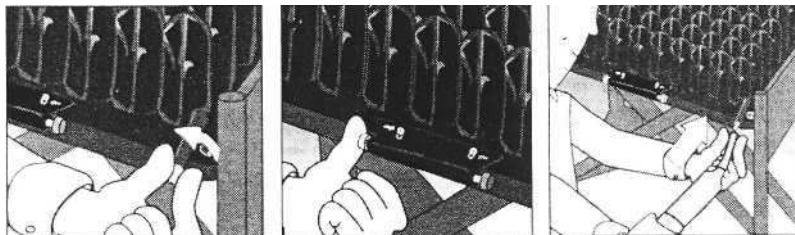

1. SAMM. Asetage padi SELECT toolile, jälgides, et see oleks keskel ja õige külg oleks peal ning ISO FLO Memory Control seade jääks esiküljele. (Konsulteerige abivahendi väljakirjutajaga, kui soovite paigutada ISO FLO teise asendisse.) Keerake ventiil vastupäeva lahti.

2. SAMM. Veenduge, et seade ISO FLO Memory Control oleks samuti avatud. Selleks lükake ISO FLO roheline nupp parempoolsesse ehk avatud (UNLOCKED) asendisse.


3. SAMM. Lükake pumba kummiotsik ventiilile ning pumbake padi SELECT täis, kuni see hakkab ülespoole kaarduma.

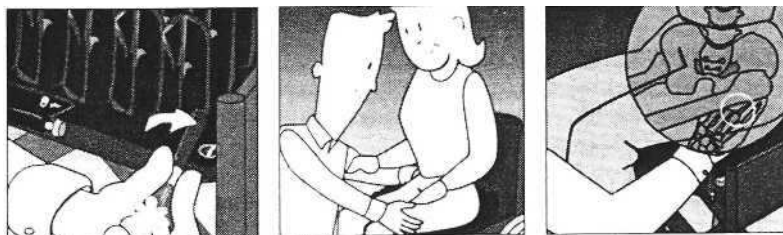

4. SAMM. Keerake ventiil päripäeva kinni. Võtke pump ära.

5. SAMM. Aidake kasutaja ettevaatlikult tooli, jälgides, et padi jääks tooli keskele. Kasutaja peab istuma oma tavapärasest istes.

6. SAMM. Lükake käsi padja pinna ja kasutaja istmiku vahele. Tõstke kasutaja jalga veidi üles ning leidke sõrmedega tema istmikuluu kõige madalam nukk. Seejärel laske kasutaja jalg tagasi istumisasendisse.

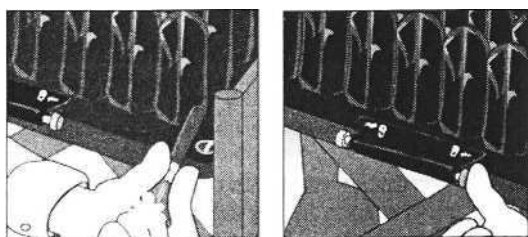

7. SAMM. Keerake ventiil õhu väljalaskmiseks vastupäeva veidi lahti, hoides samal ajal kätt endiselt istmikuluu madalaima nuki vastas. Laske õhku välja seni, kuni saate veel vaid vaevu sõrmeotsi liigutada – mitte rohkem kui 2,5 cm ega vähem kui 1,25 cm ulatuses. Keerake ventiil päripäeva kinni.

8. SAMM. Aidake kasutaja padjal soovitud istesendisse ning paluge tal selles asendis püsida, kuni õhk liigub läbi seadme ISO FLO Memory Control. Kui õhu liikumine on lõppenud, lükake ISO FLO punane nupp vasakpoolsesse ehk suletud (LOCKED) asendisse. See tõkestab õhu liikumise erinevate sektsioonide vahel ning tagab stabiilsema istesendi. Kontrollige mõlemal padja sektsioonil veel kord täispumpamise korrektsust.

### MÄRKUS:

ärge istuge valesti täis pumbatud padjale. Padja ala- või ületäitmine vähendab padja tõhusust või muudab selle üldse kasutuks ning võib suurendada naha ja pehmete kudede kahjustuste ohtu. Padi on kõige tõhusam siis, kui kasutaja kõigi istmikupunktide ja tooli vahele jääb 1,25 kuni 2,5 cm vahe.

## **PADJAKATTE KASUTAMINE:**

Padjakatte kasutamine ei ole küll nõutav, kuid sellegipoolest on iga standardse padjaga kaasas ka ROHO padjakatte, mis takistab padjakambrite surumist ratastooli piiridest väljapoole ning on abiks liuglaudade kasutamisel. Kuna katte põhi on valmistatud libisemiskindlast materjalist, takistab see padja liikumist tooli põhjal.

**Padja katmiseks** järgige alltoodud lihtsaid juhiseid:

1. Voltige kate lahti, nii et libisemiskindel materjal jääks üles ning tõmblukk jääks teie poole.
2. Lükake padi kattesse sisse, nii et õhukambri oleks suunatud alla.
3. Tõmmake padja kaitserõngaga varustatud nurk ettevaatlikult läbi katte nurgas oleva ava, kuni metallist kaitserõngas jääb nähtavale. Korrake seda toimingut kõigis neljas nurgas. (Olge ettevaatlik ventiili ja kandenööri tõmbamisel läbi kattes oleva ava.)
4. Tõmmake lukk ettevaatlikult kinni ja pöörake padi teistpidi, nii et kambri oleks suunatud üles. Kui padi on õigesti reguleeritud, on see nüüd kohe kasutusvalmis (vt käesolevas juhendis toodud reguleerimisjuhiseid).

Õigesti paigaldatuna istub padi tasapinnaliselt toolipõhjale (libisemisvastane külj all), nii et kõik õhukambri on kaetud ja kõik neli nurka on nähtaval.

## **TOOTE PUHASTAMINE/DESINFITSEERIMINE:**

Puhastamine ja desinfitseerimine on kaks erinevat toimingut. Puhastamine peab eelnema desinfitseerimisele.

**Padja puhastamiseks** laske see õhust tühjaks, keerake ventiilid kinni ja asetage padi suurde kraanikaussi. Hõõruge õhukambreid ja nende vahesid ettevaatlikult pehmete plastikharjastega harja, käsna või pesulapiga. ROHO soovib kasutada vedelat nõudepesuvahendit, riiete pesuks mõeldud vahendit või mõnda muud üldotstarbelist puhastusvahendit. Asutustes võib kasutada üldotstarbelist desinfitseerivat majapidamispuhastusvahendit. Lasta õhu käes kuivada.

**Padjakatte puhastamiseks** peske seda pesumasinas sooja veega. Mitte valgendada. Kuivatada pesukuivatis madalal kuumusel.

**Desinfitseerimiseks** kasutage nakkustõrje nõuetele vastavat antiseptikumi. ROHO soovib kasutada tuberkuloosibaktereid hävitavat desinfitseerimisvahendit.

**Kodus desinfitseerimiseks** kasutage 125 ml vedelast pesuvalgendist ja 1 l veest valmistatud lahust. Hoidke puhast patja 10 minutit valgendilahuses. Seejärel loputage põhjalikult ja laske õhu käes kuivada.

**Asutuses desinfitseerimiseks** on ohutu kasutada enamikke antiseptikume, kui neid kasutatakse vastavalt tootja lahjendamisujuhiste. Enne uuel patsiendil kasutamist tuleb toode puhastada ja desinfitseerida.

**Steriliseerimine:** ROHO ei soovita mingil juhul kasutada steriliseerimismeetodeid, kus temperatuur ületab 93°C. Kõrge temperatuur kiirendab materjali vananemist ning võib kahjustada padja struktuuri. Kui asutuse eeskirjad nõuavad steriliseerimist, avage padja ventiilid ning kasutage võimalikult madalat temperatuuri võimalikult lühikese aja jooksul. Gaasiga steriliseerimine on parem kui auruga autoklaavimine, kuid kumbki pole soovitatav. Auruga autoklaavimise korral veenduge, et kõik padja ventiilid oleks lahti.

**MÄRKUS:** ärge kasutage patjadel õli baasil valmistatud lahuseid, lanoliini ega fenooli baasil valmistatud desinfitseerimisvahendeid, sest need võivad neopreeni kahjustada.

## **PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE:**

**Padi ei pea õhku:** kontrollige ventiile ja keerake kõik ventiilid päripäeva korralikult kinni. Kontrollige, kas padjas ei ole nähtavaid auke. Kui ventiilid on kinni, vajutage õhku täis padjaosa kraanikaussi või vanni vee alla ja vaadake, kas padjast tuleb õhumulle.

Kui padjas on nõelapea suurusi auke, toimige vastavalt alaosas "Pisiparandused" antud juhistele. Kuid padjas on suuremaid auke või teistsuguseid lekkeid, vaadake alaosa "Parandusprogramm".

**Ebamugav/ebastabiilne:** kontrollige, kas toode ei ole liiga täis pumbatud (vt reguleerimisjuhiseid). Kontrollige, et õhukambriid ja padjakatte veniv ülemine pool oleks suunatud üles. Kontrollige, kas padi pole tooli jaoks liiga suur või väike. Laske kasutajal vähemalt tund aega padjal istuda, et ta harjuks toote pinna tekstuuriga ning vajuks õhukambritesse sisse.

**Padi libiseb mööda tooli põhja:** kontrollige, et padjakatte libisemisvastane külg oleks allapoole pööratud.

## **PISIPARANDUSED:**

Kui tootes tekib õhuleke, kasutage kaasasolevat paranduskompleti ning järgige selles olevaid juhiseid.

## **PARANDUSPROGRAMM:**

Kui teil endal ei õnnestu patja parandada või see on raskelt kahjustatud, võite selle parandamiseks tagasi saata. Enne toote ROHO Group'ile parandusse saatmist võtke ühendust meie klienditoe osakonnaga, mille tasuta telefoninumber Ameerika Ühendriikides on 1-800-851-3449. Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, pöörduge lähima ROHO toodete edasimüüja poole.

Kui toode ei kuulu garantii alla, tuleb paranduse eest tasuda väike tasu koos transpordikuludega. Paranduse hinnakalkulatsiooni taotlus tuleb esitada kirjalikult koos tootega. Kui kasutaja kirjalikku paranduse hinnakalkulatsiooni taotlust ei esita, eeldab ROHO Group, et kasutaja on parandustööde hinnaga nõus ning teostab toote paranduse ja saadab selle tagasi koos toote üleandmisel tasumisele kuuluva arvega.

Kui te ei ela Ameerika Ühendriikides, pöörduge oma riigis tegutseva edasimüüja poole. ROHO rahvusvaheliste edasimüüjate värseima loendi leidmiseks vaadake meie veebilehte [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).

## **ASENDUSPROGRAMM (ainult Ameerika Ühendriikides)**

ROHO Group pakub kliendile padja remondi ajaks asenduspatja. Asenduspadja kasutamine eeldab tagatisraha maksmist. Võtke ühendust ROHO Group'iga telefonil 1-800-851-3449.

## **TAGASTAMINE:**

Toote tagastamiseks on vaja eelnevat ROHO Group'i luba ning selle eest tuleb tasuda tagasivõtmistasu.

Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, võtke ühendust oma riigi kohaliku edasimüüjaga või küsige lähima edasimüüja andmeid ROHO International'i telefonil 1-618-277-9150. ROHO rahvusvaheliste edasimüüjate värseima loendi leidmiseks vaadake meie veebilehte [www.therohogroup.com](http://www.therohogroup.com).



## **PIIRATUD GARANTII:**

### **Garantii ulatus**

ROHO Inc annab garantii toote kõigi materjali- ja koostevigade suhtes. Tootega kaasas olnud riistvara asendamise korral kaotab garantii kehtivuse.

### **Garantii kehtivusaeg**

Arvestatakse toote esmase ostmise kuupäevast:

QUADTRO SELECT	36 kuud
CONTOUR SELECT	36 kuud
Kõik teised DRY FLOATATION tooted	24 kuud
Padjakatted	6 kuud

### **Meie kohustused**

Me parandame mõistliku aja jooksul pärast toote meile saatmist sellel ilmnunud materjali- ja koostevigade ning saadame selle teile tagasi – seda kõike tasuta.

### **Meie kohustuste piirid**

Me ei paranda toodet tasuta, kui seda on valesti kasutatud või see on juhuslikult või vääramatu jõu asjaoludel (nt üleujutus, tornaado, maavärin, tulekahju) viga saanud.

### **Kliendi kohustused**

Klient peab saatma toote firmale ROHO Inc koos algse ostutšeki või muu dokumendiga, mis tõendab ostukuupäeva, ning tasuma kõik transpordikulud. Toode tuleb saata järgmisel aadressil: ROHO, Inc. 100 N. Florida Ave., Belleville, Illinois 62221-5429. Algse ostutšeki esitamine ei ole vajalik, kui täidetakse ja tagatakse käesolevale juhendile lisatud garantii registreerimiskaart ning see kaart on firmas ROHO Inc arvele võetud. Kui algset ostutšeki ei esitata ja garantii registreerimiskaart ei ole meie juures arvele võetud, on garantii kehtetu.

### **Küsimused**

Meie klienditoe osakonna tasuta telefoninumber USA ja Kanada jaoks on (800)-850-7646. Väljaspool Ameerika Ühendriike või Kanadat helistage ROHO rahvusvahelise klienditoe osakonnale telefonil 1-618-277-9150 ning küsige lähima edasimüüja andmeid.

### **Lahtiütlus**

Kõigi kaudsete garantiide, sh turustatavuse ja konkreetseks kasutuseks sobivuse garantiide kehtivusaeg piirdub punktis "Garantii kehtivusaeg" nimetatud perioodiga, arvestades esmase ostmise kuupäevast, ning kõik nõuded selliste kaudsete või otseste garantiinõuete rahuldamiseks tuleb esitada selle aja jooksul. ROHO Inc ei vastuta juhusliku ega tuleneva kahju eest seoses majandusliku või varalise kahjuga, mis on tingitud otseste või kaudsete garantiitingimuste rikkumisest või muudest asjaoludest. ROHO Inc ei vastuta antud toote hooletu käsitlemise, ebamõistliku või sobimatu kasutamise tagajärgede eest.

### **Teie seaduslikud õigused ja käesoleva garantii mõju nendele**

Käesolev garantii piirab kõigi kaudsete garantiide kehtivust vastavalt ülal märgitud tähtaegadele ning välistab kompensatsiooni juhusliku või tuleneva kahju eest.

Mõned osariigid ei luba kaudsete garantiide kehtivusaega piirata ning mõned osariigid ei luba välistada kompensatsiooni juhusliku või tuleneva kahju eest, mistõttu need sätted ei pruugi teile laieneda. Lisaks käesoleva garantiiga antud õigustele võib teil olla täiendavaid, osariigiti erinevaid õigusi.



## KATMISJUHISED

Voltige kate lahti, nii et must PVC materjal jääks üles ning tõmblukk jääks teie poole. Asetage ROHO padi nii, et õhukambrid oleks pööratud alla ja ventiil(id) oleks katte sisestusava ees. Pange padi katte sisestusavast sisse. Tõmmake padja kaitserõngaga varustatud nurk ettevaatlikult läbi katte eesmisest nurgas oleva ava, kuni metallist kaitserõngas jääb nähtavale. Korrake seda toimingut, kuni kõik neli padjanurka on nähtaval. Olge ettevaatlik ventiili ja kandenoõri tõmbamisel läbi kattes oleva ava väga ettevaatlik.

Keerake padi teistpidi. Õigesti paigaldatuna istub padi tasapinnaliselt toolipõhjale (must PVC materjal all), nii et kõik õhukambrid on kaetud.