

EESTI KEEL

Üldised puhastamisjuhised

Kõiki R82 tarnitavaid meditsiiniseadmeid tuleb regulaarselt puhastada, et tagada hügieen ja korralik toimimine. Puhastamise nõuded varieeruvad olenevalt toote kasutamise keskkonnast ja kasutusviisist.

Meditsiiniseadme puhastamise eest vastutab täielikult seadme omanik. Seadme puhastamata jätmine võib seadme garantii tühistada. Lisaks võib seadme puhastamata jätmine ohtu seada kasutajate ja/või nende hooldajate tervisesesundi või vähendada nende ohutust.

Oluline! Sellele leheküljel esitatud juhised on vaid üldised suunised. Mis tahes R82 kasutus- ja/või renoveerimisjuhendis toodud puhastamisjuhisid asendavad alati käesolevaid suuniseid.

Puhastamine materjali tüübi järgi

Pulbriga kaetud osad, roostevaba teras, plast ja PU: pühkige kõik jäägid ja mustus maha sooja vee ning mitteabrsiivse puhastusvahendi neutraalse pH-ga seguga immutatud lapiga. Seejärel pühkige kuiva kiuvaba lapiga segu jääkide pindadelt eemaldamiseks. Vajaduse korral desinfitseerige osi, pöörates erilist tähelepanu kõikidele pindadele, mis puutuvad kokku kasutaja/hooldajaga.

Patju ja katteid võib puhastada nendel oleva pesusildi järgi. Kui pesusilti ei ole, ei soovita me seda eset puhastada.

Polster: ärge peske polstrit. Vajaduse korral vahetage polster välja.

Masinas pesemine

Paljusid meie tooteid saab puhastada seadme- pesumasinas temperatuuril 60 või 85 °C. Üksikasju lugege toote kasutusjuhendist.

Puhastusvahendid

Kasutage nõrgatoimelist mitteabrsiivset puhastusvahendit pH-ga 5–9. Puhastusvahendit tuleb kasutada veega segatult. Puhastusvahendi ja vee segu pH peab olema neutraalne. Ärge kasutage happelisi ega aluselisi puhastusvahendeid otse ühelgi pinnal, sest need võivad pinda kahjustada.

Desinfektsioonivahend: pindu võib desinfitseerida 70% IPA lahusega.

Hügieenimeetmed

Mis: kõik R82 tooted.

Kes: edasimüüjad, omanikud, hooldajad ja volitatud hooldustöötajad.

Millal: vajaduse järgi, plaanilisel hooldusel, remondi ajal või enne korduskasutust.

Meetmed: soovitame kanda puhastamise ajal kaitsekindaid. Vältige vee tungimist kaablistesse, laagritesse või raami osadesse. Enne puhastamist tuleb kõik liikuvad osad tömmata käigu minimaalsesse asendisse.

Kuidas: esmalt puhastage pindu, seejärel pühkige pinnad kiuvaba lapi või rätikuga kuivaks. Seejärel võib kuivatada õhkuivatiga madalal temperatuuril.

Desinfitseerimine: soovitav on enne desinfitseerimist pühkida sooja vee ja mitteabrsiivse puhastusvahendi neutraalse pH-ga seguga immutatud lapiga maha kõik jäägid ja mustus ning lasta pindadel kuivada. Seejärel võib pindu desinfitseerida 70% IPA lahusega.

