


R82[®] 

gazelle ps[™]

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

Gazelle ps.....	3
Ohutus.....	4
Garantii.....	4
Tööriistad.....	4
Hooldamine.....	4
Kasutusvalmiks seadmine.....	5
Näoavaga peatugi.....	6
Ühendusülili ja pikendus.....	6
Rihm.....	7
Seljatugi.....	7
Küljetugi.....	8
Sõltumatu abduktsioon.....	9
Sääreosa kaldenurk.....	10
Põlvetugi.....	11
Jalatugi.....	12
Kausiga või kausita laud.....	13
Kaldenurga reguleerimine.....	14
Gaasvedru reguleerimine.....	15
Toote identifitseerimine.....	16
Mõõtmed.....	17
Tehnilised andmed.....	18
Tootja.....	18
Turustaja.....	18

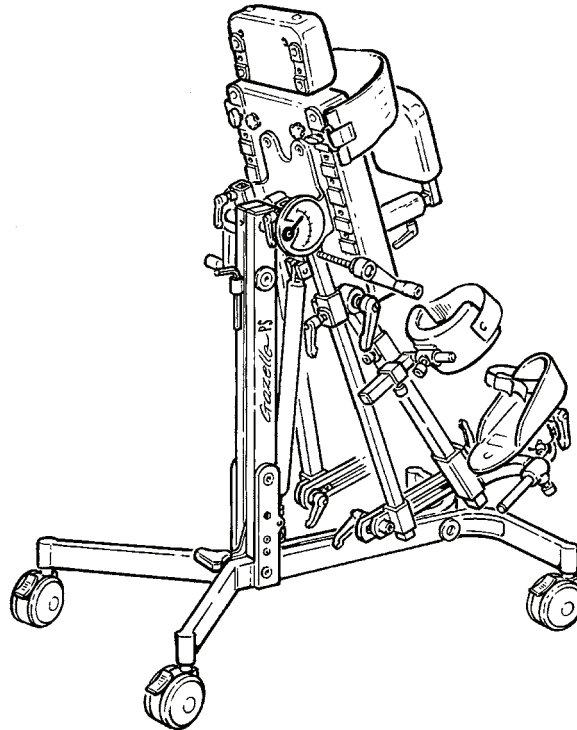


GAZELLE PS

Täname Gazelle PS-i valimise puhul. Me oleme täiesti kindlad, et see vastab teie ootustele selletaoliste tänapäevaste abivahendite osas. Gazelle PS on saadaval kolmes suuruses ja on mõeldud lastele vanuses 1 kuni 14 aastat. Arvukad reguleerimisvõimalused ja lai valik tarvikuid võimaldavad seda kohandada kasutamiseks väga erinevate puuetega lastele.

Gazelle PS on eeskätt mõeldud kasutamiseks kõhuliasendis, kuid seda on võimalik kasutada ka seliliasendis. Kallet on võimalik sujuvalt reguleerida vertikaalasendist kuni 15°-ni allapoole horisontaalasendit. Kõige parem on panna laps Gazelle PS-i horisontaalasendis.

Nende laste jaoks, kes vajavad lisatuge, saab paigaldada külgmised toed ja näoplaadi. Lauda (koos kausiga või ilma) saab kasutada lapse piiramiseks ja tema käte toetamiseks.

Käesolev kasutusjuhend aitab teil mõista Gazelle PS-i kõiki eeliseid.

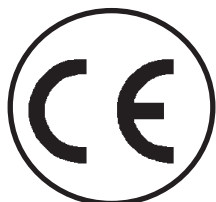

OHUTUS

Gazelle PS-ile on omistatud CE-märgis I klassi meditsiiniseadmete kohta käivate lohusnõuete kohaselt 14. juuni 1993. a meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ alusel. See annab teile garantii, et toode täidab Euroopas kehtivaid tervishoiu- ja ohutusnõudeid. Toote vastupidavus igapäevasel kasutamisel on 5 aastat. Seejärel tuleb toodet selle kasutuse pikendamiseks uuendada (seda teevad R82 töötajad).



Toote ümberehitamisel või muude varuosade ja tarvikute kasutamisel R82 originaalosaade asemel eemaldage CE-märgis.



Ärge kunagi jätke last abivahendisse järelevalveta. Tagage pidev täiskasvanu-poolne järelevalve. Toote valesti kasutamine võib põhjustada kasutaja tõsiseid vigastusi. Enne igat kasutamiskorda veenduge, et rihm on kindlalt raami külge kinnitatud.

GARANTII

R82 annab 2-aastase garantii töö ja materjalidega seotud defektide korral ning 5-aastase garantii keevsiliidete defektidest põhjustatud metallraami purunemise korral. Garantii kaotab kehtivuse, kui klient ei täida oma kohustusi seoses kontrollimise ja/või igapäevase hooldusega tootja määratud ja/või käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ning ettenähtud intervallidega. Lisateavet leiab R82 kodulehelt allalaaditavate materjalide osast. Garantii kehtib vaid siis, kui R82 toodet kasutatakse samas riigis, kust see osteti, ja kui toodet saab seerianumbri järgi tuvastada. Garantii ei kata juhuslikke kahjustusi, sealhulgas valest kasutamisest või hooletussejätmisest tingitud kahjustusi. Garantii ei laiene nendele osadele, mille puhul esineb normaalne kulumine ja mis tuleb perioodiliselt välja vahetada. Garantii tühistatakse, kui kasutatakse muid osi/tarvikuid peale R82 originaalosaade/-tarvikute või kui toodet on remontinud või muutnud keegi muu peale volitatud R82 esindaja või väljaõppinud töötajate, keda R82 on ametlikult heaks kiitnud R82 tooteid remontima ja hooldama. R82 jätab endale õiguse garantiinõudega seotud toodet ja asjakohast dokumentatsiooni enne nõude rahuldamist kontrollida ning otsustada vigase toote asendamise või remondi üle. Klient vastutab garantiinõudega toote tagastamise eest ostuadressile. Garantii andja on R82 või R82 edasimüüja.

TÖÖRIISTAD

Kasutage kasutusjuhendis kirjeldatud reguleerimiste tegemiseks kaasasolevat 6 mm kuuskantsisevõtit.

HOOLDAMINE



Gazelle PS on kasutatav ilma igasuguse hoolduseta, kuid raami on soovitatav sageli puhastada. Ärge kasutage selliseid puhastusvahendeid, mis sisaldavad klooriühendeid või denatureeritud alkoholi.



Hooldaja peab eemalepööratavaid osi aeg-ajalt kontrollima ja õlitama. Soovitame kasutada sünteetilist fluoroplastmanusega õli.



Vältige gaasvedru kokkupuudet surve või kõrge temperatuuriga ja selle läbitorkamist.






Reguleerimisi, mida selles kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud, tohivad teha vaid volitatud R82 töötajad.

KASUTUSVALMIKS SEADMINE

Gazelle PS tarnitakse kokkuklapitud kujul, et see võtaks transportimisel võimalikult vähe ruumi. Gazelle PS-i lahtiklappimiseks järgige alltoodud kirjeldust.

- 1) Kontrollige, kas neli ratast on lukustatud.
- 2) Vajutage jalaga pörandaraamile, et Gazelle PS tõuseks vertikaalasendisse. Kontrollige, kas Gazelle PS paikneb täpselt pörandaraami kinnitusvahendis.
- 3) Kui Gazelle PS on vertikaalasendis, siis kasutage kruvi (A) kinnikeeramiseks kaasasolevat 6 mm kuuskantsisevõtit. Kuuskantsisevõti on Gazelle PS-il kohas (B) ja on sealt reguleerimiseks alati kättesaadav.

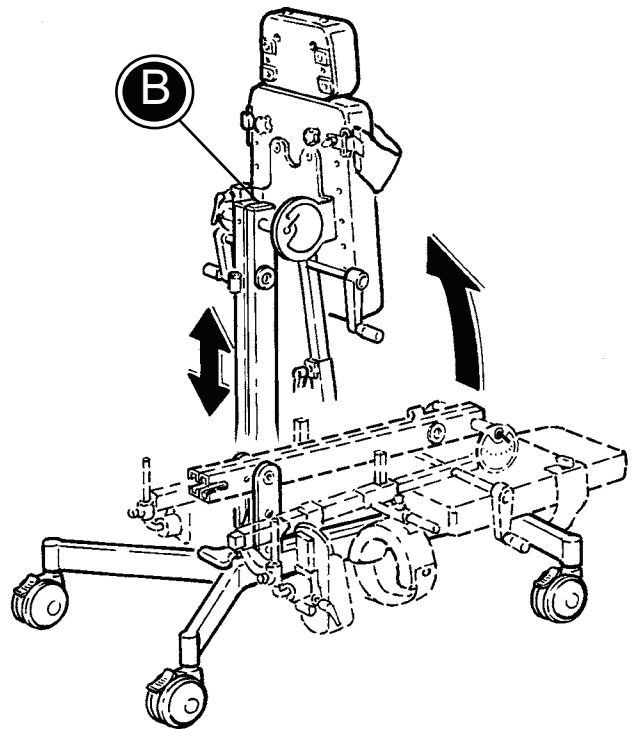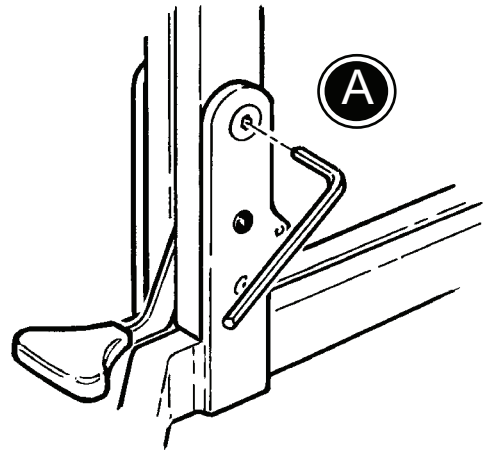

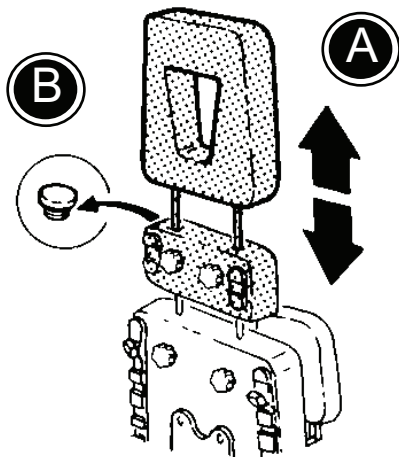


NÄOAVAGA PEATUGI

Näoavaga peatoe paigaldamine.

- A) Kaks kinnitusvarrast lähevad pärast kahe plastkatte eemaldamist läbi reguleeritava ühenduslüli.
- B) Fikseerivad nupud saab kohale kruvida pärast väljalõigete tegemist reguleeritavasse ühenduslüli.

Otstarbekas on näoavaga peatoe paigaldamine enne lapse asetamist lauale horisontaalasendis. Võtke peatugi ära siis, kui laud on tõstetud vertikaalasendisse.

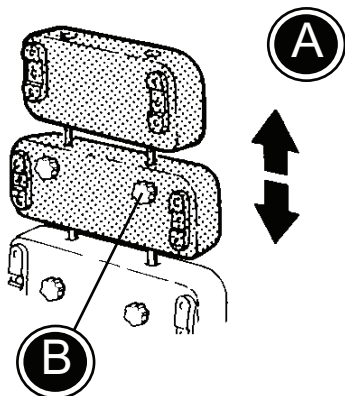

ÜHENDUSLÜLI JA PIKENDUS


Gazelle S-ile saab paigaldada reguleeritava kõrgusega ühenduslüli ja pikenduse (A).

Keerake kinni tagaküljel olevad kruvid (B).

RIHM

Olenevalt sellest, kus toetus on vajalik, paigaldage rihm kas ühenduslülile või põhiplaadile.

Rihm paigaldatakse tagaküljele (A) ja suletakse ees takjakinne ning plöksliitega (B).

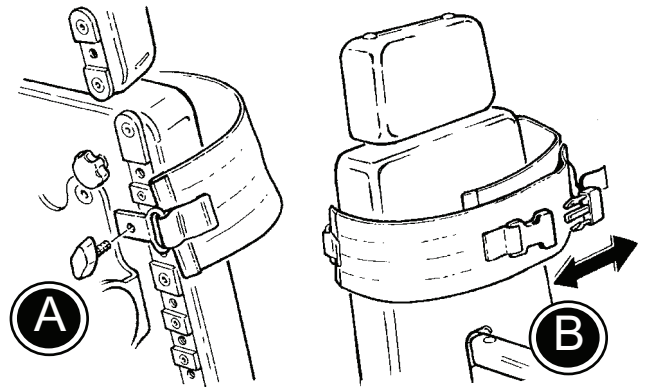

SELJATUGI


Reguleerida saab nii seljatoe kõrgust (A) kui ka paigaldussügavust (B).


Enne lapse panemist abivahendisse:


1. eemaldage seljatugi (C);
2. keerake lahti seljatoe kinnitusvahend, selleks tõmmake vabastusdetaili (D).

Kinnitage käepidemega.

Laps ei tohi istuda seljatoe kinnituselemendil. Lapse ja kinnitusvahendi vahel peab alati olema paarisentimeetrine vahemaa.

 NB! Olge seljatoe sobitamisel ettevaatlik.

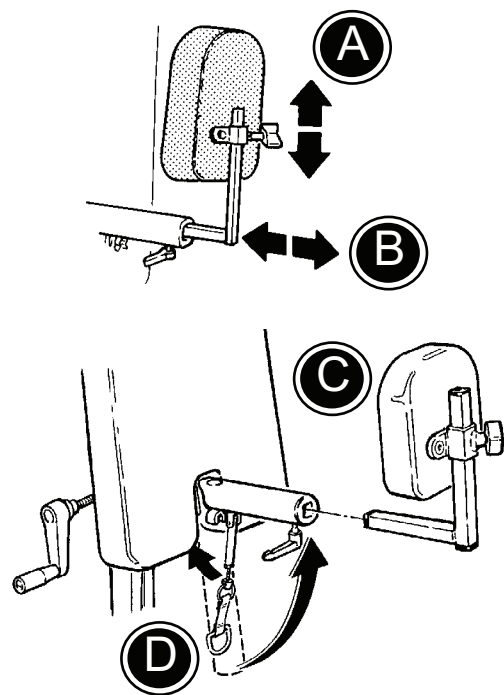

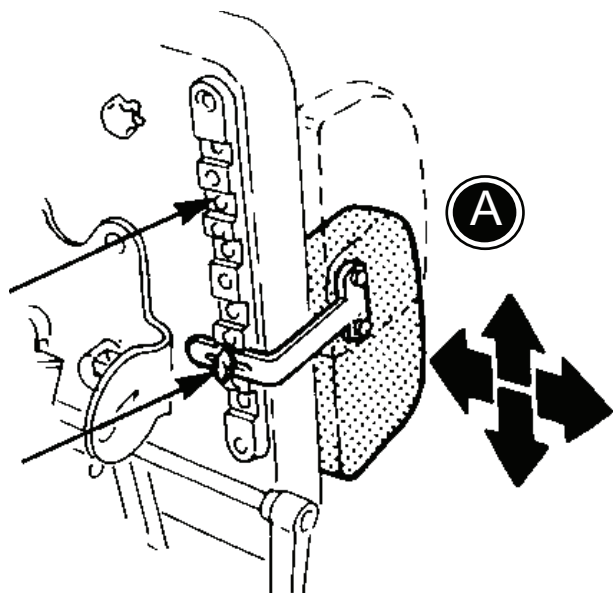


KÜLJETUGI


Paigaldage küljetoed kas ühendusülile, et anda vajalik toetus ülakehale, või põhiplaadile, et toetada keha ja puusi. Reguleerida saab külgtugede kõrgust ja vahekaugust (A).

SÕLTUMATU ABDUKTSIOON

Abduktsiooni on võimalik reguleerida vahemikus 0° kuni 30°, selleks pöörake mõlemal küljel olevaid käepidemeid (A).

Tagasitõmmatav käepide kalde reguleerimiseks (B).

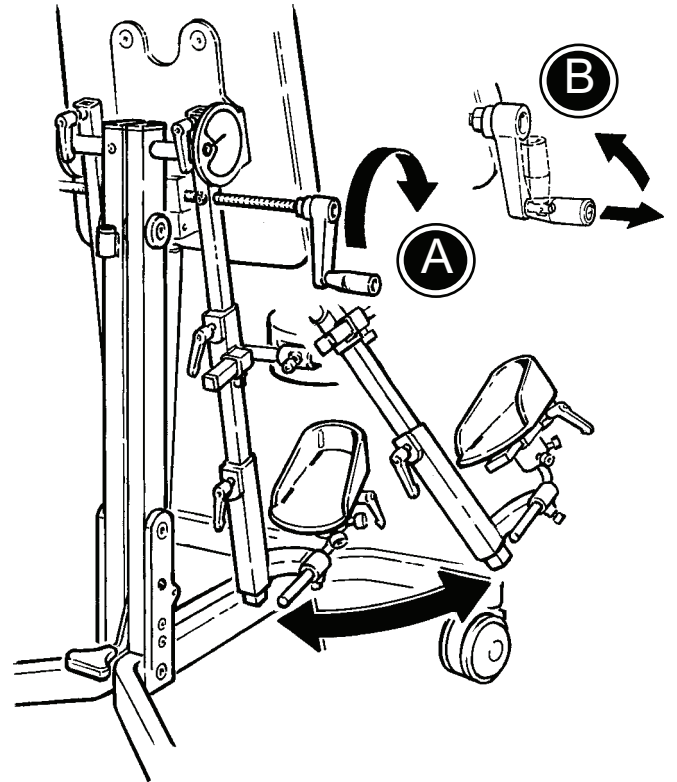

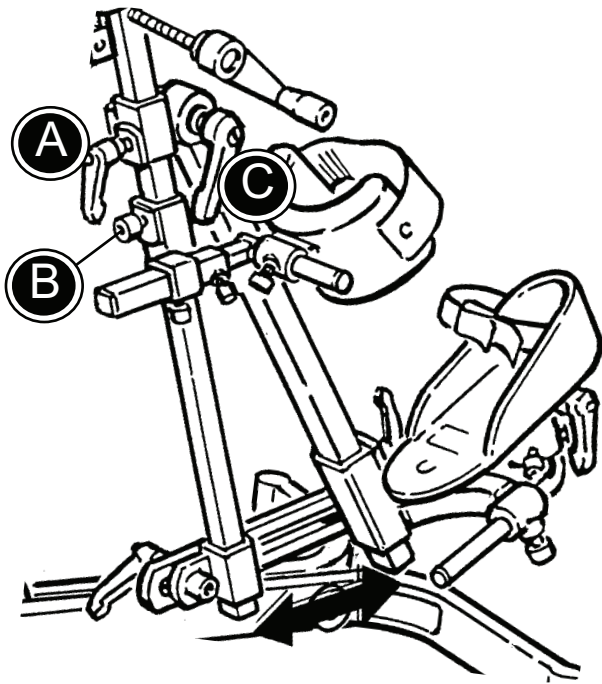

SÄÄREOSA KALDENURK

Paigaldage sääreosa kaldenurga reguleerimisvarras abduktsioonivardale järgmiselt:

- 1) eemaldage kinnitustugi, selleks keerake käepidet (A);
- 2) põlvetegede eemaldamiseks keerake lahti kuuskantpesapeakruvi (B);
- 3) paigaldage põlvetugi sääreosa kaldenurga reguleerimisvardale ja keerake käepidemest (A) kinni;
- 4) paigaldage jalatugi sääreosa kaldenurga reguleerimisvardale.





Reguleerige sääreosa kaldenurga reguleerimisvarda kõrgust käepideme (B) keeramise ja kaldenurka käepideme (C) keeramisega. Jalatoe reguleerimist on kirjeldatud leheküljel 16.


PÕLVETUGI

Reeglina tarnitakse Gazelle PS koos põlvetugedega, mis on paigaldatud kasutamiseks ettepoole vaatavate laste jaoks. Et saada neid kasutada tahapoole vaatavate laste jaoks, tuleb põlvetoed ümber pöörata:

- 1) jalatugede eemaldamiseks keerake käepidet (A);
- 2) põlvetoe komplektse sõlme eemaldamiseks keerake käepidet (B);
- 3) paigaldage põlvetoe komplektne sõlm vastasküljele ja keerake seal käepidemest kinni;
- 4) keerake põlvetoe kinnitusvahendit 180°, selleks keerake lahti kruvid (C) ja (D);
- 5) tahapoole vaatavatel lastel kasutamiseks keerake lahti kruvi (E) ja pöörake põlvetugi ringi.

Reguleerige põlvetoe asendit ja fikseerige see kaasasoleva 6 mm kuuskantsisevõtme abil. Keerake lahti kruvid (C) ja (D), nüüd saate reguleerida põlvetugede paigaldussügavust. Kruvi (E) lahtikeeramiseks on võimalik reguleerida põlvetugede vahekaugust ja kaldenurki. Põlvetoe komplektse sõlme kõrguse reguleerimiseks kasutage käepidet (B).

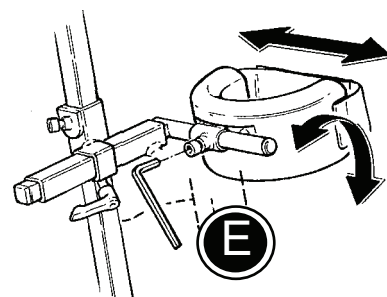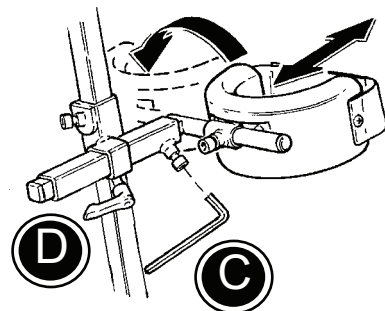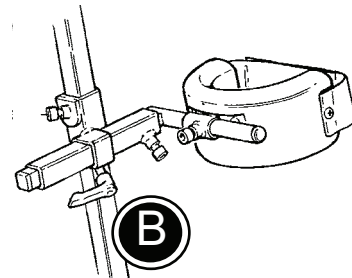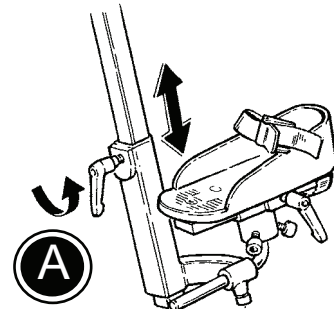

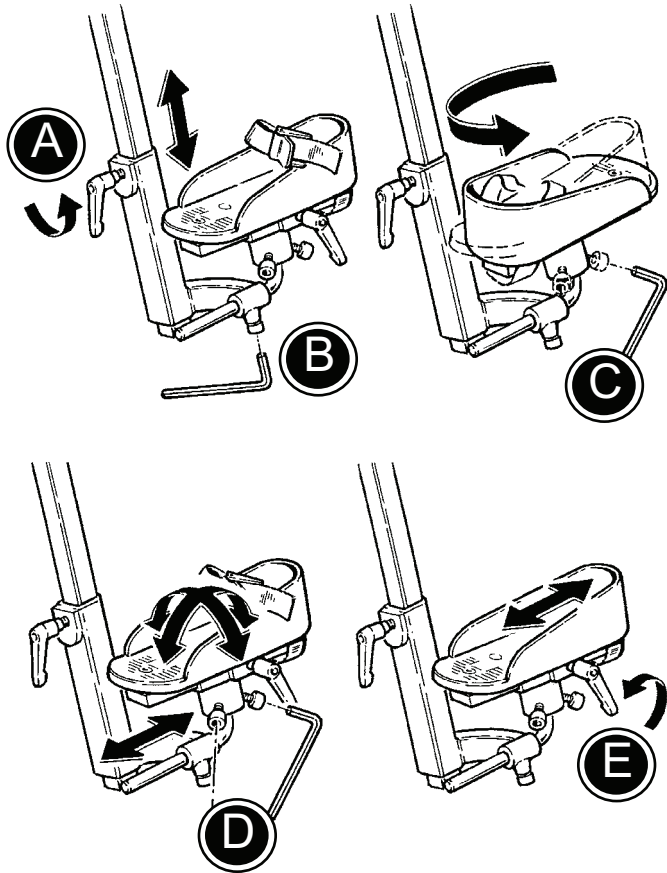

JALATUGI

Kasutamiseks tahapoole vaataval lapsel.

Kui põlvetugi on ümber pööratud, siis tuleb jalatoed paigaldada samale poole, kust need ära võeti.

- 1) Paigaldage jalatoed ja keerake käepidemest kinni. (A).
- 2) Keerake lahti kruvi (B) ja reguleerige jalatoe paigaldussügavust.
- 3) Keerake lahti kruvid (C) ja (D) ja pöörake jalatuge 180°.
- 4) Vajalikus asendis keerake kruvid kinni.

Jalaplaat on paigaldatud liigendile. See võimaldab reguleerida jalaplaadi kaldenurka kruvide (C) ja (D) lahtikeeramisega.

Jalaplaadi paigaldussügavust saab reguleerida kas käepideme (E) või kruvi (B) lahtikeeramisega.

KAUSIGA VÕI KAUSITA LAUD

Keerake suured käepidemed (A) ja (B) täielikult lahti ning pange laua kinnitusvahend tagaküljel olevatesse kahte torusse. Keerake suured käepidemed (A) ja (B) uuesti kinni.


Keerake suur käepide (A) lahti, nüüd saab pöörata laua kinnitussõlme 180 kraadi, et seda saaks kasutada kõhuli- või seliliasendis.

Pange laud laua kinnitussõlme torudesse. Pärast nõutavasse asendisse viimist keerake suured käepidemed (C) kinni.

Laua kõrguse reguleerimiseks keerake käepidemed (B) lahti. Laua kalde reguleerimiseks keerake käepideme (A) lahti.



Kausiga laud tarnitakse koos lisakatteplaadiga, et seda saaks kasutada tavalise lauana.

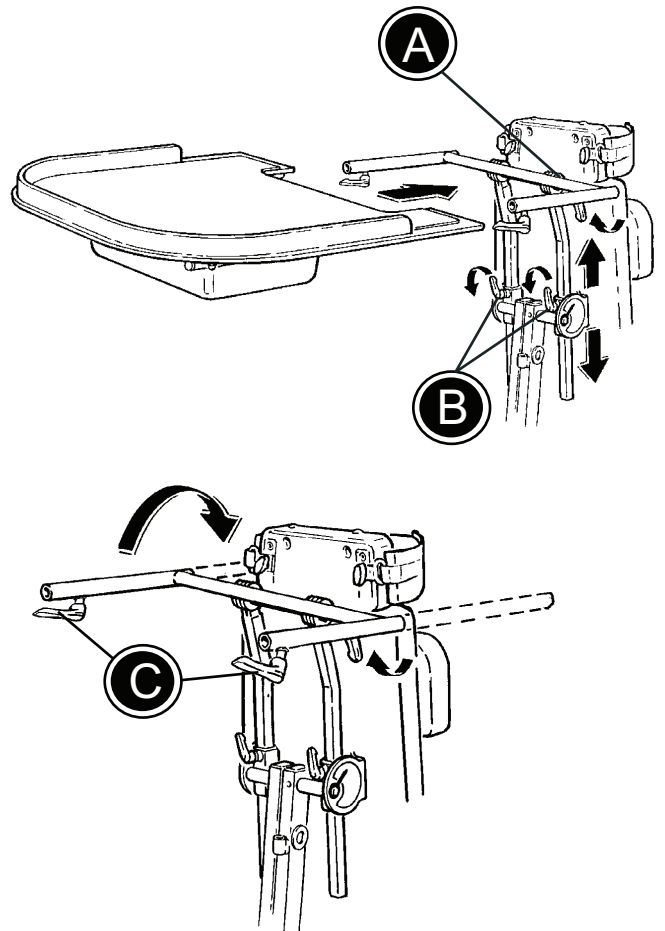


KALDENURGA REGULEERIMINE

Kaldenurga näidik (A).

Gazelle PS-i kaldenurga reguleerimiseks vahemikus vertikaalasend kuni 15° allpool horisontaaltasandit vajutage pedaalile (B).



Turvalisuse tagamiseks saab pedaali lukustada soovitud kaldenurgale vastavas asendis. Keerake gaasvedru alumises otsas olevat nuppu ja Gazelle PS lukustub (C).

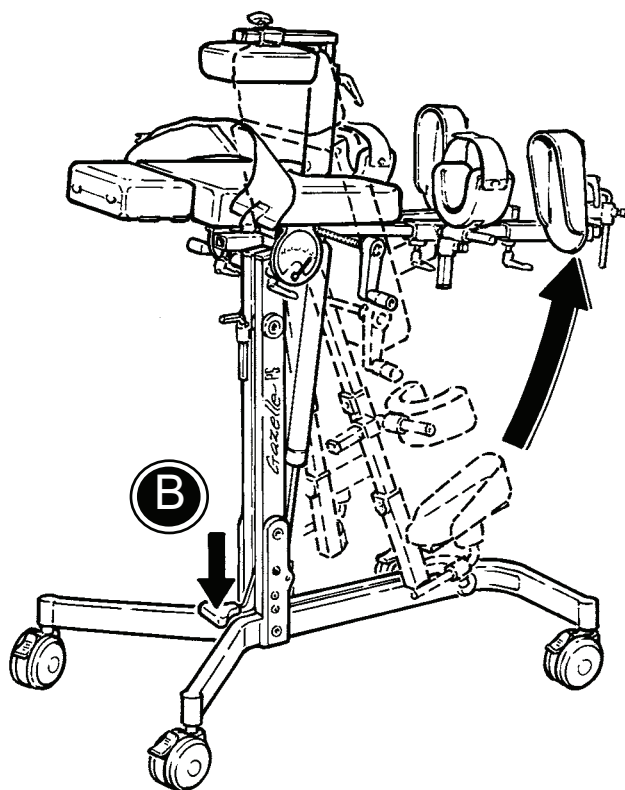


GAASVEDRU REGULEERIMINE

Seisulaua Gazelle PS on kaldenurga reguleerimiseks gaasvedru. Mõne aja pärast võib see vajada reguleerimist. Reguleerimine on vajalik siis, kui:

- gaasvedru vabaneb iseenesest;
- gaasvedru ei saa üldse vabastada.

Kui gaasvedru vabaneb ise, lõdvendage 17 mm mutrivõtmega mutrit (B). Keerake pingutamiseks varrast (A) vastupäeva. Keerake mutter (B) uuesti kinni.

Kui gaasvedru ei vabane, lõdvendage 17 mm mutrivõtmega mutrit (B). Keerake lõdvendamiseks varrast (A) päripäeva. Keerake mutter (B) uuesti kinni.

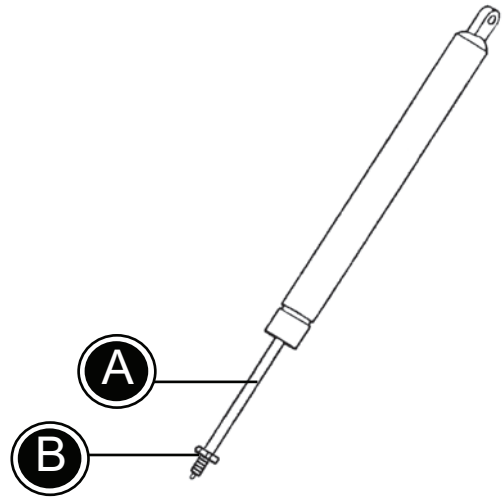


TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

A) Seerianumber

Silt on paigaldatud raami alla.

B) Tootja

Silt on paigaldatud raami tagaküljele vasaku tagaratta juurde.

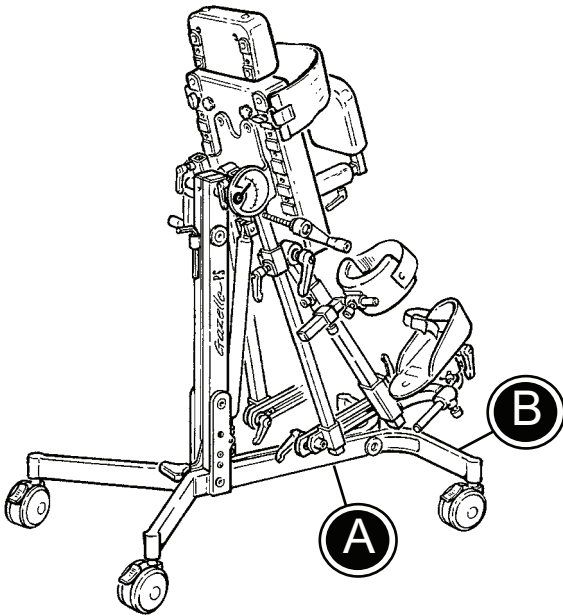


A



B



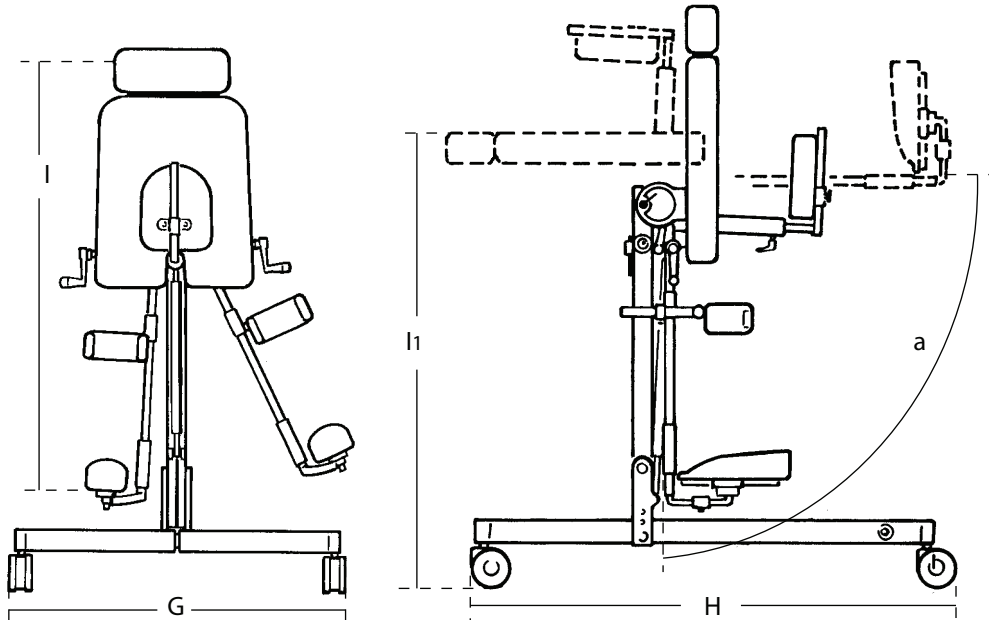

MÕÕTMED

	Suurus 1	Suurus 2	Suurus 3
Kogulaius, raam (G)	480 mm (19")	580 mm (23")	650 mm (26")
Kõrgus, horisontaal-suunas (H)	760 mm (30")	880 mm (35")	990 mm (35")
Pikkus, alates jalatoest (I)	450–950 mm (18–37")	600–1050 mm (24–41")	700–1250 mm (28–49")
Kogupikkus, raam (I1)	760 mm (30")	800 mm (31 1/2")	900 mm (39")
Kaldenurk (a)	90° kuni –15°	90° kuni –15°	90° kuni –15°
Kaal	20 kg	22 kg	24 kg
Max kandevõime	40 kg	60 kg	80 kg

TEHNILISED ANDMED

Raam: kroomitud või pulberlakiga kaetud teras

Polster: PUR (polüuretaanvaht)

TOOTJA

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved

TURUSTAJA



Leidke turustaja veebilehelt www.R82.com