



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



neXus 3
Kasutusjuhend




Sisukord

Hoiatused	3
Hooldus ja kasutamine	5
Kokkupanek	7
Pehme koti paigaldamine.....	8
Valikulised tarvikud	9
Korv – mudel 4510.....	9
Kepihoidik – mudel 80703	9
Salv – mudel 80702.....	9
Aeglustuspidur – mudel 4950.....	10
Rulaatori ülevaade	11
Käepidemete kõrguse reguleerimine	11
Lisahoiatused	12
Pidurite kasutamine/reguleerimine	13
TÄHTSAD REGULEERIMISHOIATUSED	13
Lahtivõtmine/kokkupanek	14
KOKKUPANEK.....	14

! ENNE RULAATORI KASUTAMIST LUGEGE KÕIK HOIATUSED HOOLIKALT LÄBI.
HOIDKE SEE TEAVE EDASPIDISE KASUTAMISE JAOKS ALLES.



TÄHTIS! Hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Enne toote kasutamist lugege kõik hoiatused läbi ja saage neist aru.

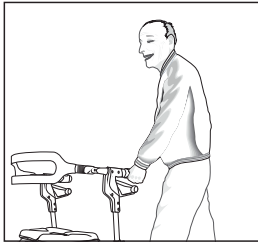


ÄRGE jätke rulaatorit järelevalveta. Iga kord, kui rulaator on olnud vaateväljast eemal (nt paigutatud sõidukisse jne), kontrollige seda enne kasutamist kahjustuste suhtes.



ÄRGE kasutage seda ratastooli transporditoolina. Rulaator ei ole mõeldud selleks otstarbeks.



ETTEVAATUST! Enne toote kasutamist veenduge, et see poleks kulunud ega kahjustatud. ÄRGE kasutage toodet, kui see ei sisalda kõiki osi või on mingil viisil kahjustunud.

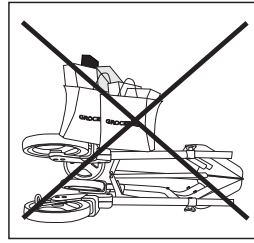


ÄRGE pange kokkupandud rulaatori peale midagi, sest see kahjustab raami, plastosi jne.


TÄHTIS!




Kui rulaatorit on hoitud transpordivahendis, nt lennukis, rongis, laevas, bussis, autos jne, on oht, et rulaator või selle osad võivad olla kahjustatud. Palun kontrollige seda enne kasutamist hoolikalt.

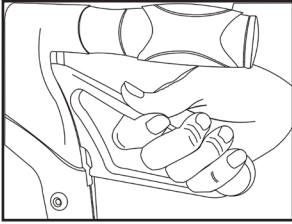


Enne istmele istumist veenduge, et pidurid oleksid lukustatud.

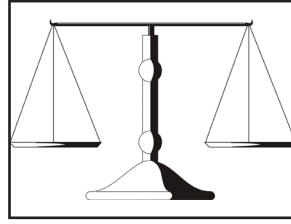

ÄRGE nõjatuge istumise ajal rulaatori ühele küljele. Jagage rulaatori ümbermineku vältimiseks massi ühtlaselt.

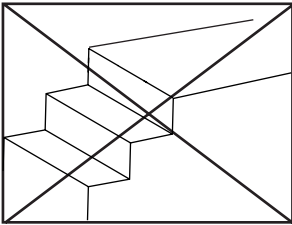


ÄRGE kasutage rulaatorit treppidel ega eskalaatoritel. Kasutage seda toodet ainult tasasel takistusteta pinnal.

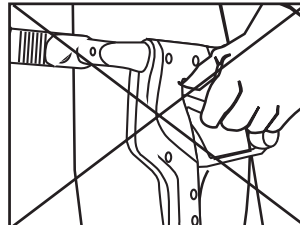


ÄRGE kasutage piduri käepidemeid istudes ega seisites. Kasutage ülemisi käepidemeid ainult keha stabiliseerimiseks.



ÄRGE hoidke pidurit pidevalt peal, sest see põhjustab piduriklotsi ja rehvi enneaegset kulumist.

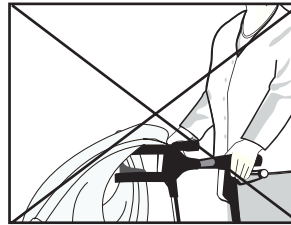

ÄRGE asetage midagi seljatoele, sest see võib seljatuge kahjustada.

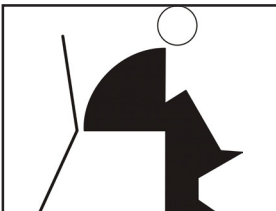


Enne istumist puudutage jalgade tagaosaga istet.




ÄRGE ületage lubatud massi.




Ärge kasutage kloori sisaldavat valgendit ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Pühkige rulaatorit niiske lapiga ja kerge puhastusvahendiga.

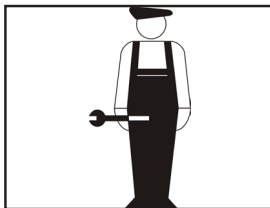


Laske rulaatorit igal aastal KONTROLLIDA volitatud edasimüüjal/hooldustehnikul. Laske oma rulaatorit reguleerida ainult volitatud töötajatel.

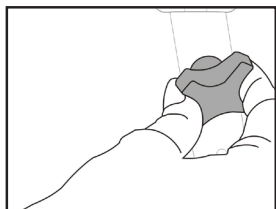

KONTROLLIGE regulaarselt, kas mustad kõrguse reguleerimise nupud on kindlalt kinni.

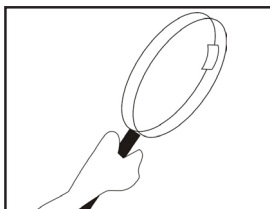

KONTROLLIGE sageli, ega mõni rulaatori plast- või metallosa pole lahtine, pragunenud või roostetanud.

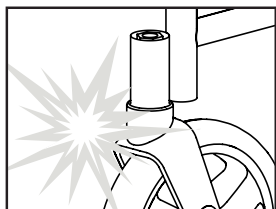


KONTROLLIGE rulaatorit, et tagada esiharkide ja kõigi rataste kerge pööratavus ning mustuse või takistuste puudumine.




ÄRGE hoidke rulaatorit soojusallika lähedal.



ÄRGE jätke rulaatorit ilmastikutingimuste kätte.

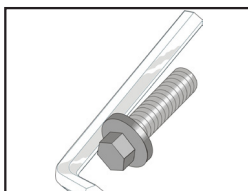


Kasutage rulaatoril ainult lubatud osi/tarvikuid.

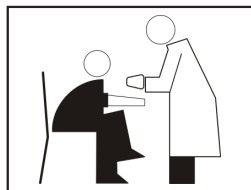

See rulaator on mõeldud ainult liikumisabivahendiks. Kasutage istet ainult puhkepauside ajal.

ISTUMISEKS puudutage jalgade tagaosaga istme serva, et veenduda enne istumist rulaatori õiges asendis.

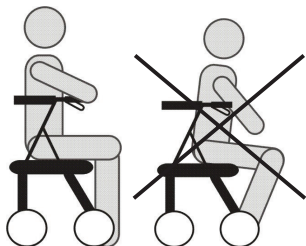

TÄHTIS! Enne istumist veenduge, et rulaator ei hakkaks liikuma. Pidurid peavad olema pargitud/lukustatud asendis.




See rulaator on mõeldud kasutamiseks kõndimisabivahendina ja seda ei tohi kunagi kasutada muul eesmärgil.


ÄRGE toetage end käepidemetele, kui soovite istuda. Kasutage käepidemeid oma keha stabiliseerimiseks, kui te ettevaatlikult ümber pöörate. Hoidke käed kummist käepidemetel ja laskuge aeglaselt istmele.




ÄRGE KUNAGI kasutage rulaaorit muul otstarbel, kui ette nähtud.

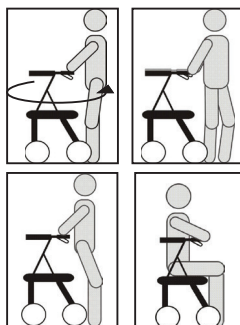


Kõndimisel veenduge, et tee oleks vaba ja takistusteta, vältimaks vigastusi ja kahjustusi.

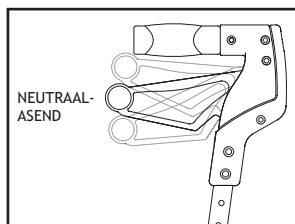


Veenduge, et käepide oleks neutraalasendis.

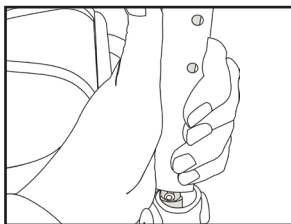


Lükake ülemine toru alumisse toru sisse. Tähtis! Ülemise sisemise toru värvus peab vastama raami alumise toru värvusele.

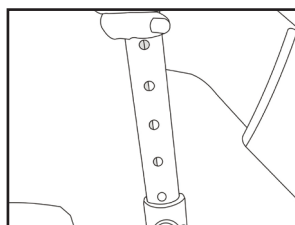


Seadke käepide soovitud kõrgusele. Tähtis! Piduri käepide peab olema neutraalasendis!

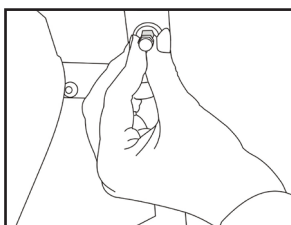

Asetage kuuskantpoldi pea kohakuti kuuskantavaga plastkorgis. Tähtis! Ülemise toru ja alumise sisetoru avad ei sobitu ideaalselt.

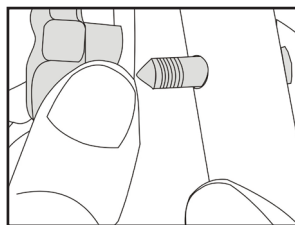


Lükake polt terava otsaga lükkamiskäepidemel olevasse avasse. Samal ajal koputage piduriklotsi ja lükake aeglaselt polt läbi.

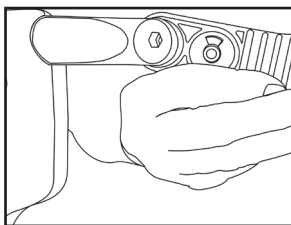


Seljatoe paigaldamisel veenduge, et võtme kuju oleks suunatud ülespoole. Asetage käepideme otsas asuvasse klambrisse. Keerake poldi ja mutriga kinni.


Pehme koti paigaldamine

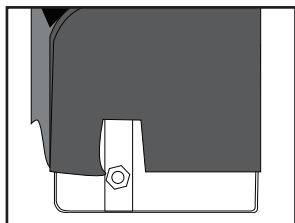


Lükake metallraam pehme koti mõlemal küljel olevatesse avadesse. Raami iga külg sobib ainult pehme koti vastavasse avasse. Klamber peab olema pehme koti väljalõikes nähtav.

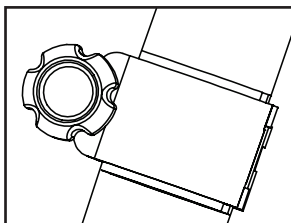

Kinnitage klambrid rulaatoriraami esiosa külge, nagu on näidatud. Veenduge, et koti mõlemad küljed oleksid ühtlased ja klamber oleks küljel hargi korgi peal.

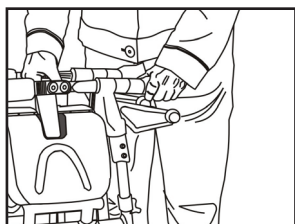

Märkus. Pehme koti paigaldamise lihtsustamiseks hakake rulaatorit kokku panema istmerihma kergelt üles tõmmates.

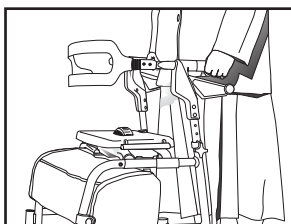

Kui klambrid on kinnitatud, avage rulaator uuesti.




Olge ettevaatlik, et klambri krivikeermed pingutamisel kahjustada ei saaks.




Maksimaalne koti kandevõime: 5 kg

Korv – mudel 4510

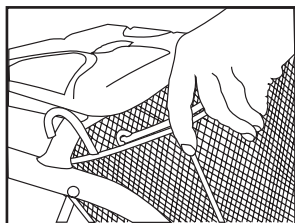


Lisage korvi istet toetavale torule konksude abil.

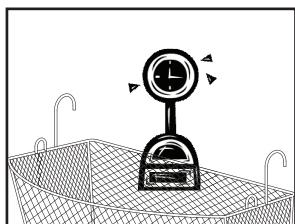


Ettevaatust! ÄRGE koormake korvi üle.
Maksimumkoormus: 5 kg

Salv – mudel 80702

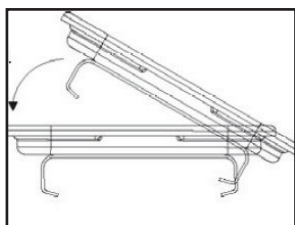


Kinnitage salv kronstein istme tagumisele servale. Kinnitage see kohale, vajutades kindlalt istme esiservale. Eemaldage tõstmise teel.


Kepihoidik – mudel 80703

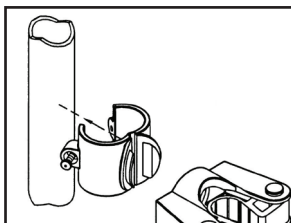

Avage klamber piisavalt, et see saaks raami toru ümber kinnituda. Avamisel näete, et klambrilukud liiguvad üksteise poole.

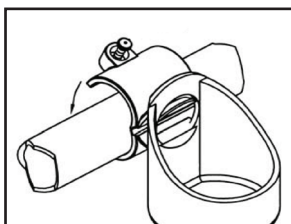


Enne klambri sulgemist asetage kinnitusdetail/ tops klambri lukkudesse. Kui klamber on kinnitatud, hoiavad need lukud kinnitusdetaili/ topsi kindlalt paigal.

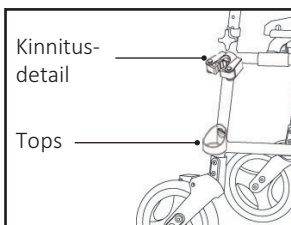


Kontrollige, kas kinnitusdetaili ja topsi asend on õige.


Aeglustuspidur – mudel 4950

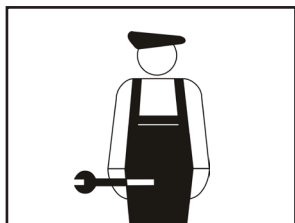


Ettevaatus! Aeglustuspidurit tohib paigaldada ainult volitatud hooldustehnik.

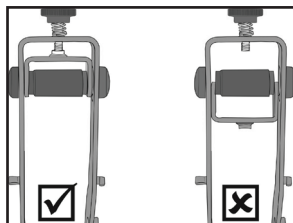


Veenduge, et kronstein oleks ratta paigutamisel suunatud ülespoole.

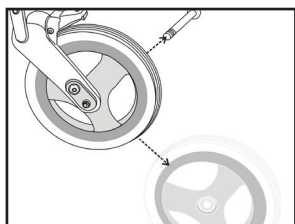


Eemaldage 5 mm kuuskantvõtmega teljepoldid ja seejärel lükake ratas välja.

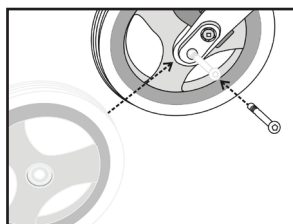

Lükake ratas plasthargi vahele. Hoidke asendit, sisestades uuesti teljepoldi läbi plasthargi alumiste avade ja rattas oleva ava.

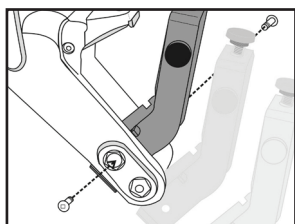


Paigaldage aeglustuspidur nii, et kinnitusavad joonduksid tagumise plasthargi ülemise avaga. Paigaldage kaasasolevate kruvidega, vältides keerme kahjustumist.

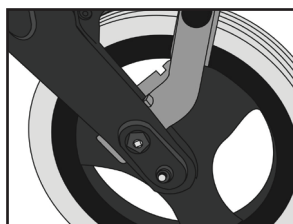


Kinnitage polt mutriga. Polt peab olema täielikult mutrist läbi (tugevasti kinni).

Ettevaatus! Ärge kasutage, kui polt ei ole kindlalt kinnitatud või rattad vibreerivad!

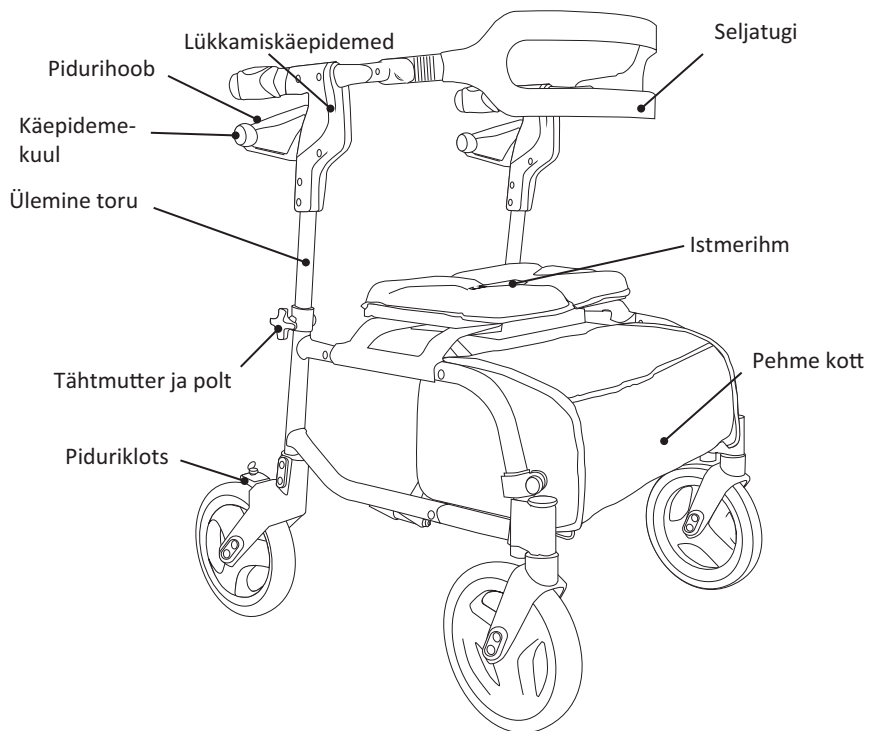

Käepidemete kõrguse reguleerimine

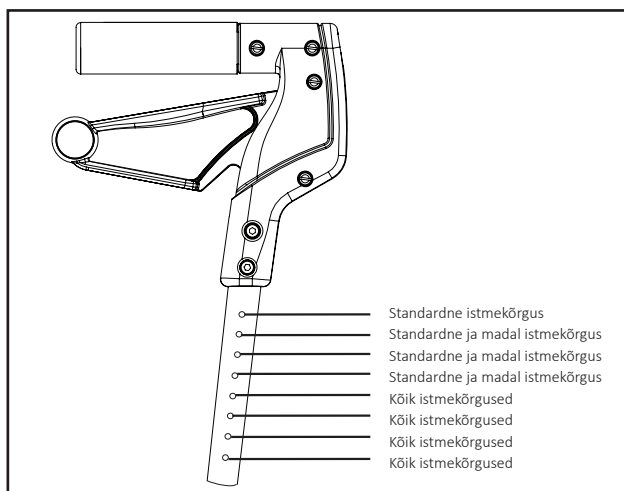

Toote nimi

Artikli number

Kasutaja
maksimaalne kaal

Valmistamise kuupäev,
partii number ja
tootja aadress

UPC-kood

Kood 39 vötkood,
seerianumber

Istme kõrgus

Toote laius

Kasutamine siseruumides ja välistingimustes

Lisahoiatused



Veenduge, et kõik poldid oleksid enne rulaatori kasutamist kindlalt kinnitatud.






Enne rulaatorile istumist peavad pidurit olema pargitud/lukustatud asendis.



ÄRGE reguleerige pidureid enne, kui rattad on piisavalt kulunud.



ÄRGE riputage midagi seljatoele, sest see võib puruneda.

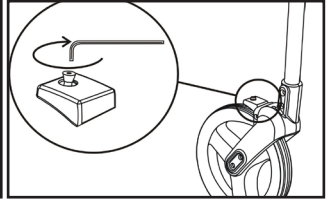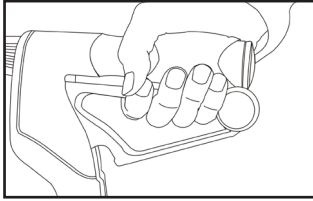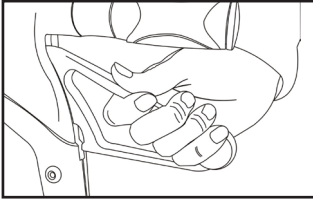

↓ **LUKUSTAGE PIDUR,**
surudes käepidet allapoole
(silmuskäepidemel suruge
punast kuuli, mis asub
käpideme otsas). Õige
surumise korral lukustub
käpide alumisse
asendisse.

↑ **PIDURI VABASTAMISEKS**
tõmmake käepidet üles.
PIDURIGA KIIRUSE
JUHTIMISEKS suruge
käpidet.

PIDURI REGULEERIMISEKS
keerake kuuskantvõtmega
kruvi piduriklotsil.

↻ **PÄRIPÄEVA** pidurite
pingutamiseks.

↻ **VASTUPÄEVA** pidurite
lõdvendamiseks.

MÄRKUS. ÄRGE KEERAKE
LIIGA KÕVASTI.


TÄHTSAD REGULEERIMISHOIATUSED



Kahjustus võib tekkida:

- kui käigukast ei ole reguleerimise ajal neutraalasendis;
- poldipea kuusnurkne kuju ei sobitu kuuskantkujuga plastkorgis;
- poldi sisestamisel keeratakse käepidet edasi ja tagasi!

KOKKUPANEK

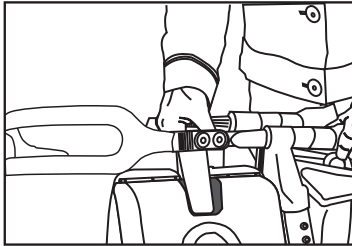

↑ **TÕMMAKE ÜLES**
istmerihm, mis asub
istme keskel.

↓ **SÜRUGE** istmele, et
see lukustuks kohale.



TÕMMAKE LAHKU
lükkamiskäepidemed,
et viia rulaator õigesse
kõndimisasendisse. Toetage
rulaator lahtivõtmise ajal
tagumiste rataste peale.

TÄHTIS!
Rulaatori saab osaliselt kokku
klappida, et sellega läbi kitsaste
ukseavade pääseda.

ETTEVAATUST!



Ärge kunagi istuge istmele, kui rulaator pole kindlalt paigal ja pidurid pole pargitud/ lukustatud asendis.

ETTEVAATUST!



Ärge istuge istmele äkki, sest see võib kahjustada istet ja selle osi.

Seerianumber

(Asub paremal tagajalal)

Ostmiskuupäev

Teie edasimüüja:

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm

Tel:- +46 8665 3500

Faks: +46 8665 3510

E-post: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Tel: 613 723 6734

Faks: 613 723 1058

E-post: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Tel: 512 476 7199

Faks: 512 476 7190

E-post: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE AUSTRALIA

Unit 4, 49 Bertie Street

Port Melbourne, VIC 3207

Tel: +61 130 013 2736

Faks: + 61 (03) 9645 4954

E-post: info.au@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Tel: +31 577 412 171

Faks: +31 577 412 170

E-post: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

